

**Lakansskydd Assista** är ett lakansskydd med en liggyta av frotté. Lakansskyddet är för personer med urinläckage. Lakansskyddet bäddas i sängen och absorberar urin samt skyddar sängens madrass mot urinläckage. Lakansskyddet har ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Lakansskyddet är laminerat vilket gör det mycket starkt och resulterar i en slät bäddyta, utan risk för inre veck. Bädda alltid in bäddflikarna under sängen för bästa komfort och säkerhet.




|                                                 |                                                                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Varumärke                                       | Absorba                                                                        |
| Benämning                                       | Absorba lakansskydd Assista                                                    |
| Art nr                                          | <b>1110</b>                                                                    |
| Totalyta                                        | B185 x L75 cm                                                                  |
| Absorberande yta                                | B85 x L75 cm                                                                   |
| Sängbredd                                       | 90 cm                                                                          |
| Absorptionskapacitet enligt SS 8760033:2015     | 1205 ml                                                                        |
| Antal produkter/förpackning                     | 1 st                                                                           |
| Material                                        |                                                                                |
| Ligg yta                                        | 90% Bomull, 10% Polyester                                                      |
| Absorptionsskikt                                | 65% Polyester, 35% Rayon                                                       |
| Spärrskikt                                      | Polyuretan                                                                     |
| Bäddflikar                                      | 50% Polyester, 50% Bomull                                                      |
| Antal tvättar (hushållstvätt, ej industritvätt) | Ca 250 st                                                                      |
| Kasseras                                        | Textilåtervinning alt brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning         |
| Förvaring                                       | Rumstemperatur                                                                 |
| Övrig information                               | Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling. |

## Användaranvisning

- Tvätta lakansskyddet före användning för att aktivera absorptionsförmågan.
- Placera lakansskyddet i sängen med den blåa sidan mot madrassen.
- Bädda fast lakansskyddet ordentligt med bäddflikarna. Dra inte i bäddflikarna när lakansskyddet används.
- Var noga med att lakansskyddet är anpassat efter sängens bredd.

Observera att lakansskyddet inte är till för att förflytta eller lyfta brukare med!

## Symboler:

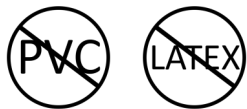

Ingen PVC eller Latex



Tvättråd



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr 1110



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Observera att lakansskyddet inte är till för att förflytta/positionera brukare med! Bädda alltid in bäddflikarna. Observera! Produkten är inte avsedd att lyfta personer med. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme. Vid allvariga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.

EUDAMED



SRN SE-MF-000033314



\*Certifikat nr står på produkten



Swereco AB  
Vagnvägen 4  
364 42 Lenhovda