

Hjälpmedel i hemmet • Sitta, Ligga och Komfort • Lakansskydd

Art nr: 12221-S, 12221-M,
12221-L

Lakansskydd Brage är ett lakansskydd för personer med urinläckage. Lakansskyddet bäddas i sängen och absorberar urin samt skyddar sängens madrass mot urinläckage. Lakansskyddet har ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Lakansskyddet är laminerat vilket gör det mycket starkt och resulterar i en slät bäddyta, utan risk för inre veck.




Varumärke	Absorba		
Benämning	Absorba Lakansskydd Brage		
Art nr	12221-S	12221-M	12221-L
Totalyta	B 190 x L85 cm	B215 x L85 cm	B250 x L85 cm
Absorberande yta	B90 x L85 cm	B115 x L85 cm	B150 x L85 cm
Sängbredd	80-105 cm	110-120 cm	140-160 cm
Absorptionskapacitet enligt SS 8760033:2015	1668 ml (+/- 49 ml)		
Antal produkter/förpackning	1 st		
Material	100% Polyester		
Ligg yta	95% Polyester, 5% Rayon		
Absorptionsskikt	Polyuretan		
Spärrskikt	50% Polyester, 50% Bomull		
Bäddflikar	100% Polyester		
Undersidan			
Antal tvättar (hushållstvätt, ej industritvätt)	Ca 450 st		
Kasseras	Textilåtervinning alt brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning		
Förvaring	Rumstemperatur		
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.		

Användaranvisning

- Tvätta lakansskyddet före användning för att aktivera absorptionsförmågan.
- Placera lakansskyddet i sängen med Sanicare-trycket mot madrassen.
- Bädda fast lakansskyddet ordentligt med bäddflikarna under madrassen. Dra inte i bäddflikarna när lakansskyddet används.

Observera att lakansskyddet inte är till för att förflytta eller lyfta brukare med!

Symboler:

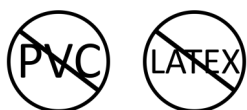

Ingen PVC eller Latex



Tvättråd



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr 12221-S, 12221-M, 12221-L



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Observera att lakansskyddet inte är till för att förflytta/positionera brukare med! Bädda alltid in bäddflikarna. Produkten är inte avsedd att lyfta personer med. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.

EUDAMED



SRN SE-MF-000033314



Swereco AB
Vagnvägen 4
364 42 Lenhovda