

Hjälpmedel i hemmet • Sitta, Ligga och Komfort • Sittskydd


Art.nr: 1293, 1295, 1296, 1297,
1298

Sittskydd finns i olika kulörer. Ett sittskydd är till för personer med inkontinens. Sittskyddet är diskret och funktionellt som förhindrar läckage på möblerna. Sittskyddet är i mjuk velour samt med ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material.



Varumärke	Absorba				
Benämning	Absorba sittskydd				
Art nr	1293	1295	1296	1297	1298
Färg	Blå	Ljusgrön	Blå	Grön	Ljusgrön
Vikt per produkt	149 g	82 g	150 g		102 g
Totalyta	B60 x L45 cm	B35 x L35 cm	B45 x L45 cm		
Absorptionskapacitet enligt SS 8760033:2015	755 ml	420 ml	660 ml		525 ml
Antal produkter/förpackning	1 st				
Material	100 % Polyester				
Sittyta	65 % Polyester, 35 % Rayon				
Absorptionsskikt	Polyuretan				
Spärrskikt	100 % Polyester				
Material baksida	100 % Polyester				
Antal tvättar	Ca 450 st				
Kasseras	Textilåtervinning alt. Brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning				
Förvaring	Rumstemperatur				
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.				

Symboler:

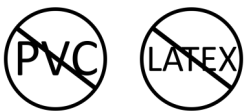

Ingen PVC eller Latex



Tvåtråd



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art.nr. 1293, 1295, 1296, 1297, 1298



Användaranvisning

- Tvätta sittskyddet före användning för att aktivera absorptionsförmågan.
- Placera sittskyddet med den ljusa sidan mot underlaget.



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Var uppmärksam så att sittskyddet ej faller till golvet – risk för fall. Produkten är inte avsedd att lyfta personer med. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



*Certifikat nr står på produkten



Swereco AB
Vagnvägen 4
364 42 Lenhovda

