

MerryRise lyftbåge kan användas av personer med nedsatt rörlighet i kroppen och då man behöver lyfta sig från en madrass eller om man glidit ner i sängen och vill lyfta sig uppåt mot huvudändan igen. Lyftbågen monteras utan verktyg. MerryRise är tillverkad av epoxilackerade stålrör. Den höjdställbara trapetsen är spärrad för att förhindra att den glider ur. Lyftbågen har två ben som kan ställas in på bredden och längden. Lyftbågens hävarm är svängbar ca 30 grader åt vardera hållet. Lyftbågen rengörs lämpligast med de på marknaden vanligen förekommande rengöringsmedlen. Vid rengöring, se till att lyftbågen torkar ordentligt, utvändigt såväl som invändigt!



Varumärke	MerryCare
Benämning	MerryRise lyftbåge
Art nr	145510
Antal produkter/förpackning	1 st
Vikt per produkt	14 kg
Höjd	200 cm
Ställbara ben i bredd	100-114 cm
Ställbara ben i längd	90-97 cm
Max brukarvikt kg	120 kg
Material	Epoxilackerade stålrör
Rengöring	Vatten och vanliga rengöringsmedel. Se till att lyftbågen torkar ordentligt efter tvätt
Kasseras	Metall avfall, sorteras efter lokal anvisning
Förvaring	Rumstemperatur
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling


Användaranvisning

Placera lyftbågen bakom sängens huvudgavel på ett jämnt underlag.

Montera benen i önskad längd så att lyftbågen står stadigt och dra därefter åt stoppskruvarna för att fixera benen.

Trä i förlängningsröret i foten och därefter placera hävert/lyftbågen i röret.


Kontrollera att lyftbågen står stadigt och att alla skruvar är åtdragna.

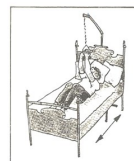

Monteringsanvisning

MerryRise är demonterbar i 8 delar. Lyftbågen monteras utan verktyg.

MerryRise är tillverkad av epoxilackerade stålrör. Den höjdställbara trapetsen är spärrad för att förhindra att den glider ur. Lyftbågen har två ben som är bredställbara (100-114 cm) och två som är längdställbara (90-97 cm). Lyftbågens hävarm är svängbar ca 30 grader åt vardera hållet. Hävarmen har en vinkelgrad 137mmx19,29mm i den nedersta och 137mmx10,36mm i den övre vinkeln. Det är 130 cm mellan golv och svängarm/böj.

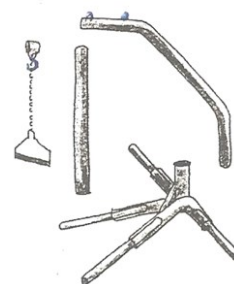

Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr 145510



Läs monteringsanvisningen/bruksanvisningen innan montering!

Kontrollera alltid lyftbågen efter montering och innan användning att lyftbåge står stadigt och att det inte finns risk att den välter! Säkerställ att det finns svängrum för hävarmen. Se alltid till att benen är utdragna enligt bruksanvisningen och att den står stadigt på marken – risk för skada om de ej är korrekt monterade. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



SRN SE-MF-000033314



Swereco AB
Vagnvägen 4
364 42 Lenhovda