

Rörelsehjälpmedel • 4-punktsstöd • Gåbockar & Gåstativ


Art nr: 122200, 122210, 122220

Gåstativ Beta är ett gångstöd för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Varumärke	Swereco		
Benämning	Gåstativ Beta		
Art nr	122200	122210	122220
Höjd	85-97 cm	73-85 cm	60-72
Bredd	60 cm	60 cm	51 cm
Djup	48 cm	51 cm	47 cm
Max Brukarvikt	120 kg	120 kg	70 kg
Antal produkter/fp	1 st		
Material	Aluminium		
Kasseras	Metallskrot och plastavfall, förpackning i wellpapp, sorteras efter lokal anvisning		
Förvaring	Rumstemperatur		
Förmodad livslängd	ca 5 år vid normalt användande		
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.		

Användaranvisning

- 1) Justera höjden på gåstativet med hjälp av tryckknappen. Gåstativets höjd skall anpassas för den individuella brukaren.
- 2) Kontrollera tryckknappen för höjdjusteringen regelbundet. Glappar tryckknappen måste användningen av gåbocken genast avbrytas och produkten skickas in för service.
- 3) Kontrollera stödfötterna före användning. Skadade eller utslitna stödfötter skall bytas ut mot nya.

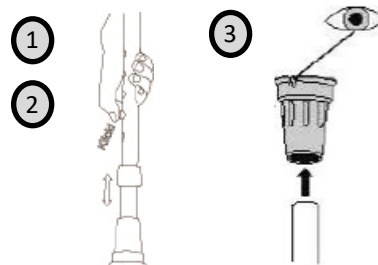

Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Kan tvättas med alkalisk tvållösning, pH 5-9.



Tvättas i max 85 °C i max 3 minuter.



Gör alltid en visuell kontroll innan användning



Innehåller Polypropen och Aluminium



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr 122200, 122210, 122220

Säkerhetsanvisning

- Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Gåstativet bör endast brukas på plant underlag. Vid förflyttning ska gåstativets fyra ben stå stadigt på marken för att undvika felaktig belastning. Den maximala brukarvikten är beräknad med alla fyra ben i marken.
- Produkten skall justeras in av kompetent personal (t.ex. arbetsterapeut, sjukgymnast eller motsvarande) för att anpassas till respektive brukares särskilda behov.
- Kontrollera regelbundet att knappen för höjdjustering inte glappar.
- Vid tecken på att höjdjusteringen glappar eller att produkten på annat sätt är utsliten bör produkten omedelbart tas ur bruk och skickas på service.
- Kontrollera regelbundet att doppskorna inte har blivit utslitna eller skadade. Skadade eller utslitna doppskor kan innebära ett försämrat grepp.
- Skadade eller utslitna doppskor skall bytas ut mot nya vilka kan beställas från Swereco.
- Produkten får ej belastas med ex klädesplagg, väskor eller liknande under användning.



Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.

EUDAMED



SRN SE-MF-000033314



Swereco AB
Vagnvägen 4
364 42 Lenhovda

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4, SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com · +46 (0)8 5000 5240

