

Isdubb Spets härdad / Ice pick SVCR,  
Isdubb Kronan / Ice pick Crown  
Rörelsehjälpmedel • Tillbehör

Art nr: 123300, 123300K,  
123350, 123350K

**Avsedd användning:** Isdubben fästes på Swereco-kryckan för att ge bättre grepp vid isigt underlag. Isdubben passar på kryckor 17-23 mm.

**Intended Use:** The ice pick is intended to use on the Swereco crutches on slippery/icy surfaces. The ice pick fits crutches 17-23 mm.



| Benämning                       | Isdubb Spets härdad/<br>Ice pick SVCR  | Isdubb Spets härdad/<br>Ice pick SVCR | Isdubb Kronan/<br>Ice pick Crown | Isdubb Kronan/<br>Ice pick Crown |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Art nr                          | 123300   | 123300K                               | 123350                           | 123350K                          |
| Förpackning                     |  | Konsumentförpackad                    |                                  | Konsumentförpackad               |
| Antal produkter/<br>förpackning | 1 st   |                                       |                                  |                                  |
| Material                        | Stål, PP   |                                       |                                  |                                  |
| Kasseras                        | Metallåtervinning, sorteras efter lokal anvisning                              |                                       |                                  |                                  |
| Förvaring                       | Rumstemperatur   |                                       |                                  |                                  |
| Övrig information               | Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling. |                                       |                                  |                                  |

## Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Kan tvättas med alkalisk tvällösning, pH 5-9 alt tor-kas med 70% isopropanol



Tvättas i max 85°C i max 3 minuter.



Gör alltid en visuell kontroll innan användning



Innehåller stål och polypropen



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr 123300, 123300K, 123350, 123350K

## Monteringsanvisning



## Säkerhetsanvisning:

- 1) Isdubben skruvas fast på kryckan med medföljande skruv
- 2) För att fälla upp/ner isdubben trycks de båda plastknopparna in för att frigöra dubben.
- 3) Säkerställ att isdubben är fixerad i position innan användning.
- 4) Kryckans doppsko skall kontrolleras regelbundet. Skadade eller utslitna doppskor ska bytas ut.

## Safety Instructions:

- 1) The icepick is mounted on the crutch with the screws delivered with the product.
- 2) Push the plastic knobs to release the icepick to fold it up and down on the crutch tip.
- 3) Make sure the icepick is properly fixed in position before use.
- 4) The crutch tip should be checked regularly. Damaged or worn crutch tips should be replaced.

EUDAMED SRN SE-MF-000033314



Swereco AB  
Vagnvägen 4  
364 42 Lenhovda



Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket. / Any serious incidents must be reported to Swereco.