

## KRYCKKÄPP, PROFIL

Artikelnummer: **123890, 123900, 123910, 123920**

### Säkerhetsanvisningar:

- Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Konsultera sjukvård innan användandet.
- Produkten skall justeras in av kompetent personal (t.ex. sjukgymnast eller annan personal med förskrivningsrätt) för att anpassas till respektive brukares särskilda behov.
- Kryckkäppen får aldrig brukas för att t.ex. stoppa en hissdörr eller liknande.
- Doppskon bör kontrolleras regelbundet. Skadade eller utslitna doppskor kan innebära ett försämrat grepp.
- Skadade eller utslitna doppskor skall bytas ut mot nya, vilka kan beställas från Swereco.
- Om föremål (t.ex. papper, skräp etc.) fastnat under doppskon skall dessa genast tas bort, greppet kan försämrats.
- Vid halt underlag skall doppskon kompletteras med isdubb och stor försiktighet iakttagas.
- Vid tecken på att höjdjusteringen glappar eller att produkten på annat sätt är utsliten bör produkten tas ur bruk.

**Avsedd användning:** Kryckkäppen är endast avsedd att brukas som gångstöd för personer med nedsatt rörelsefunktion.

### Teknisk specifikation

Art. nr: <b>123890</b> höger	Art. nr: <b>123900</b> vänster	Art. nr: <b>123910</b> lång, höger	Art. nr: <b>123920</b> lång, vänster
Max brukarvikt: 140 kg Ställbar höjd: 77-99 cm Vikt: 0,67 kg	Max brukarvikt: 140 kg Ställbar höjd: 77-99 cm Vikt: 0,67 kg	Max brukarvikt: 120 kg Ställbar höjd: 92-114 cm Vikt: 0,73 kg	Max brukarvikt: 120 kg Ställbar höjd: 92-114 cm Vikt: 0,73 kg

Material: Aluminiumrör, PP (armbygel), trä (handtag), naturgummi (doppskor)


**Symboler:** Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen.



Max säker brukarvikt.



Kan tvättas med alkalisk tvällösning, pH 5-9.

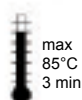

Tvättas i max 85°C i max 3 minuter.



Visuell kontroll.



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Tillverkad av:

**Swereco AB**

Vagnvägen 4

SE-364 42 Lenhovda




Tel: +46 (0)8 5000 5240

[www.swereco.com](http://www.swereco.com)

[info@swereco.com](mailto:info@swereco.com)

## Användning:

1. Justera höjden för kryckkåppen med hjälp av tryckknappen. Kryckkåppens höjd skall anpassas efter den individuella brukaren.
2. Kontrollera tryckknappen för höjdstyret regelbundet. Glappar tryckknappen måste användningen av kryckkåppen genast avbrytas.
3. Handtaget är roterbart. Justera handtaget genom att lossa på skruven med hjälp av en NV 6 insexnyckel. Vinkeln på handtaget skall anpassas efter den individuella brukaren.
4. Kontrollera skruven för handtaget regelbundet. Sitter skruven löst måste denna dras åt innan användning.
5. Kontrollera doppskorna före användning. Skadade eller utslitna doppskor skall bytas ut mot nya.

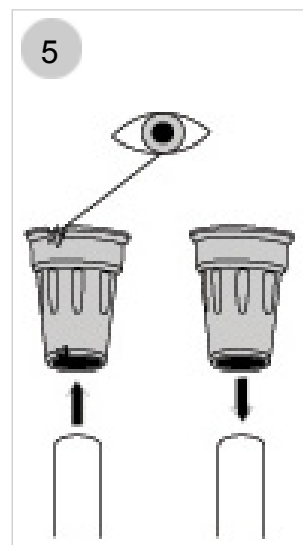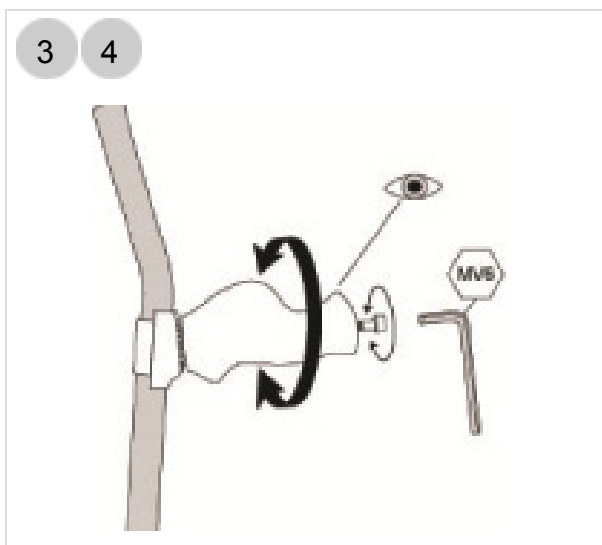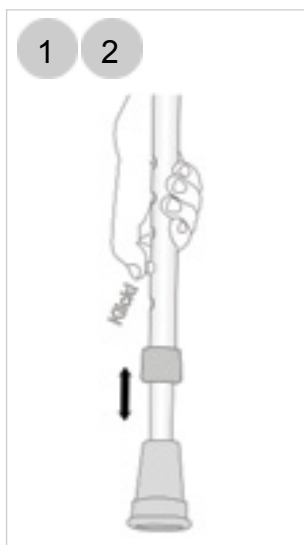

**Skötsel­anvisningar:** Rengörs regelbundet vid behov (min 1 ggr/månad) med tvållösning, pH 5-9. Vid byte av brukare skall produkten desinficeras, autoklaveras i max 85° i max 3 minuter. Alternativt torkas med 70% isopropanol.

**Återvinning:** Då produkten är uttjänt återvinns den som metallskrot trä- och plastavfall. Emballaget består av wellpapp och återvinns i enlighet med detta.

## Reservdelar:

Art. nr 120750, Doppsko  
Art. nr 12389001, Profilhandtag, höger  
Art. nr 12389004, Insexskruv MC6Sx40  
Art. nr 12389007, Låsbricka Stål AZ21  
Art. nr 12389012, Täcklock  
Art. nr 12390001, Profilhandtag vänster

## Tillbehör:

Art. nr 123300, Isdubb Spets  
Art. nr 123350, Isdubb Kronan  
Art. nr 124885, Kåpphållare Flex  
Art. nr 124889, Gummifot Stabil



Allvarliga händelser som inträffar under användande skall rapporteras till Swereco