

## STÖDKÄPP SILVER

Artikelnummer: 124201

### Säkerhetsanvisningar:

- Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Konsultera sjukvård innan användandet.
- Produkten skall tillskrivas brukaren av kompetent personal (t.ex. sjukgymnast eller annan personal med förskrivningsrätt) detta med hänseende till varje brukares särskilda behov.
- Stödkäppen får aldrig brukas för att t.ex. stoppa en hissdörr eller liknande.
- Stödfötterna bör kontrolleras regelbundet. Skadade eller utslitna doppskor kan innebära ett försämrat grepp.
- Skadade eller utslitna doppskor skall bytas ut mot nya, vilka kan beställas från Swereco.
- Om föremål (t.ex. papper, skräp etc.) fastnat under doppskon skall dessa genast tas bort, greppet kan försämrats.
- Vid halt underlag skall doppskon kompletteras med isdubb och stor försiktighet iakttagas.

**Avsedd användning:** Stödkäppen är endast avsedd att brukas som gångstöd för personer med nedsatt rörelsefunktion.

**Symboler:** Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen.



Kan tvättas med alkalisk tvällösning, ph 5-9.



Tvättas i max 85°C i max 3 minuter.



Visuell kontroll.



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.

### Teknisk specifikation

Höjd: Max 98 cm

Vikt: 0,29 kg

Material: Aluminiumrör, PP (handtag),  
Naturgummi (doppsko)

Tillverkad av:

**Swereco AB**

Vagnvägen 4

SE-364 42 Lenhovda


Tel: +46 (0)8 5000 5240

[www.swereco.com](http://www.swereco.com)

[info@swereco.com](mailto:info@swereco.com)

## Användning:

1. Vid justering av höjden måste stödkäppen kapas till rätt längd med bågfil eller rörkap. Detta skall göras av behörig fackman.
2. Kontrollera doppskorna före användning. Skadade eller utslitna doppskor skall bytas ut mot nya.

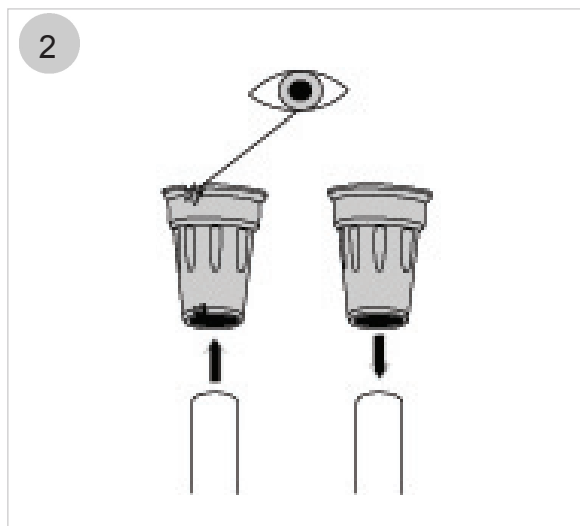

**Skötselansvisningar:** Rengörs regelbundet vid behov (min 1gr/månad) med tvällösning, ph 5-9. Vid byte av brukare skall produkten desinficeras, autoklaveras i max 85° i max 3 minuter. Alternativt torkas med 70% isopropanol.

**Återvinning:** Då produkten är uttjänt återvinns den som metallsrot och plastavfall. Emballaget består av wellpapp och återvinns i enlighet med detta.

### Tillbehör:

- Art. nr 123300, Isdubb Spets
- Art. nr 123350, Isdubb Kronan
- Art. nr 123360, Isdubb med 4 piggar
- Art. nr 124885, Käpphållare Flex
- Art. nr 124887, Handlovsrem

### Reservdelar:

- Art. nr 120750, Doppsko



Allvarliga händelser som inträffar under användande skall rapporteras till Swereco