

## STÖDKÄPP RESNÄTT, HOPFÄLLBAR

Artikelnummer: 124205

### Säkerhetsanvisningar:


- Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Konsultera sjukvård innan användandet.
- Produkten skall justeras in av kompetent personal (t.ex. sjukgymnast eller annan personal med förskrivningsrätt) för att anpassas till respektive brukares särskilda behov.
- Stödkäppen får aldrig brukas för att t.ex. stoppa en hissdörr eller liknande.
- Fastnar doppskon i underlaget skall stor försiktighet iakttagas, detta då käppen kan dela sig om man drar i den så pass hårt att stödkäppen går i sär.
- Doppskon bör kontrolleras regelbundet. Skadade eller utslitna doppskor kan innebära ett försämrat grepp.
- Skadade eller utslitna doppskor skall bytas ut mot nya, vilka kan beställas från Swereco.
- Om föremål (t.ex. papper, skräp etc.) fastnat under doppskon skall dessa genast tas bort, greppet kan försämrats.
- Vid halt underlag skall doppskon kompletteras med isdubb och stor försiktighet iakttagas.
- Vid tecken på att höjjusteringen glappar eller att produkten på annat sätt är utsliten bör produkten tas ur bruk.

**Avsedd användning:** Stödkäppen är endast avsedd att brukas som gångstöd för personer med nedsatt rörelsefunktion.

**Symboler:** Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen.



Kan tvättas med alkalisk tvällösning, pH 5-9.

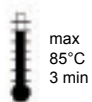

Tvättas i max 85°C i max 3 minuter.



Visuell kontroll.



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.

### Teknisk specifikation

Ställbar höjd: 87-97 cm  
Längd hopfälld: 30 cm  
Lägsta höjd kapad: 72 cm  
Vikt: 0,34 kg  
Material: Aluminiumrör, PP (handtag), naturgummi (doppskor)

Tillverkad av:

**Swereco AB**

Vagnvägen 4

SE-364 42 Lenhovda



Tel: +46 (0)8 5000 5240

[www.swereco.com](http://www.swereco.com)

[info@swereco.com](mailto:info@swereco.com)

## Användning:

1. Justera höjden för stödkäppen med hjälp av tryckknappen. Stödkäppens höjd skall anpassas efter den individuella brukaren.
2. Kontrollera tryckknappen för höjjusteringen regelbundet. Glappar tryckknappen måste användningen av stödkäppen genast avbrytas.
3. Stödkäppen kan även kapas till rätt längd med bågfil eller rörkap. Detta skall göras av behörig fackman. Kan max kapas 15 cm.
4. Kontrollera doppskorna före användning. Skadade eller utslitna doppskor skall bytas ut mot nya.

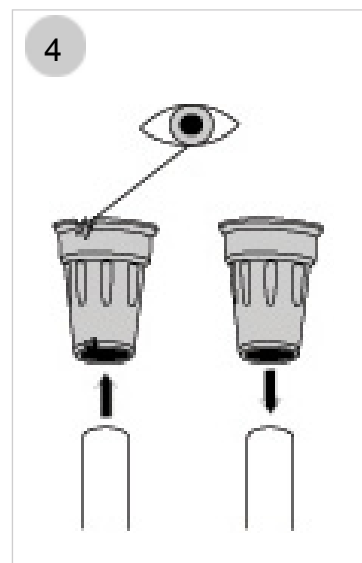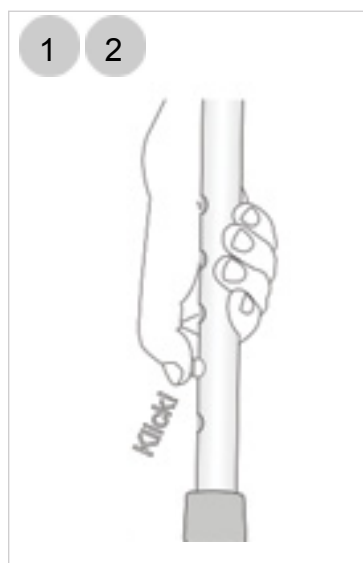

**Skötselanvisningar:** Rengörs regelbundet vid behov (min 1ggr/månad) med tvällösning, ph 5-9. Vid byte av brukare skall produkten desinficeras, autoklaveras i max 85° i max 3 minuter. Alternativt torkas med 70% isopropanol.

**Återvinning:** Då produkten är uttjänt återvinns den som metallskrot och plastavfall. Emballaget består av wellpapp och återvinns i enlighet med detta.

## Reservdelar:

Art. nr 120750, Doppsko

## Tillbehör:

Art. nr 123300, Isdubb Spets  
Art. nr 123350, Isdubb Kronan  
Art. nr 124885, Käpphållare Flex  
Art. nr 124889, Gummifot Stabil



Allvarliga händelser som inträffar under användande skall rapporteras till Swereco