






Kryckpolstring
Rörelsehjälpmedel • Tillbehör


Art nr: 124700

Kryckpolstring Mjuk självhäftande polstring för handtag och armbygel till kryckkäpp. Passar de flesta kryckkäppar med raka handtag. Längd kryckpolstring handtag 10 cm.



Benämning	Käpphållare Flex
Material	EVA, polyester jersey
Förvaring	Rumstemperatur
Återvinning	Brännbart avfall. Sorteras efter lokal anvisning.
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas av Swereco vid förfrågan

Symboler:	
	Produktens partinummer
	Produktens artikelnummer: 124700
	Produkten är CE-märkt i enlighet med Förordning EEG 93/42
	Konsultera bruksanvisning
	Tillverkare: Swereco AB Vagnvägen 4 364 42 Lenhovda

 SRN SE-MF-000033314

Användaranvisning

Kryckpolstringen har en självhäftande baksida. Rengör kryckans armbygel och handtag med hjälp av en mjuk trasa och en mild tvällösning ph 5-9, alternativt 70% isopropanol. Låt ytorna torka ordentligt innan polstringen appliceras.

Dra av skyddspappret från den självhäftande baksidan och fäst polstringen på kryckkäppen. Den triangulära delen fästs på insidan av kryckans armbygel och den rektangulära delen fästs på kryckans handtag. Säkerställ att polstringen fäster ordentligt, var noga med ytterkanterna så att polstringen inte lossnar alternativt fastnar i andra material.

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket. Produkten rekommenderas ej att rekonstrueras.

