

Käpphållare Flex
Rörelsehjälpmedel • Tillbehör

Art nr: 124885, 124885K

Käpphållare Flex är ett tillbehör till kryckor och käppar. Den är tillverkad av mjuk TPE med fjäderstål runt om vilket gör att den passar kryckrör med diameter 19-21 mm. Käpphållaren är enkel att montera och att använda. Hållaren placeras runt kryckans/käppens rör. Med käpphållarens krok kan käppen eller kryckan hängas över en kant, exempelvis en stolsrygg, ett dörrhandtag, eller ett bord. Käpphållaren är försedd med reflex.

Benämning	Käpphållare Flex	Käpphållare Flex konsumentförpackad
Art nr	124885	124885K
Färg	Svart	Svart
EAN	7331427248854	7331427000735
Passar till rördiameter	19-21 mm	
Vikt	10 g	
Material	TPE, stål	
Återvinning	Plast- och metallåtervinning, sorteras efter lokal anvisning	
Förvaring	Rumstemperatur	
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas av Swereco vid förfrågan	



Symboler:



Produktens artikelnummer:
142885, 124885K



Konsultera bruksanvisning



Produkten är CE-märkt i enlighet med
Förordning EEG 93/42



Tillverkare: Swereco AB
Vagnvägen 4
364 42 Lenhovda

Montering- och användaranvisning

- Öppna käpphållarens klämma och fäst den på röret
- Med hjälp av käpphållaren kan kryckan/käppen hängas på exempelvis en bordskant, stolsrygg eller dörrhandtag.

Produkten ska rengöras regelbundet och vid behov med tvållösning, pH 5-9. Produkten kan även torkas med 70% isopropanol. Produkten skall **EJ** rengöras med etanol. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.

Produkten rekommenderas ej att rekonditioneras.



SRN SE-MF-000033314

