

AXILLARKRYCKA

Artikelnummer: 126895, 126896

Säkerhetsanvisningar:

- Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Konsultera sjukvård innan användandet.
- Produkten skall justeras in av kompetent personal (t.ex. sjukgymnast eller annan personal med förskrivningsrätt) för att anpassas till respektive brukares särskilda behov.
- Kryckan får aldrig brukas för att t.ex. stoppa en hissdörr eller liknande.
- Doppskon bör kontrolleras regelbundet. Skadade eller utslitna doppskor kan innebära ett försämrat grepp.
- Skadade eller utslitna doppskor skall bytas ut mot nya, vilka kan beställas från Swereco.
- Om föremål (t.ex. papper, skräp etc.) fastnar under doppskon skall dessa genast tas bort, greppet kan försämrats.
- Vid halt underlag skall doppskon kompletteras med isdubb och stor försiktighet iakttagas.
- Kryckan bör ej brukas utan pauser under en längre tid då axlar och armhålor kan överbelastas.
- Vid tecken på att höjjusteringen glappar eller att produkten på annat sätt är utsliten bör produkten tas ur bruk och skickas in för service.
- Max brukarvikt 120 kg.

Avsedd användning: Axillarkryckan är endast avsedd att brukas som gångstöd för personer med nedsatt rörelsefunktion.

Symboler: Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen.



Max 120 kg

Max säker brukarvikt.



Kan tvättas med alkalisk tvållösning, pH 5-9.



Tvättas i max 85°C i max 3 minuter.



Visuell kontroll



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr 126895, 126896

Teknisk specifikation

Art nr: 126895

Axillarkrycka

Ställbar höjd:
114-134 cm

Vikt: 0,9 kg

Art nr: 126896


Axillarkrycka, lång

Ställbar höjd:
134-154 cm

Vikt: 0,9 kg


Material: Aluminium

Distribueras av:
Swereco AB
Vagnvägen 4
SE-364 42 Lenhovda
Tel: +46 (0)8 5000 5240
www.swereco.com
order@swereco.com

 Vermeiren Group
Vermeirenplein 1/15
B-2920 Kalmthout

Användning:

1. För höjdjustering av handtaget använd dig av en vingmutter så som bilden nedan visar.
2. För justering av höjden på kryckan tryck in knappen så som bilden visar och justera till önskad höjd.
3. Kontrollera stödfötterna före användning. Skadade eller utslitna stödfötter skall bytas ut mot nya.

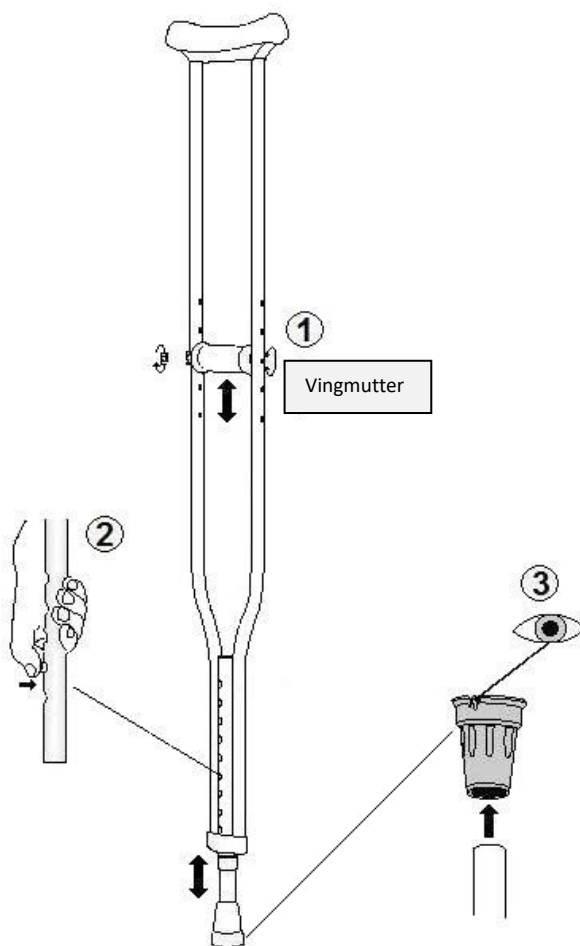

Skötselansvisningar: Rengörs regelbundet vid behov (min 1ggr/månad) med tvållösning, ph 5-9. Vid byte av brukare skall produkten desinficeras, autoklaveras i max 85° i max 3 minuter. Alternativt torkas med 70% isopropanol.

Skötselansvisningar: Då produkten är uttjänt återvinns den som metallskrot och plastavfall. Emballaget består av wellpapp och återvinns i enlighet med detta.

Tillbehör:

Art. nr 1719, Isdubb spets
Art. nr 1718, Isdubb kronan

Reservdelar:

Art. nr 120760, Doppsko
Art. nr 12689501, Handtag
Art. nr 12689502, Polstring