









Kryckkäpp Flex, mindre
Rörelsehjälpmedel • Kryckkäppar

Art nr: 126960, 126965

Kryckkäpp Flex, mindre är endast avsedd att brukas som gångstöd för personer med nedsatt rörelsefunktion.

Benämning	Kryckkäpp Flex mindre	
Art nr	126960	126965
Färg handtag	Grå	Blå
Ställbar höjd	58-80 cm	
Vikt	0,48 kg	
Maximal brukarvikt	100 kg	
Material	Aluminiumrör och PP Doppsko av naturgummi	
Teknisk livslängd	3 år vid normal användning, under förutsättning att regelbundna kontroller och service utförs	
Återvinning	Metallåtervinning och plastavfall alt brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning	
Teknisk livslängd	3 år vid normal användning	
Förvaring	Rumstemperatur	
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas av Swereco vid förfrågan	




Symboler:		Säkerhetsanvisning
	Produktens partinummer	<p>Produkten skall inte användas på annat sätt än vad som är avsett.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsultera sjukvård innan användande • Produkten ska justeras in av personal med relevant kompetens (ex fysioterapeut eller annan person med förskrivningsrätt) för att anpassas till respektive brukares särskilda behov. • Kryckkäppen får aldrig brukas för att ex stoppa en hissdörr eller liknande. • Doppskon ska kontrolleras regelbundet. Skadade eller utslitna doppskor ska bytas ut mot nya. Dessa beställs från Swereco. Skadade eller utslitna doppskor kan innebära försämrat grepp. • Om föremål, ex papper eller skräp, fastnat under doppskon skall detta genast tas bort så att inte greppet försämras. • Vid halt underlag ska doppskon kompletteras med isdubb och stor försiktighet iakttagas. • Vid tecken på att höjdjusteringen glappar eller att produkten på annat sätt är utsliten ska produkten tas ur bruk. Tre år efter produktionsdatum (anges som LOT nummer) bör kryckan kasseras. • Max brukarvikt 100 kg, gäller även vid användning av två kryckkäppar.
	Produktens utgångsdatum (3 års livslängd)	
	Produktens artikelnummer: 126960, 126965	
	Produkten är en medicinteknisk produkt	
	Produkten är CE-märkt i enlighet med Förordning (EU) 2017/745	
	Konsultera bruksanvisning	
	Tillverkare: Swereco AB Kistagången 20 B 16440 Kista	
		 SRN SE-MF-000033314

Kryckkäpp Flex, mindre
Rörelsehjälpmedel • Kryckkäppar

Art nr: 126960, 126965

Användaranvisning

- 1) Justera höjden för kryckkärpen med hjälp av tryckknappen. Kryckkärpens höjd ska anpassas efter den individuella brukaren.
- 2) Kontrollera tryckknappen för höjjusteringen regelbundet. Glappar tryckknappen ska måste användningen av kryckkärpen genast avbrytas.
- 3) Kontrollera kryckans doppsko för användning. Skadade eller utslitna doppskor ska bytas ut mot nya. Dessa beställs från Swereco.

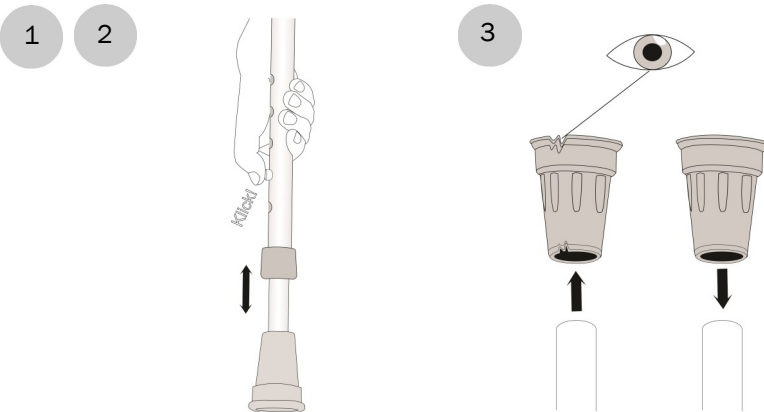

Produkten ska rengöras regelbundet och vid behov med tvållösning, pH 5-9.
Produkten kan även torkas med 70% isopropanol. Produkten skall **EJ** rengöras med etanol. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



Rekonditioneringsanvisning

Vid rekonditionering ska produkten kontrolleras och utslitna eller skadade delar ska bytas ut.
Kan desinficeras i avsedd utrustning i 85 °C i minst 3 minuter. Produkten skall rekonditioneras mellan varje brukare eller oftare vid behov.

Tillbehör

Art nr 123300, isdubb spets
Art nr 123350, isdubb kronan
Art nr 124700, kryckpolstring
Art nr 124885, kryckkärphållare Flex

Reservdelar

Art nr 120750, doppsko