

Rörelsehjälpmedel • Kryckkäppar

Art nr: 127000, 127004, 127005

Kryckkäpp Flex är endast avsedd att brukas som gångstöd för personer med nedsatt rörelsefunktion.

Benämning	Kryckkäpp Flex standard		
Art nr	127000	127004	127005
Färg handtag	Grå	Röd	Blå
Antal produkter/förpackning	1 st		
Material	Aluminiumrör och PP Doppsko av naturgummi		
Ställbar höjd	75-97 cm		
Vikt	0,48 kg		
Kasseras	Metallåtervinning och plastavfall alt brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning		
Livslängd	3 år vid normal användning		
Förvaring	Rumstemperatur		
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas av Swereco vid förfrågan		



Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Max: 140 kg

Max brukarvikt



Kan tvättas med alkalisk tvållösning, ph 5-9, alternativt 70% isopropanol



Tvättas i max 85°C i max 3 minuter.



Gör alltid en visuell kontroll innan användning



Innehåller Polypropen och Aluminium



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr 127000, 127004, 127005

Säkerhetsanvisning

Produkten skall inte användas på annat sätt än vad som är avsett.

- Konsultera sjukvård innan användande
- Produkten ska justeras in av personal med relevant kompetens (ex fysioterapeut eller annan person med förskrivningsrätt) för att anpassas till respektive brukares särskilda behov.
- Kryckkäppen får aldrig brukas för att ex stoppa en hissdörr eller liknande.
- Doppskon ska kontrolleras regelbundet. Skadade eller utslitna doppskor ska bytas ut mot nya. Dessa beställs från Swereco. Skadade eller utslitna doppskor kan innebära försämrat grepp.
- Om föremål, ex papper eller skräp, fastnat under doppskon skall detta genast tas bort så att inte greppet försämras.
- Vid halt underlag ska doppskon kompletteras med isdubb och stor försiktighet iakttagas.
- Vid tecken på att höjdjusteringen glappar eller att produkten på annat sätt är utsliten ska produkten tas ur bruk. Tre år efter produktionsdatum (anges som LOT nummer) bör kryckan kasseras.
- Max brukarvikt 140 kg, gäller även vid användning av två kryckkäppar.



Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.

EUDAMED



SRN SE-MF-000033314



Swereco AB
Vagnvägen 4
364 42 Lenhovda



Rörelsehjälpmedel • Kryckkäppar


Art nr: 127000, 127004, 127005

Kryckkäpp Flex är endast avsedd att brukas som gångstöd för personer med nedsatt rörelsefunktion.

Användaranvisning

Produkten skall inte användas på annat sätt än vad som är avsett.

- 1) Justera höjden för kryckkäppen med hjälp av tryckknappen. Kryckkäppens höjd ska anpassas efter den individuella brukaren.
- 2) Kontrollera tryckknappen för höjjusteringen regelbundet. Glappar tryckknappen ska måste användningen av kryckkäppen genast avbrytas.
- 3) Kontrollera kryckans doppsko för användning. Skadade eller utslitna doppskor ska bytas ut mot nya. Dessa beställs från Swereco.

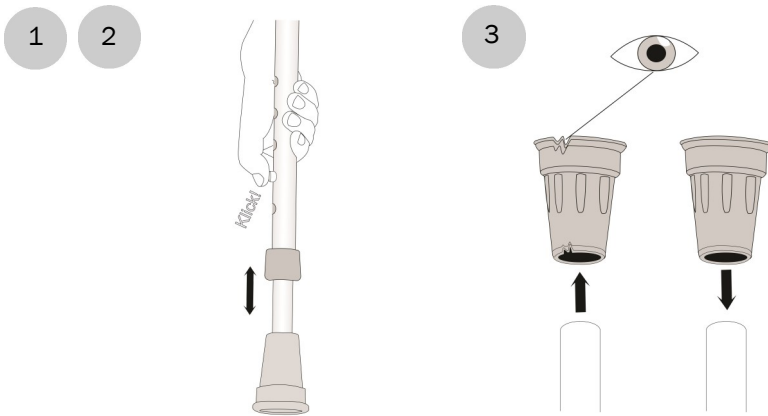

Tillbehör

Art nr 123300, isdubb spets
Art nr 123350, isdubb kronan
Art nr 124700, kryckpolstring
Art nr 124885, kryckkäpphållare Flex
Art nr 124889, gummifot stabil

Reservdelar

Art nr 120750, doppsko