

## KRYCKKÄPP FLEX, FAST LÄNGD

Artikelnummer: 127060

### Säkerhetsanvisningar:

- Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Konsultera sjukvård innan användandet.
- Produkten skall justeras in av kompetent personal (t.ex. sjukgymnast eller annan personal med förskrivningsrätt) för att anpassas till respektive brukares särskilda behov.
- Kryckkäppen får aldrig brukas för att t.ex. stoppa en hissdörr eller liknande.
- Doppskon bör kontrolleras regelbundet. Skadade eller utslitna doppskor kan innebära ett försämrat grepp.
- Skadade eller utslitna doppskor skall bytas ut mot nya, vilka kan beställas från Swereco.
- Om föremål (t.ex. papper, skräp etc.) fastnat under doppskon skall dessa genast tas bort, greppet kan försämrats.
- Vid halt underlag skall doppskon kompletteras med isdubb och stor försiktighet iakttas.
- Max brukarvikt 140 kg.(Max brukarvikt 140kg gäller även vid användning av två kryckkäppar.)

**Avsedd användning:** Kryckkäppen är endast avsedd att brukas som gångstöd för personer med nedsatt rörelsefunktion.

**Symboler:** Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen.



Max 140 kg

Max säker brukarvikt.



Kan tvättas med alkalisk tvållösning, pH 5-9.



Tvättas i max 85°C i max 3 minuter.



Visuell kontroll



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.

### Teknisk specifikation

Höjd: 105 cm

Vikt: 0,49 kg

Material: Aluminiumrör, PP (överdel), naturgummi (doppskor)

Tillverkad av:

**Swereco AB**

Vagnvägen 4

SE-364 42 Lenhovda


Tel: +46 (0)8 5000 5240

[www.swereco.com](http://www.swereco.com)

[info@swereco.com](mailto:info@swereco.com)

## Användning:

1. Vid justering av höjden måste kryckkåppen kapas till rätt längd med bågfil eller rörkap. Detta skall göras av behörig fackman.
2. Kontrollera stödfötterna före användning. Skadade eller utslitna stödfötter skall bytas ut mot nya.

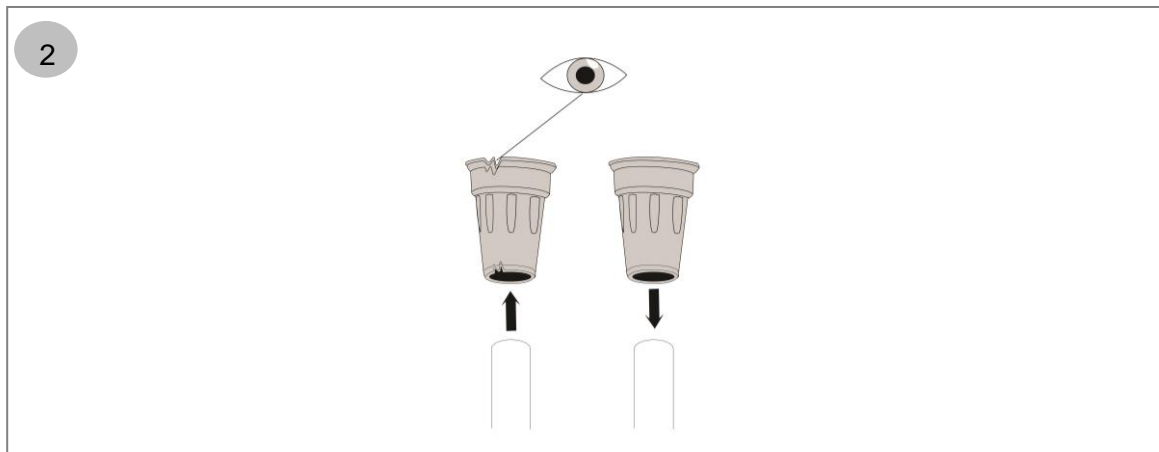

**Skötsel­anvisningar:** Rengörs regelbundet vid behov (min 1 ggr/månad) med tvållösning, ph 5-9. Vid byte av brukare skall produkten desinficeras, autoklaveras i max 85° i max 3 minuter. Alternativt torkas med 70% isopropanol.

**Återvinning:** Då produkten är uttjänt återvinns den som metallskrot och plastavfall. Emballaget består av wellpapp och återvinns i enlighet med detta.

## Tillbehör:

Art. nr 123300, Isdubb spets  
Art. nr 123350, Isdubb kronan  
Art. nr 124700, Kryckpolstring  
Art. nr 124885, Käpphållare FLEX

## Reservdelar:

Art. nr 120760, Doppsko

3127060



Allvarliga händelser som inträffar under användande skall rapporteras till Swereco