

KRYCKKÄPP FLEX ERGO, FAST LÄNGD

Artikelnummer: **127260, 127360, 127460, 127560, 127660**

Säkerhetsanvisningar:

- Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Konsultera sjukvård innan användandet.
- Produkten skall justeras in av kompetent personal (t.ex. sjukgymnast eller annan personal med förskrivningsrätt) för att anpassas till respektive brukares särskilda behov.
- Kryckkäppen får aldrig brukas för att t.ex. stoppa en hissdörr eller liknande.
- Doppskon bör kontrolleras regelbundet. Skadade eller utslitna doppskor kan innebära ett försämrat grepp.
- Skadade eller utslitna doppskor skall bytas ut mot nya, vilka kan beställas från Swereco.
- Om föremål (t.ex. papper, skräp etc.) fastnat under doppskon skall dessa genast tas bort, greppet kan försämrats.
- Vid halt underlag skall doppskon kompletteras med isdubb och stor försiktighet iakttagas.
- Max brukarvikt 140 kg (max brukarvikt 140kg gäller även vid användning av två kryckkäppar).

Avsedd användning: Kryckkäppen är endast avsedd att brukas som gångstöd för personer med nedsatt rörelsefunktion.

Teknisk specifikation

Art nr: 127260 Rak, mjuk Vikt: 0,64 kg	Art nr: 127360 Höger Vikt: 0,57kg	Art nr: 127460 Höger, mjuk Vikt: 0,64 kg	Art nr: 127560 Vänster Vikt: 0,57 kg	Art nr: 127660 Vänster, mjuk Vikt: 0,64 kg
Höjd: 105 cm Material: Aluminiumrör, PP (överdel), TPE (handtag, mjukt), PP (handtag, hårt)				

Symboler: Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen.



Max 140 kg

Max säker brukarvikt.



Kan tvättas med alkalisk tvållösning, ph 5-9.



Tvättas i max 85°C i max 3 minuter.

Visuell kontroll



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.

Tillverkad av:

Swereco AB

Vagnvägen 4

SE-364 42 Lenhovda



Tel: +46 (0)8 5000 5240

www.swereco.com

info@swereco.com

Användning:

1. Vid justering av höjden måste kryckkäppen kapas till rätt längd med bågfil eller rörkap. Detta skall göras av behörig fackman.
2. Justera handtaget. Anläggningsytan mot handtaget går att justera genom att vrida handtaget med 9 graders intervaller.
3. Kontrollera stödfötterna före användning. Skadade eller utslitna stödfötter skall bytas ut mot nya.

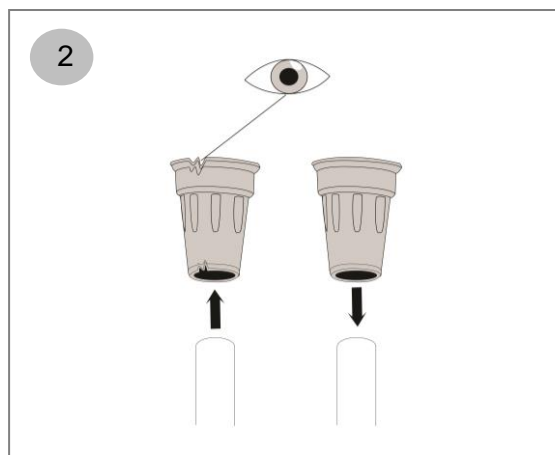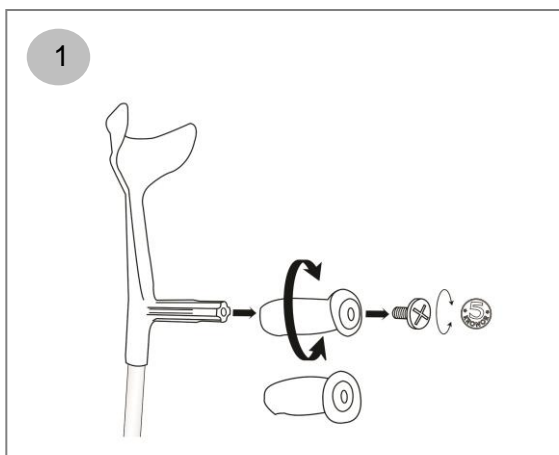

Skötselanvisningar: Rengörs regelbundet vid behov (min 1ggr/månad) med tvållösning, ph 5-9. Vid byte av brukare skall produkten desinficeras, autoklaveras i max 85° i max 3 minuter. Alternativt torkas med 70% isopropanol.

Återvinning: Då produkten är uttjänt återvinns den som metallskrot och plastavfall. Emballaget består av wellpapp och återvinns i enlighet med detta.

Tillbehör:

Art. nr 123300, Isdubb spets
Art. nr 123350, Isdubb kronan
Art. nr 124885, Käpphållare FLEX

Reservdelar:

Art. nr 120760, Doppsko
Art. nr 12720002, Handtag rakt, mjukt
Art. nr 12730002, Handtag höger, hårt
Art. nr 12730003, Kryckskruv
Art. nr 12740002, Handtag höger, mjukt
Art. nr 12750002, Handtag vänster, hårt
Art. nr 12760002, Handtag vänster, mjukt



Allvarliga händelser som inträffar under användande skall rapporteras till Swereco