

Strumppådragare

Hjälpmiddel i hemmet • Greppa & Nå • Övrigt

Art nr: 131300, 131300K

Swerecos Strumppådragare underlättar för dig som vill ta på strumporna utan att behöva böja ryggen. Klädnypan håller strumpan på plats och med hjälp av bandet dras strumpan enkelt på.

För kompressionsstrumpor rekommenderas strumppådragare Benjamin.



Benämning	Swerecos Strumppådragare	
Art nr	131300	131300K
Specifikation	Plastpåse	Konsumentförpackning
Antal produkter/förpackning	1 st	1 st
Material	Polyetenplast Polyesterband	
Ställbar höjd	75-97 cm	
Mått	B 22 cm x L 25 cm	
Kasseras	Plastavfall alt brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning	
Rengöring	Regelbunden rengöring med mildt rengöringsmedel och mjuk trasa alt 70% isopropanol	
Förvaring	Rumstemperatur	
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas av Swereco vid förfrågan	



Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Kan tvättas med alkalisk tvållösning, pH 5-9 alt 70% isopropanol



Gör alltid en visuell kontroll innan användning



Innehåller Polypropen



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr 131300, 131300K

Användaranvisning

- Se till att den blanka sidan av strumppådragaren är mot strumpan.
- Böj ihop produkten och dra strumpan upp över flänsarna (vid behov fäst med klädnypan).
- Sitt ordentligt på en stol med ryggstöd eller på sängen med väggen bakom dig och stick in foten och dra försiktigt i banden mot dig.



Produkten skall endast användas för avsett ändamål. Produkten skall regelbundet kontrolleras och en defekt produkt skall kasseras. Gör regelbundna kontroller av dragbanden. Ett trasigt dragband kan medföra risk vid användning. Placeras ej i närheten av öppen eld eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren.



SRN SE-MF-000033314



Swereco AB
Vagnvägen 4
364 42 Lenhovda

