

DUSCHBORD STÖDBEN TILL DUSCHBORD

Artikelnummer: **141000, 141050, 141060,**
141065, 141070, 141080

Säkerhetsanvisningar:

- Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Duschbordet skall endast användas för att duscha liggande personer.
- Duschbordet skall monteras i väggen ovanför ett badkar alternativt en golvbrunn.
- Installationen skall göras av behörig fackman detta då det är av yttersta vikt att bordet sitter stadigt i väggen.
- Produkten levereras utan ben, varför den måste kompletteras med ben för att stödja mot badkar eller golv.
- Innan användning kontrollera att stödbenen vilar stadigt mot badkarskant/golv innan brukaren lägger sig på bordet.
- Används stödben mot golv kontrollera stödfötterna regelbundet. Skadade eller utslitna stödfötter kan ge skador på golv samt göra bordet instabilt.
- Skadade eller utslitna stödfötter skall bytas ut mot nya, vilka kan beställas från Swereco.
- Kontrollera regelbundet att clipsen som håller bordet i uppfällt läge mot väggen inte är utslitna.
- Max brukarvikt 100 kg.
- Allvarliga händelser som inträffar under användande skall rapporteras till Swereco

Avsedd användning: Swerecos Dusch- och skötbord används för att underlätta vid tvaqning.

Teknisk specifikation

| Art nr: 141000 | Art nr: 141050 | Art nr: 141060 | Art nr: 141065 | Art nr: 141070 | Art nr: 141080 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|--|
| Duschbord 140 cm, exklusive ben | Duschbord 157 cm, exklusive ben | Duschbord Specialmått, exklusive ben | Stöben i specialmått, par | Stödben mot badkar, par | Stödben Mot golv, par |
| Bredd: 60 cm Längd: 140 cm | Bredd: 60 cm Längd: 157 cm | Max bredd:70 cm | Längd: utifrån önskade specialmått | Benlängd, beräknad från badkarskant: 40 cm Arbets höjd: ca 92 cm Vikt: 0,7 kg | Benlängd/ Arbets höjd, beräknad från golv: ca 92 cm Vikt: 1,3 kg |
| Arbets höjd: 92 cm | Arbets höjd: 92 cm | | | | |
| Vikt: 5,5 kg | Vikt: 6,0 kg | | | | |

Material: Tvättbart nylontyg (klädsel), (stativ)

Återvinning: Då produkten är uttjänt återvinns den som metallskrot och plastavfall. Emballaget består av wellpapp och återvinns i enlighet med detta.

Symboler: Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen.



Max säker brukarvikt.

Max 100 kg



Kan tvättas med alkalisk tvållösning, pH 5-9.



Visuell kontroll



Tvättas i max 85°C i max 3 minuter.




Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.

Tillverkad av:
Swereco AB
Vagnvägen 4
SE-364 42 Lenhovda
Tel: +46 (0)8 5000 5240
www.swereco.com
info@swereco.com

Användning:

1. Montera fast stativet i väggen, 92 cm ovanför golvet/ 40 cm ovanför badkarskant, 7,5 cm från väggytan, se bild. Detta skall göras av behörig fackman. (Håldiameter 9mm, avstånd mellan hål 75 mm)
2. Montera fast benen till stativet, 40 cm från mitten på vardera sida, se bild.
3. Spänn fast duken i stativet så som bilden visar.
4. Efter montering kan bordet fällas upp mot väggen med hjälp av clips och tar därigenom liten plats då det ej används.
5. Vid användning, fäll ned stödbenen mot badkarskanten/golvet och kontrollera att bordet står stadigt före användning.
6. Används stödben som går mot golvet kontrollera stödfötterna regelbundet. Skadade eller utslitna stödfötter skall bytas ut mot nya.

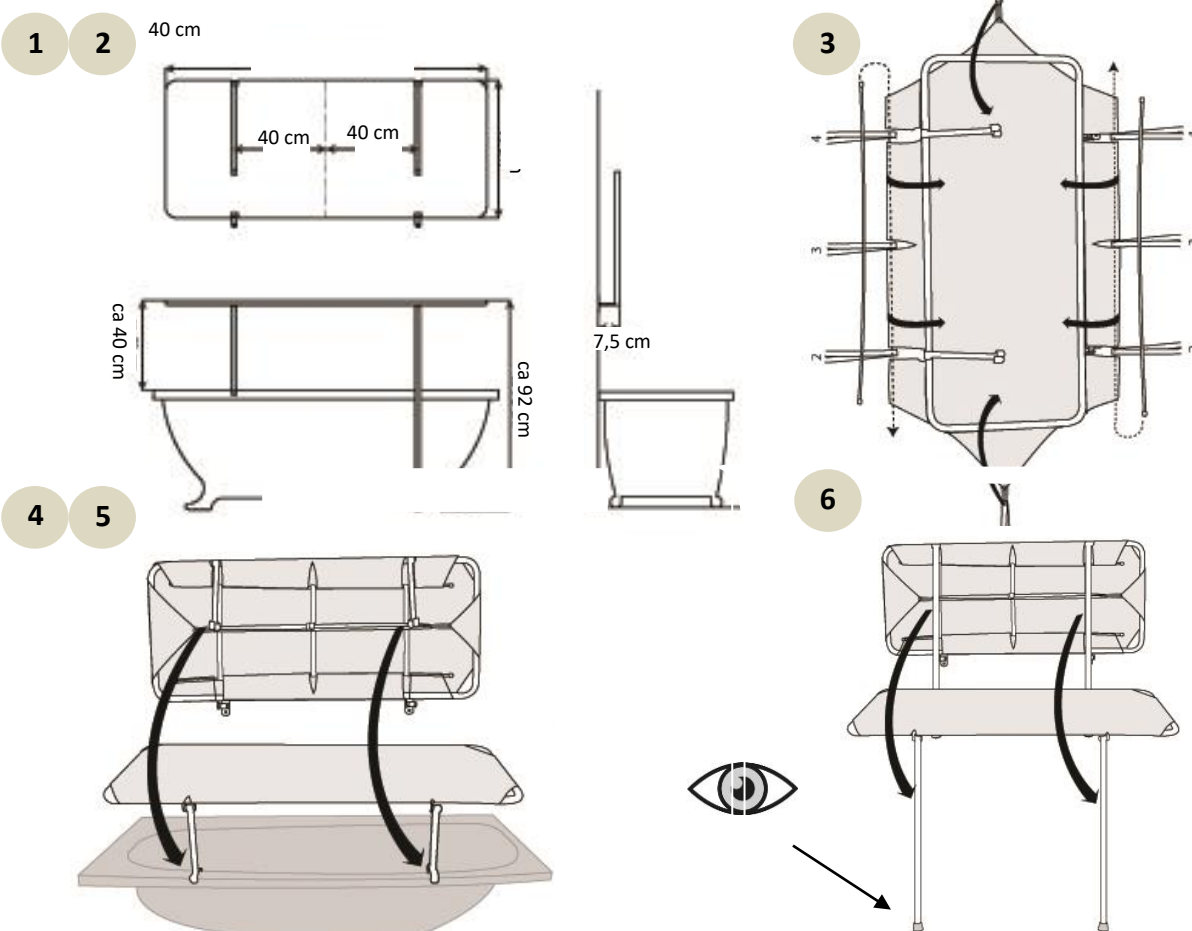

Skötselansvisningar: Rengörs regelbundet vid behov (min 1ggr/månad) med tvällösning, ph 5-9. Vid byte av brukare skall produkten desinficeras, autoklaveras i max 85° i max 3 minuter. Alternativt torkas med 70% isopropanol.

Reservdelar:

Art. nr: 120706, Stödfot
 Art. nr: 14100008, Plastbusning
 Art. nr: 14100009, Bult M6x14
 Art. nr: 14100010, Bricka 6x22
 Art. nr: 14100011, Fjäderklämma

Art. nr: 14100016, Kort band L=1000 (3st)
 Art. nr: 14100017, Långt band L= 2750 (1st)
 Art. nr: 14100013-S, Rör till duschtyg 1200mm
 Art. nr: 14100025-S, Väggfästen par