

DUSCHPALL KULAN, STÄLLBAR Artikelnummer: 141630, 141631, 141623

Säkerhetsanvisningar:

- Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Pallen är ej avsedd för att brukas i badkar.
- Pallen skall placeras på en plan yta där pallens alla fyra ben står stadigt mot golvet.
- Pallen får ej vinklas upp i sådant läge att den endast står på två ben då brukaren sitter på den. Detta då den maximala brukarvikten är beräknad med alla fyra ben i golvet.
- Pallen får ej förflyttas med brukaren sittandes på den.
- Stödfötterna bör kontrolleras regelbundet. Skadade eller utslitna stödfötter kan innebära ett försämrat grepp.
- Skadade eller utslitna stödfötter skall bytas ut mot nya stödfötter, vilka kan beställas från Swereco.
- Innan användning säkerställ att clipset för höjdjustering sitter ordentligt intryckt.
- Vid byte av clips säkerställ att det är rätt modell (olika storlekar finns).
- Vid tecken på att höjdjusteringen glappar eller att produkten på annat sätt är utsliten bör produkten tas ur bruk och skickas in för service.
- Max brukarvikt 150 kg.

Avsedd användning: Pallen är avsedd att sitta på när man duschar.

Symboler: Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen.

Max 150 kg
Max säker brukarvikt.



Kan tvättas med alkalisk tvållösning, pH 5-9.



Tvättas i max 85°C i max 3 minuter.



Visuell kontroll



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.

Teknisk specifikation

Art nr: 141630

Vanlig sits

Vikt: 3,2 kg

Art nr: 141631

Intimsits

Vikt: 3,2 kg

Art nr: 141623

Låg

Vikt: 2,4 kg

Sitsens djup: 40 cm

Sitsens bredd: 43 cm

Höjd: 45-55 cm, Art nr:141623 höjd 20 cm

Material: Stålrör (ben), PE (sits), TPE (stödfötter)



Allvarliga händelser som inträffar under användning skall rapporteras till Swereco AB.

Tillverkad av:

Swereco AB

Vagnvägen 4

SE-364 42 Lenhovda


Tel: +46 (0)8 5000 5240

www.swereco.com

info@swereco.com

Användning:

1. För justering av höjden. Tryck loss clipset från benet, justera till rätt höjd och tryck sedan dit clipset igen. Kontrollera att clipset är ordentligt intryckt före användning. Ersätts ett gammalt clips med nytt kontrollera att det är rätt storlek (finns i flera storlekar).
2. Kontrollera stödfötterna före användning. Skadade eller utslitna stödfötter skall bytas ut mot nya.

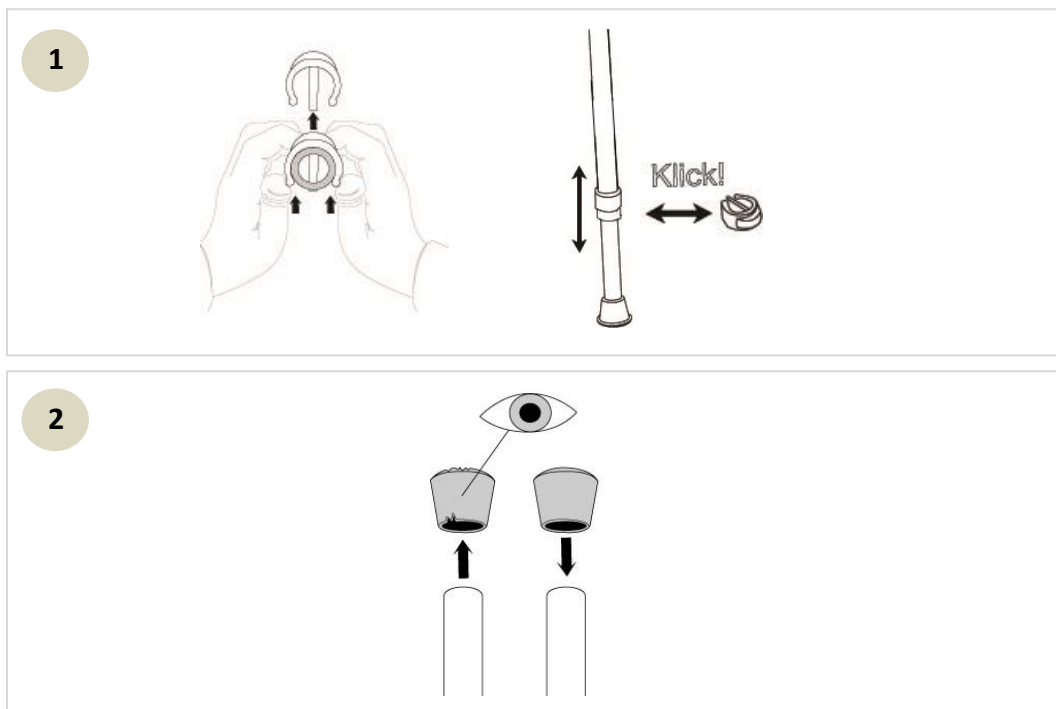

Skötselansvisningar: Rengörs regelbundet vid behov (min 1 ggr/månad) med tvållösning, ph 5-9. Vid byte av brukare skall produkten desinficeras, autoklaveras i max 85° i max 3 minuter. Alternativt torkas med 70% isopropanol.



Sitsen är enkel att avlägsna vid rengöring.

Reservdelar: Art. nr 120690, Stödfot

Återvinning: Då produkten är uttjänt återvinns den som metallskrot och plastavfall. Emballaget består av wellpapp och återvinns i enlighet med detta.