

DUSCHSTOL REKO MJUKIS, STÄLLBAR

Artikelnummer: 142005, 141990

Avsedd användning: Duschstol Reko Mjukis är avsedd att sitta på vid duschning. Stolen har en stabil helsvetsad konstruktion och har armstöd som underlättar uppresning. Sitsen är mjuk och värmeisolerande. Ryggstöd finns som tillbehör och beställs separat från Swereco.



142005



Säkerhetsanvisningar:

- Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Stolen är ej avsedd för att brukas i badkar.
- Stolen skall placeras på en plan yta där stolens alla fyra ben står stadigt mot golvet.
- Stolen får ej vinklas upp i sådant läge att den endast står på två ben då brukaren sitter i den. Detta då den maximala brukarvikten är beräknad med alla fyra ben i golvet.
- Stolen får ej förflyttas med brukaren sittandes i den.
- Stödfötterna bör kontrolleras regelbundet. Skadade eller utslitna stödfötter kan innebära ett försämrat grepp och ska bytas ut. Dessa kan beställas från Swereco.
- Om stolen ställs in i ett svagt framåtlutande läge är maximal höjdskillnad mellan fram och bakben 2,5 cm, vilket motsvaras av ett snäpp på beninställningen.
- Innan användning, säkerställ att clipset för höjjustering sitter ordentligt intryckt.
- Vid byte av clips, säkerställ att det är rätt modell, 25 mm (olika storlekar finns).
- Vid tecken på att höjjusteringen glappar eller att produkten på annat sätt är utsliten bör produkten tas ur bruk och skickas in för service.
- Vid användning av ryggstöd, se till att ryggstödet är monterat enligt anvisning.

Symboler: Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen.



Max brukarvikt



Kan tvättas med alkalisk tvällösning, pH 5-9.



Tvättas i max 85°C i max 3 minuter.



Visuell kontroll



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Teknisk specifikation

Art nr: 142005
Vuxen

Art nr: 141990
Barn

Sits djup: 34 cm
Sits bredd: 47 cm
Vikt: 4,9 kg
Höjd: 45-55 cm
Material: Stålrör,
polyuretan (sits), TPE
(stödfötter)

Sits djup: 22 cm
Sits bredd: 38 cm
Vikt: 3,4 kg
Höjd: 35-45 cm
Material: Stålrör,
polyuretan (sits), TPE
(stödfötter)



Max 150 kg



Max 70 kg

Tillverkad av:

Swereco AB

Vagnvägen 4

SE-364 42 Lenhovda




Tel: +46 (0)8 5000 5240

www.swereco.com

info@swereco.com

Användning:


1. För justering av höjden; tryck loss clipset från benet, justera till rätt höjd och tryck sedan dit clipset igen. Kontrollera att clipset är ordentligt intryckt före användning. Om ett gammalt clips ersätts med ett nytt, kontrollera att det är rätt storlek, 25 mm.
2. Kontrollera stödfötterna före användning. Skadade/utslitna stödfötter skall bytas ut mot nya.
3. Om duschstolen ställs in i ett svagt framåtlutande läge får skillnaden i höjd mellan de främre och bakre benen max uppgå till 2,5 cm, vilket motsvaras av ett snäpp på höjdställningen.

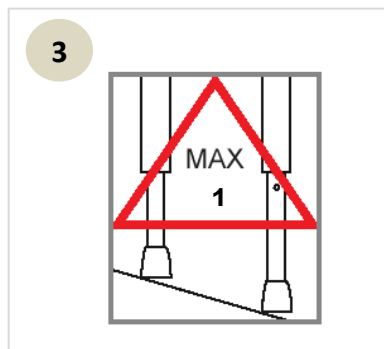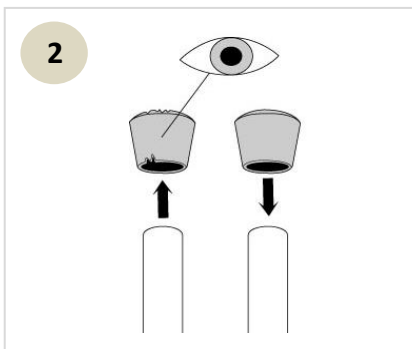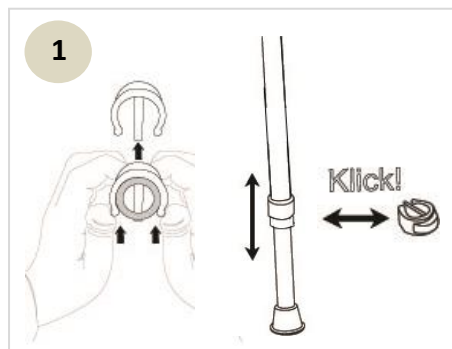

Skötselansvisningar: Rengör regelbundet vid behov (min 1ggr/månad) med tvållösning, pH 5-9. Vid byte av brukare skall produkten desinficeras, autoklaveras i max 85° i max 3 minuter. Alternativt torkas med 70% isopropanol.

Tillbehör:

Art. nr 142050, Ryggstöd till 142050 vuxen
Art. nr 141995, Ryggstöd till 141990 barn

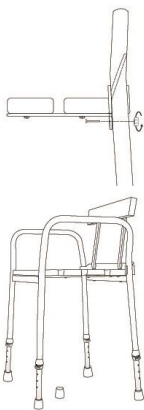

Montering av Ryggstöd:

Placera ryggstödet på stolen så att det kilas fast och att hålen i ryggstödet ligger i linje med hålen i stolen.

Sätt fast ryggstödet med skruv och mutter enligt bilden.

Reservdelar:

Art. nr 120695, Stödfot
Art. nr 14420213, Clips 25 mm
Art. nr 14211305, Clipshållare
Art. nr 14200004, Ribba (till 142005)
Art. nr 14199005, Ribba (till 141990)
Art. nr 14200005, Skruv till ribba (1 st)
Art. nr 14205025-S, Skrupåse (skruvar och muttrar till ryggstöd)



142005 + 142050

Återvinning:

Då produkten är uttjänt återvinns den som metallskrot och plastavfall. Emballaget består av wellpapp och återvinns i enlighet med detta.



Alla allvarliga händelser som inträffar under användning skall rapporteras till Swereco AB.

3142005