

DUSCHSTOL KULAN

Artikelnummer: 142113, 142114, 142117, 142118
142137

Säkerhetsanvisningar:

- Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Stolen är ej avsedd för att brukas i badkar.
- Stolen skall placeras på en plan yta där stolens alla fyra ben står stadigt mot golvet.
- Stolen får ej vinklas upp i sådant läge att den endast står på två ben då brukaren sitter i den. Den maximala brukarvikten är beräknad med stolens fyra ben i golvet.
- Stolen får ej förflyttas med brukaren sittandes i den.
- Stolen får snedställas max 2,5 cm (ett snäpp).
- Stödfötterna bör kontrolleras regelbundet. Skadade eller utslitna stödfötter kan innebära ett försämrat grepp.
- Innan användning säkerställ att clipset för höjdjustering sitter ordentligt intryckt. Clipsets öppning ska vara riktade mot stolens insida.
- Vid byte av clips säkerställ att det är rätt modell (olika storlekar finns).
- Vid tecken på att höjdjusteringen glappar eller att produkten på annat sätt är utsliten bör produkten tas ur bruk och skickas in för service.
- Max brukarvikt 150 kg med hård rygg, 130 kg med mjuk rygg.



Art nr **142113** Duschstol Kulan, hel sits
 Art nr **142114** Duschstol Kulan, intimsits
 Art nr **142117** Duschstol Kulan, hel sits,
 med hårt ryggstöd
 Art nr **142118** Duschstol Kulan, intimsits,
 med hårt ryggstöd
 Art nr **142137** Duschstol Kulan, låg,
 hel sits, med hårt ryggstöd

Avsedd användning: Duschstol Kulan är avsedd att brukas som hjälpmedel vid duschning och tvagning för personer med nedsatt rörelsefunktion. Stolen är gjord för att brukas i våtutrymme.



Max säker brukarvikt
150 kg / 130 kg med
mjukrygg



Kan tvättas med alkalisk
tvållösning, pH 5-9



Tvättas i max 85°C i max
3 minuter



Visuell inspektion



Produkten följer (EU) MDR
2017/745 och 2007/47/EG
för medicintekniska
produkter.




Teknisk specifikation

Sits djup: 40 cm
 Sits bredd: 43 cm
 Bredd mellan armstöd: 52 cm
 Höjd armstöd från sits: 17 cm
 Vikt: 4,44 kg
 Höjd: 46-56 cm
 Höjd låg modell: 35-45 cm
 Material: Stålrör, PE (sits), TPE
 (stödfötter)

Tillverkad av:
 SE-364 42 Lenhovda
 Tel: +46 (0)8 5000 5240
www.swereco.com
info@swereco.com

Användning:

1. För justering av höjden. Tryck loss clipset från benet, justera till rätt höjd och tryck sedan dit clipset igen. Kontrollera att clipset är ordentligt intryckt före användning. Ersätts ett gammalt clips med nytt kontrollera att det är rätt storlek (finns i flera storlekar).
2. Kontrollera stödfötterna före användning. Skadade eller utslitna stödfötter skall bytas ut.
3. Ryggen ska skjutas på rören 6 cm, till stoppet. Var nog med att hålla ryggen vågrät.
4. Stolen får snedställas max 2,5 cm vilket motsvarar ett snäpp i höjdställningen.

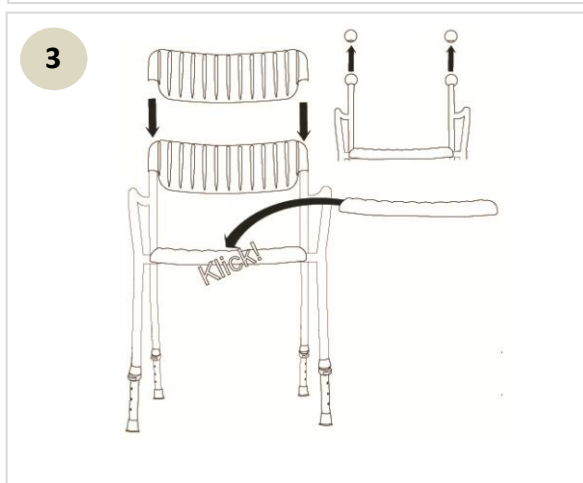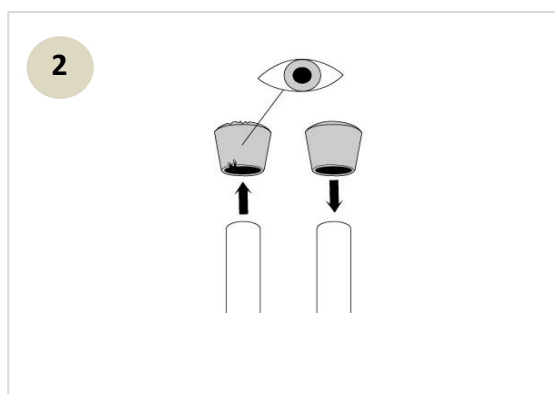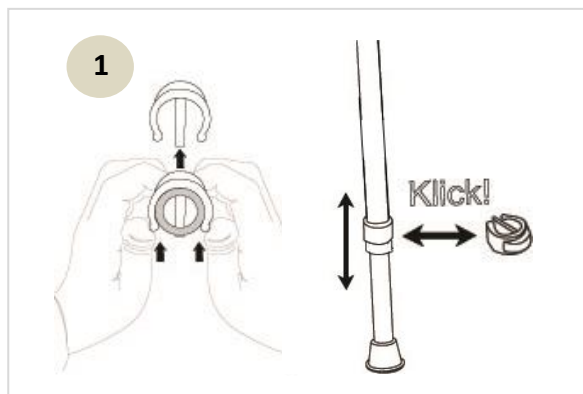

Alla allvarliga händelser som inträffar under användning skall rapporteras till Swereco AB.

Skötselanvisningar:

Rengörs regelbundet vid behov (min 1 ggr/månad) med tvållösning, pH 5-9. Vid byte av brukare skall produkten desinficeras, autoklaveras i max 85° i max 3 minuter. Alternativt torkas med 70% isopropanol.

Återvinning:

Då produkten är uttjänt återvinns den som metallskrot och plastavfall. Emballaget består av wellpapp och återvinns i enlighet med detta.

Tillbehör:

Art nr 142120 Ryggstöd
 Art nr 142125 Mjukrygg
 Art nr 142128 Sits
 Art nr 142129 Sits intim

Reservdelar:

Art nr 120690 Stödfot 18 mm
 Art nr 120705 Kula/Handtag 22 mm
 Art nr 14420213 Clips 25 mm
 Art nr 142111305 Clipshållare
 Art nr 14211320-S Förlängarpåse 350 mm
 (4 ben inkl clips)
 Art nr 14211313-S Ben med ställbar fot