

Duschstol Kulan
Hjälpmedel i hemmet • Toalettbesök • Toaförhöjningar

Art nr: 142113, 142114, 142117,
142118, 142137

Duschstol Kulan är en duschstol som är avsedd att brukas som hjälpmedel vid duschning och tvagning för personer med nedsatt rörelsefunktion. Stolen är gjord för att brukas i våtutrymme.

Benämning	Duschstol Kulan	
Art nr	142113, 142114, 142117, 142118	142137
Sitthöjd	46-56 cm	46-56 cm
Bredd mellan armstöd	52 cm	52 cm
Sits djup	40 cm	40 cm
Sits bredd	43 cm	43 cm
Höjd armstöd	17 cm	17 cm
Vikt	4,44 kg	
Antal produkter/ förpackning	1 st	
Material	Pulverlackerat stål, PE (sits), TPE (stödfötter)	
Kasseras	Metallåtervinning alt brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning	
Förvaring	Rumstemperatur	
Teknisk livslängd	5 år under förutsättning att regelbundna kontroller och service utförs	
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.	

Säkerhetsanvisning

- Produkten skall ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Stolen är ej avsedd att brukas i badkar
- Stolen skall placeras så att stolens fyra ben står stadigt mot golvet.
- Stolen får ej vinklas i sådant läge att stolen endast står på två ben då brukaren sitter på den. Den maximala brukarvikten är beräknad med stolens fyra ben i golvet.
- Stolen får ej förflyttas med brukaren sittandes på den.
- Stolen skall belastas jämnt på båda sidor för att minimera tipprisk.
- Stolen får snedställas max 2,5 cm (ett hål i höjinställningen).
- Stödfötterna ska kontrolleras regelbundet. Skadade eller slitna stödfötter kan innebära försämrat grepp och ska bytas ut mot nya.
- Innan användning, säkerställ att clipset för höjjusteringen sitter ordentligt intryckt.
- Vid byte av clips, säkerställ att det är rätt modell (flera storlekar finns).
- Vid tecken på att höjjusteringen glappar eller att produkten på annat sätt är utsliten ska den tas ur bruk och skickas in för service.
- Maximal brukarvikt är 150 kg med hård rygg, 130 kg med mjuk rygg.

Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Max: 150kg/
130 kg

Max brukarvikt



Kan tvättas med alkalisk
tvållösning, pH 5-9, alt 70%
isopropanol



Tvättas i max 85°C i max 3
minuter.



Gör alltid en visuell kontroll
innan användning



Innehåller stål och poly-
propylen



Produkten följer (EU) MDR
2017/745 och 2007/47/
EG för medicintekniska
produkter.



Art nr 142113, 142114,
142117, 142118, 142137



SRN SE-MF-000033314



Alla allvarliga händelser som inträffar under
användning skall rapporteras till Swereco AB.



Swereco AB
Vagnvägen 4
364 42 Lenhovda




Duschstol Kulan

Hjälpmedel i hemmet • Toalettbesök • Toaförhöjningar

Art nr: 142113, 142114, 142117,
142118, 142137

Användaranvisning

1. För justering av höjden, tryck loss clipset från benet, justera till rätt höjd och tryck sedan dit clipset igen. Kontrollera att clipset är ordentligt intryckt före användning. Ersätts ett gammalt clips med ett nytt, kontrollera att det är rätt storlek (flera finns).
2. Kontrollera stödfötterna före användning. Skadade eller utslitna stödfötter skall bytas ut.
3. Ryggen ska skjutas på rören 6 cm, till stoppet. Var noga med att hålla ryggen vågrät.
4. Stolen får snedställas max 2,5 cm vilket motsvarar ett hål i höjdinställningen.

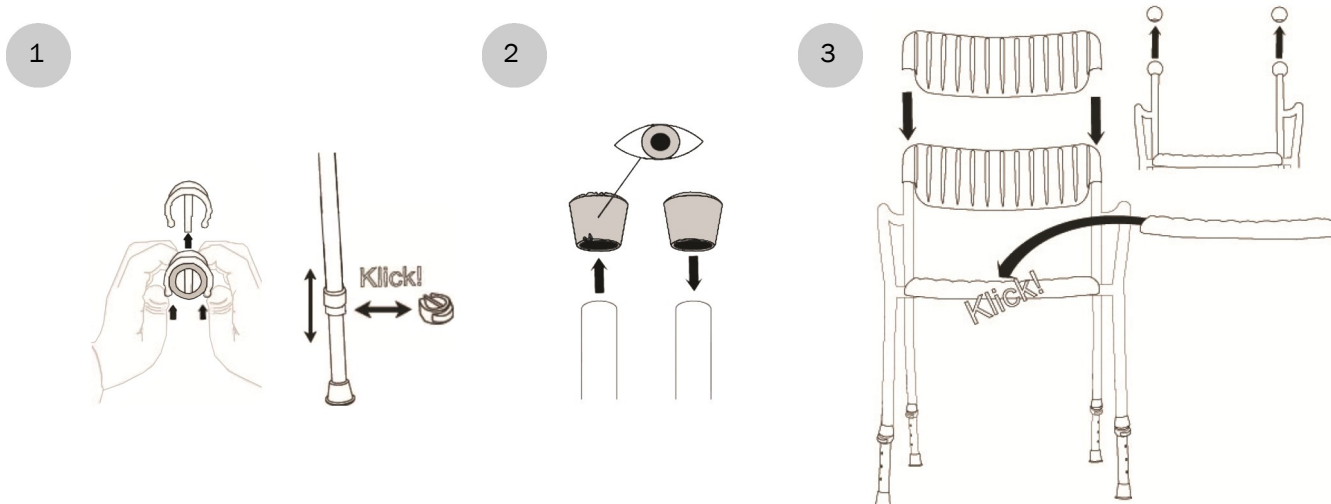

Tillbehör:

Art nr 142120 ryggstöd
Art nr 142125 mjukrygg
Art nr 142128 sits
Art nr 142129 intimsits
Art nr 142121 mjuksits hel sits
Art nr 142122 mjuksits intimsits

Reservdelar:

Art nr 120690 stödfot 18 mm
Art nr 120705 kula/handtag 22 mm
Art nr 14420213 clips
Art nr 142111305 clipshållare
Art nr 14211320-S förlängarpåse 350 mm (4 ben inkl clips)
Art nr 14211313-S ben med ställbar fot

Art nr **142113** Duschstol Kulan, hel sits
Art nr **142114** Duschstol Kulan, intimsits
Art nr **142117** Duschstol Kulan, hel sits,
med hårt ryggstöd
Art nr **142118** Duschstol Kulan, intimsits,
med hårt ryggstöd
Art nr **142137** Duschstol Kulan, låg,
hel sits, med hårt ryggstöd

Skötselanvisning:

Rengörs regelbundet vid behov med tvällösning pH 5-9. Vid byte av användare skall produkten desinficeras, antingen i maskin avsedd för ändamålet i max 85° i max 3 minuter, alternativt torkas med isopropanol ≤70%.