

STÖDHANDTAG 30 CM, 40 CM, 60 CM, 90 CM SUPPORT HANDLE 30 CM, 40 CM, 60 CM, 90 CM

Artikelnummer / Article number: 142520, 142525, 142530, 142534

Avsedd användning / Instructions for Use

Stödhandtaget skruvas fast i vägg för att ge stöd vid uppresning från t ex badkar eller toalett.

The support handle is fixed in a wall for support when rising from bath tub or toilet seat.

Säkerhetsanvisning / Safety Instructions

Handtaget skall monteras av behörig fackman. Var noga med att stödhandtaget sitter fast ordentligt i väggen. Väggen samt infästningen av handtaget sätter begränsningen i brukarvikt.

The support handle shall be installed by a licensed professional. Make sure the handle is securely fastened in the wall. The wall and the installation set the limit for user weight.

Återvinning / Recycling

Då produkten är uttjänt återvinns den som metallskrot. Emballaget består av wellpapp och återvinns i enlighet med detta.

When the product is used up, it is recycled as scrap metal. The packaging consists of plastic and/or corrugated cardboard and is recycled accordingly.

Teknisk specification / Technical Specification

art nr 142520 30 cm diameter: 2,5 cm vikt/weight: 0,35 kg	art nr 142520 40 cm diameter: 2,5 cm vikt/weight: 0,43 kg	art nr 142520 60 cm diameter: 2,5 cm vikt/weight: 0,56 kg	art nr 142520 90 cm diameter: 2,5 cm vikt/weight: 0,78 kg
--------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

Material: stål / steel

Skötselanvisning / Care Instructions

Handtaget kan autoklaveras max 3 min i 85°C. Tvättas med tvållösning alkali ph 5-9.

The handle can be washed in 85°C for max 3 minutes. Can be washed with soap alkali ph 5-9.



Soap solution
alkali pH 5-9



Max 85°C



MDR
2017/745
2007/47/EG



Installation:

Fästplattor med tre hål för
fixering i vägg.
Avstånd handtag-vägg 9 cm.

Plates with 3 pre-drilled
holes for fixation to the wall.
Distance grab bar-wall: 9 cm.

Tillverkas av / Manufactured by:

Swereco AB

Vagnvägen 4

SE-364 42 Lenhovda

SWEDEN

Tel: +46 (0)8 5000 5240

www.swereco.com

info@swereco.com