

## BADSTOL KULAN

Artikelnummer: **142580, 142581**

### Säkerhetsanvisningar:

- Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Innan användning försäkra att stolen sitter stadigt.
- Stolen får ej förflyttas med brukaren sittandes i den.
- Kontrollera stödfötterna regelbundet. Skadade eller utslitna stödfötter ökar risken för att stolen förlorar sitt fäste vilket kan göra stolen instabil.
- Skadade eller utslitna stödfötter skall bytas ut mot nya, vilka kan beställas från Swereco.
- Max brukarvikt 130 kg.

**Avsedd användning:** Badstolen Kulan är avsedd att sitta på när man duschar.**Symboler:** Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen.

Max säker brukarvikt.



Kan tvättas med alkalisk tvällösning, pH 5-9.



Tvättas i max 85°C i max 3 minuter.



Visuell kontroll.



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.

### Teknisk specifikation

**Art nr: 142580**

Vanlig sits

Vikt: 3,6 kg

**Art nr: 142581**

Intimsits

Vikt: 3,5 kg

Sitsens djup: 40 cm

Sitsens bredd: 43 cm

Material: Stålrör, PE (sits), TPE (stödfötter)

### Återvinning:

Då produkten är uttjänt återvinns den som metallskrot och plastavfall. Emballaget består av wellpapp och återvinns i enlighet med detta.

Tillverkad av:

**Swereco AB**

Vagnvägen 4

SE-364 42 Lenhovda



Tel: +46 (0)8 5000 5240

www.swereco.com

info@swereco.com

## Användning:

1. Installera badstolen ovanför badkaret.
2. Kontrollera att hela stödfoten ligger mot badkarskanten. Kontaktytan måste vara minst 4 cm för varje enskild stödfot. Är kontaktytan mindre än 4 cm ökar risken för att stolen förlorar sitt fäste och blir instabil.
3. Kontrollera stödfötterna före användning. Skadade eller utslitna stödfötter skall bytas ut mot nya.

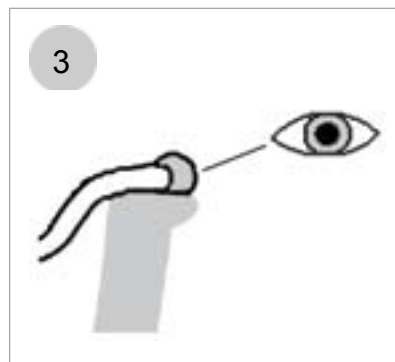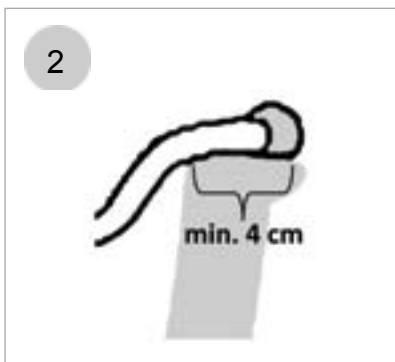

**Skötselanvisningar:** Rengörs regelbundet vid behov (min 1ggr/månad) med tvållösning, ph 5-9. Vid byte av brukare skall produkten desinficeras, autoklaveras i max 85° i max 3 minuter. Alternativt torkas med 70% isopropanol. Sitsen är enkel att avlägsna vid rengöring.

## Reservdelar:

- Art. nr 120706, Stödfot
- Art. nr 142128, Sits
- Art. nr 142129, Sits, intim
- Art. nr 142120, Ryggstöd

## Återvinning:

Då produkten är uttjänt återvinns den som metallskrot och plastavfall. Emballaget består av wellpapp och återvinns i enlighet med detta.



Allvarliga händelser som inträffar under användande skall rapporteras till Swereco