




RYGGSTÖD TOAFÖRHÖJNING STAPLALÄTT

Artikelnummer: 144206

Avsedd användning: Ryggstödet är ett tillbehör till Toaförhöjning StaplaLätt (144202). Det monteras enligt denna monteringsanvisning och används som ryggstöd.

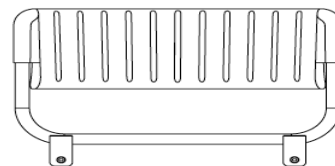

1. Torka rent stativet innan montering.
2. Montera antiglidbanden på stativet där ryggstödet ska fästas.
3. Placera ryggstödet på stativet över antiglidbanden och fäst ryggstödet med skruv och mutter på båda sidorna av sitsen. Dra åt ordentligt.
4. Kontrollera att den mjuka delen av ryggstödet är ordentligt nedtryckt.

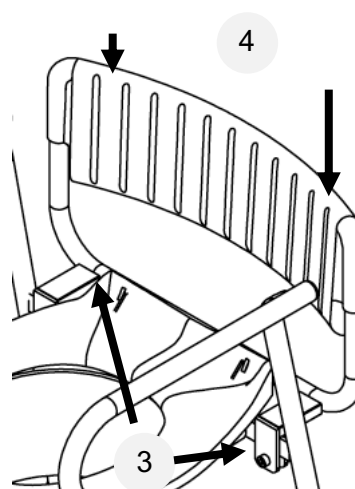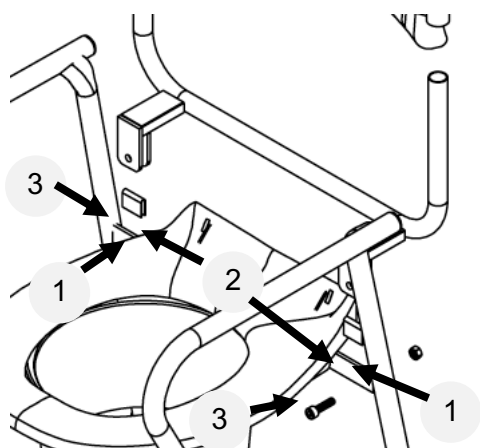

Symboler: Förklaring av symbolerna på produkten och i monteringsanvisningen.



Max brukarvikt



Kan tvättas med alkalisk tvällösning, pH 5-9.



Tvättas i max 85°C i max 3 minuter.




Visuell kontroll



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



144206

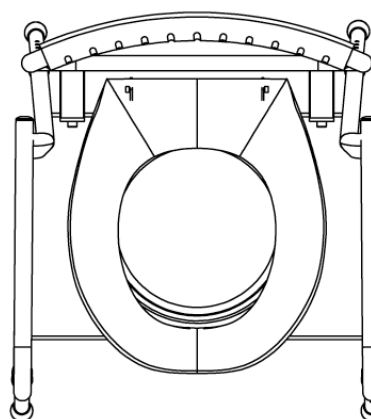

Tillverkad av:

Swereco AB

Vagnvägen 4

SE-364 42 Lenhovda


Tel: +46 (0)8 5000 5240

www.swereco.com

@swereco.com

Säkerhetsanvisningar (gäller komplett produkt):

- Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Toalettlocket får ej användas som ryggstöd.
- Stolen skall placeras på en plan yta där stolens alla fyra ben står stadigt mot golvet.
- Stolen får ej vinklas upp i sådant läge att stolen endas står på två ben då brukaren sitter i stolen. Detta då den maximala brukarvikten är beräknad med alla fyra ben i golvet.
- Stolen får ej förflyttas med brukaren sittandes i den.
- Stödfötterna skall kontrolleras regelbundet. Skadade eller utslitna stödfötter kan innebära ett försämrat grepp.
- Skadade eller utslitna stödfötter skall bytas ut mot nya, vilka kan beställas från Swereco.
- Innan användning säkerställ att clipset för höjdjustering sitter ordentligt intryckt.
- Vid byte av clips säkerställ att det är rätt modell (olika storlekar finns).
- Vid tecken på att höjdjusteringen glappar eller att produkten på annat sätt är utsliten bör produkten tas ur bruk och skickas in för service.
- Max brukarvikt 160 kg. Vid användning av ryggstöd, se till att ryggstödet är monterat enligt anvisning.

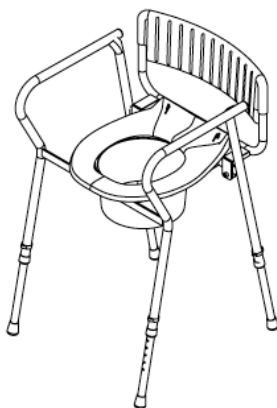

144202 + 144206

Skötselanvisningar: Rengörs regelbundet vid behov (min 1ggr/månad) med tvållösning, pH 5-9. Vid byte av brukare skall produkten desinficeras, autoklaveras i max 85° i max 3 minuter. Alternativt torkas med 70% isopropanol.

Återvinning:

Då produkten är uttjänt återvinns den som metallskrot och plastavfall. Emballaget består av wellpapp och återvinns i enlighet med detta.



Alla allvarliga händelser som inträffar under användning skall rapporteras till Swereco AB.

www.swereco.com
order@swereco.com