

Pet-emot-kant

Hjälpmedel i hemmet • Kök & Måltid • Bestick & Servering

Art nr: 147500, 147500K, 147505

Swerecos pet-emot-kant är en hjälp för personer som har svårt att få upp maten på gaffeln eller skeden med en hand. Pet-emot-kant är tillverkad av mjukfjädrande polypropylenplast som kan återvinnas. Den passar till de flesta flata tallrikar med yttermått upp till 27 cm Ø.

Diska alltid produkten i varmt vatten innan första användning.

Varumärke	Swereco		
Benämning	Pet-emot-kant		
Art nr	147500	147500K	147505
Färg	vit	vit, konsumentförpackning	röd
Produkter/förpackning	1 st	1 st	1 st
Material	Polypropylen		
Vikt	0,04 kg		
Storlek	Till tallrik maximal diameter 27 cm		
Rengöring	Rengörs som vanlig köksutrustning. Tål diskmaskin (max 84 grader)		
Kasseras	Sorteras efter lokal anvisning		
Förvaring	Rumstemperatur		
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.		



Användaranvisning:

- Diska produkten i varmt vatten innan första användning .
- Montera pet-emot-kanten på en flat tallrik genom att placera de tre hakarna runt tallrikskanten. För att underlätta montering, kan produkten spolvas med varmt vatten för att bli mer följsam.
- Lägg upp den mat som skall ätas.
- Använd pet-emot-kanten som hjälp med att få upp maten på gaffeln eller skeden med en hand.

Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Innehåller Polypropylen



Produkten är CE-märkt



Art nr 147500, 147500K, 147505



Se till att produkten är hel. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Produkten får inte placeras i varm ugn. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren.

EUDAMED



SRN SE-MF-000033314



SWEDISH
Medtech



Swereco AB
Vagnvägen 4
364 42 Lenhovda