

## Uppresning Eva

Artikelnummer: 151060, 151062, 151064


Golvplatta, Bygel standard, Bygel hög

**Uppresning Eva** är med sin mönsterskyddade design avsedd att användas vid säng som stöd/vändhandtag samt som skydd för att inte rulla ur sin säng.

Uppresningsstödet monteras genom att klicka i bygel i golvplattan, skruva fast bygel med golvplattan genom att dra åt insexskruvarna. Justera fästena så att de lägger an mot sängramen (långsidan) och skruva fast insexskruvarna med medföljande insexnyckel. Nyckeln bör därefter fästas mot magneten på golvplattans fäste för att finnas tillgänglig vid behov. Sängramen ska bestå av massivt trä och bredden av sängramens underkant bör vara 2-8 cm (med fäste tillverkat efter 2020-05). Säkerställ korrekt montering innan användning och att samtliga skruvar är ordentligt åtdragna.

Höjd (H) monterad, standard: 85 cm / hög: 97 cm

Sängbygel hög beställs när säng har hög madrass, exempel kontinentalsäng.

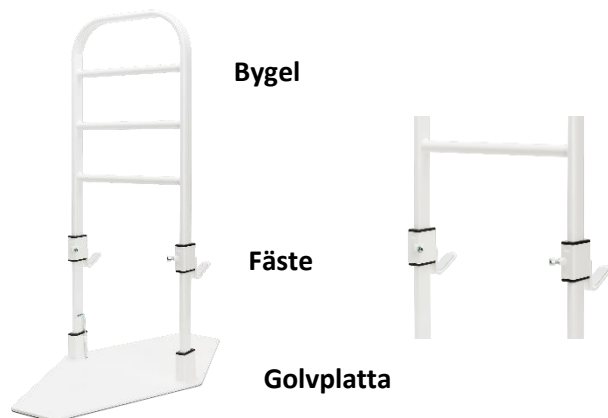

### Teknisk specifikation

#### Art. nr: 151060:

Golvplatta Bredd: 35 cm Vikt: 8,4 kg  
Insexnyckel ska alltid medfölja golvplattan.




#### Art. nr: 151062

Bygel standard totalhöjd: 85 cm  
Vikt: 3,1kg

#### Art. nr: 151064

Bygel hög totalhöjd: 97 cm  
Vikt: 3,4kg

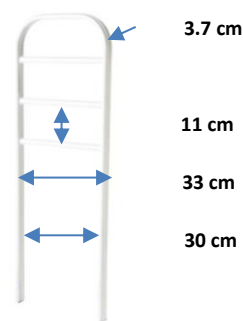


**Material:** Stålrör, pulverlack



### Säkerhetsanvisningar:

1. Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett. Installationen skall göras av behörig personal. Swereco påtar sig inget ansvar om produkten används, förändras eller monteras ihop på annat sätt än vad som anges i denna bruksanvisning.
2. Höjden (H) över madrass bör vara 22 cm. Se bild.
3. Sängbygel är ej avsedd att användas till små barn på grund av avståndet mellan ribborna. Klämrisk.
4. Om sängen är utrustad med förhöjningsklossar ex. BILL, BULL, Liljan, Vivan eller liknande, bör dessa klossar omsluta och sitta fast i sängens ben.
5. Produkten bör ej fästas på sängar med medar då dessa sängar utgör en ökad tipprisk.
6. Uppresning Eva bör ej användas tillsammans med fristående däckert då det finns risk att golvplattan och däckertens ben hamnar i konflikt, vilket kan öka tipprisken.
7. Om sängen har motordriven justerbar rygg och/eller benstöd ska klämrisken beaktas. En sådan säng i kombination med sängbygel bör inte användas av personer som har demens eller spasmer om inte en dokumenterad individuell utprovning/riskanalys har gjorts.
8. Avståndet (A) mellan gavel och sängbygel ska vara mindre än 4 cm eller mer än 32 cm. Detta säkerhetsavstånd gäller också om en extra sängbygel monteras på samma sida. Se bild.
9. Avståndet (B) mellan madrass och bygel ska vara mindre än 6 cm. Om sängen har rörliga delar (motordriven rygg och/eller benstöd) bör avståndet (B) dessutom vara större än 2,5 cm. Även om säkerhetsavstånden efterföljs kvarstår viss klämrisik
10. Säkerställ korrekt montering innan användning och att skruvarna är ordentligt åtdragna.
11. Max brukarvikt 150 kg

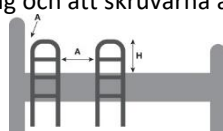

## Monteringsanvisning:

1. Kontrollera sängens höjd från golv till sängens övre kant så att rätt modell av bygel valts.
2. Fäst bygeln i golvplattan och dra åt insexskruvarna med medföljande insexnyckel.
3. Justera fästena mot sängens regel (långsidan) och skruva åt insexskruvarna ordentligt med medföljande insexnyckel. Säkerhetsställ så uppresningsstödet sitter ordentligt.

Art.nr: 15106020 **Fäste**, passar när sängens höjd från golv till sängens undersida är minst 6 cm. Sängregelns ska vara 2-8 cm bred. För fästena tillverkade före 2020-05 gäller 2-6 cm bredd på sängregel.



OBS! Läs säkerhetsanvisningarna på sidan 1 före montering och användning. Säkerhetsavstånden måste respekteras då brukaren inte kan motta muntlig information om klämrisk. Om osäkerhet råder kontakta Swereco för vägledning.

## Skötselanvisningar: Kontrollera samtliga skruvars fäste regelbundet.

Produkten ska rengöras regelbundet och vid behov med tvållösning, pH 5-9. Produkten kan även torkas med 70% isopropanol. Vid reconditionering ska produkten kontrolleras och utslitna eller skadade delar ska bytas ut. Rondellgummit under golvstödet och på fästet bör kontrolleras och bytas ut vid behov. Reservdelar beställs från [order@swereco.com](mailto:order@swereco.com)

### Tillbehör:

Art. nr: 151060, Golvstöd  
 Art. nr: 151062, Bygel 85 cm  
 Art. nr: 151064, Bygel 97 cm

### Reservdelar:

Art. nr: 15106020 Fäste

### Reservdelar: (för Eva tillverkad efter 2020-05)

Art. nr: 15106022 Insexskruv M8x16 mm  
 Art. nr: 15106023 Insexnyckel NV4 mm fzb  
 Art. nr: 15100013 rondell gummi 2 mm Eva/Adam  
 Art. nr: 15106025 Antiglid (till Fäste) 74x20x2 mm  
 Art. nr: 11171004 Plaststyrning, svart till fäste  
 Art. nr: 15106026 Magnet till insexnyckel 12x2 mm

**Återvinning:** Då produkten är uttjänt återvinns den som metallskrot. Emballaget består av plast och wellpapp och återvinns i enlighet med detta.

## Symboler: Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen.



Max 150 kg

Max säker brukarvikt.



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Kan tvättas med alkalisk tvållösning, pH 5-9.



Tvättas i max 85°C i max 3 minuter.

Tillverkad av:

**Swereco AB**

Vagnvägen 4

SE-364 42 Lenhovda

Tel: +46 (0)8 5000 52 40

[www.swereco.com](http://www.swereco.com)

[info@swereco.com](mailto:info@swereco.com)



Alla allvarliga händelser som inträffar under användning skall rapporteras till Swereco AB.