


Rörelsehjälpmedel • Förflyttningshjälpmedel

Art nr: 151060, 151082, 151084
151086, 151088

Uppresning Adam är med sin mönsterskyddade design avsedd att användas vid låg säng som stöd/vändhandtag samt som stöd/uppresningshandtag vid soffor.

Benämning	Uppresning Adam
Art nr	151060, 151082, 151084, 151086, 151088
Material	Pulverlackerade stålrör
Mått och vikt	Art nr 151060 Golvplatta B35 cm, vikt 8,4 kg Art nr 151082 Bygel standard H68,5-78,5 cm, vikt 3 kg Art nr 151084 Bygel hög H88,5-98,5 cm, vikt 3,5 kg Art nr 151086 Adam komplett, standard, H68,5-78,5 cm, vikt 11,4 kg Art nr 151088 Adam komplett hög, H88,5-98,5 cm, vikt 11,9 kg
Reservdelar (för Adam tillverkad efter 2020-05)	Art nr 15106020 Fäste Art nr 15106022 Insexskruv M8x16 mm Art nr 15106023 insexnyckel NV4 mm fzb Art nr 15100013 rondell gummi 2 mm Eva/Adam Art nr 15106025 Antiglid (till Fäste) 74x20x2 mm Art nr 11171004 Plaststyrning, svart till fäste Art nr 15106026 Magnet till insexnyckel 12x2 mm
Förvaring	Rumstemperatur
Teknisk livslängd	5 år under förutsättning att regelbundna kontroller och service utförs
Återvinning	Metallskrot, emballage består av emballage och wellpapp Sorteras efter lokal anvisning
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas av Swereco vid förfrågan

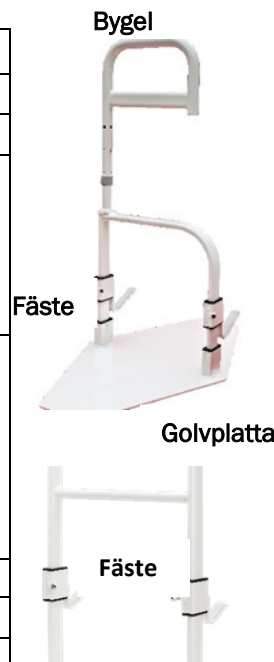

Symboler:



Max: 150 kg (std)
120 kg (hög)

Max brukarvikt



Kan tvättas med alkalisk tvållösning, pH 5-9 eller 70% isopropanol



Tvättas i max 85 °C i max 3 minuter.



Gör alltid en visuell kontroll innan användning



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr 151060, 151082, 151084, 151086, 151088

Användaranvisning Uppresningsstödet monteras genom att klicka i bygeln i golvplattan, skruva fast bygeln i golvplattan genom att dra åt insexskruvarna. Justera fästena så att de lägger an mot möblens ram (långsidan) och skruva fast insexskruvarna med medföljande insexnyckel. Nyckeln bör därefter fästas mot magneten på golvplattans fäste för att finnas tillgänglig vid behov. Möbelns ram ska bestå av massivt trä eller metall och bredden av ramens underkant bör vara 2-8 cm (med fäste tillverkat efter 2020-05). Säkerställ korrekt montering innan användning och att samtliga skruvar är ordentligt åtdragna. Produkten ska rengöras regelbundet och vid behov med tvållösning, pH 5-9. Produkten kan även torkas med 70% isopropanol.



Kontrollera regelbundet att samtliga skruvar är ordentligt åtdragna. Vid rekonditionering ska produkten kontrolleras och utslitna eller skadade delar ska bytas ut. Rondellgummit under golvstödet samt antiglidgummit på fästet ska kontrolleras och bytas ut vid behov. Vid allvariga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



SRN SE-MF-000033314



Swereco AB
Vagnvägen 4
364 42 Lenhovda




SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4, SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com · +46 (0)8 5000 5240

Säkerhetsanvisning:

- Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett. Installationen skall göras av behörig personal. Swereco påtar sig inget ansvar om produkten används, förändras eller monteras ihop på annat sätt än vad som anges i denna bruksanvisning.
- Säkerställ att det ej finns mattor, möbler eller föremål i nära anslutning till stödet för att minimera snubbelrisk.
- Höjden (H) bör vara tillräcklig för att ge fullgott stöd vid uppresning.
- Bygeln är ej avsedd att användas till små barn på grund av avståndet mellan ribborna (klämrisk).
- Om möbelen är utrustad med förhöjningsklossar ska dessa klossar omsluta och sitta fast runt möbelns ben.
- Produkten bör ej fästas på sängar med medar då dessa sängar utgör en ökad tipprisk, inte heller på höj- och sänkbara sängar eftersom det medför en risk att Adam inte är monterad vid sängen på ett säkert sätt. Om kombinationen används ska en dokumenterad individuell utprovning/riskanalys utföras.
- Uppresning Adam bör ej användas tillsammans med fristående dävert då det finns risk att golvplattan och dävbertens ben hamnar i konflikt, vilket kan öka tipprisen. Om kombinationen används ska en dokumenterad individuell utprovning/riskanalys utföras.
- Om sängen har motordriven justerbar rygg och/eller benstöd ska klämriskerna beaktas. En sådan säng i kombination med sängbygel ska inte användas av personer som har demens eller spasmer om inte en dokumenterad individuell utprovning/riskanalys har gjorts.
- Avståndet (A) mellan gavel och bygel ska vara mindre än 4 cm eller mer än 32 cm. Detta säkerhetsavstånd gäller också om en extra sängbygel monteras på samma sida. Se bild.
- Avståndet (B) mellan madrass och bygel ska vara mindre än 6 cm. Om sängen har rörliga delar (motordriven rygg och/eller benstöd) bör avståndet (B) dessutom vara större än 2,5 cm. Även säkerhetsavstånden efterföljs kvarstår viss klämrisk.
- Säkerställ korrekt montering innan användning och att skruvarna är ordentligt åtdragna.

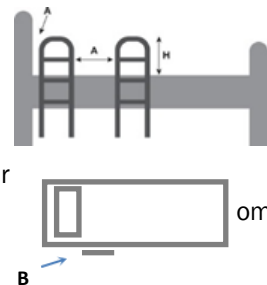

Monteringssanvisning:

- Kontrollera sängens/soffans höjd från golv till möbelns övre kant så att rätt modell av bygel valts.
- Möbelns ram ska bestå av massivt trä eller metall och bredden av sängramens underkant bör vara 2-8 cm (med fäste tillverkat efter 2020-05).
- Placera uppresningsstödet bygel i golvplattans fästen, skruva fast bygeln i golvplattan genom att dra åt insexskruvarna med medföljande insexnyckel. Golvplattans fästen med tillhörande skruvar ska vara vänd mot sängen/soffan. Justera fästena så att de ligger an mot sängramen (långsidan) och skruva fast insexskruvarna.
- Säkerställ att uppresningsstödet bygel sitter ordentligt fast i golvplattan, samt att samtliga skruvar är ordentligt åtdragna. Nyckeln bör därefter fästas mot magneten på golvplattans fäste för att finnas tillgänglig vid behov.
- Art nr 15106020 Fäste, passar när sängens höjd från golv till sängens undersida är minst 6 cm. Sängregelns bredd ska vara 2-8 cm. För fästet tillverkade före 2020_05 gäller 2-6 cm bredd på sängregeln.



OBS! Läs säkerhetsanvisningen före montering och användning. Säkerhetsavstånden måste efterföljas om brukaren inte kan mottaga muntlig information om klämrisk. Om osäkerhet råder, kontakta Swereco för vägledning.

