

FÖRHÖJNINGSKLOSS REKO

Artikelnummer: 151100, 151101

FÖRHÖJNINGSKLOSS MAGNUM


151130, 151131

Avsedd användning: Förhöjningskloss REKO och Magnum används för förhöjning av stol, sängbord m.m. Magnum passar även för bredare ben eller sängar med sockel.




Säkerhetsanvisningar:

- Produkten får ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Byggda höjden får inte överstiga nedanstående mått, dvs. max 4 distansklossar får användas för Magnum och 4 distansklossar för REKO.
- Möbeln skall alltid stå på bottenplattan eller distansklossen. Den får inte vila mot övre kanten av förhöjningsklossen. Var uppmärksam på att detta gäller även om benen är koniska.
- Kan lämna avtryck i plastmattor.
- Produkten är tillverkad i massivt trä och har därför ingen begränsning avseende brukarvikter.
- Alla allvarliga händelser som inträffar under användning skall rapporteras till Swereco AB.

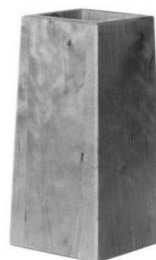

REKO

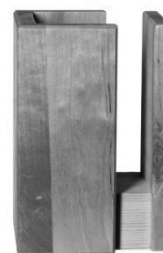

Magnum

Teknisk specifikation

Art.nr: **151100**

Förhöjningskloss REKO

Invändigt mått: 6 x 6 cm

Byggbar höjd: 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 12,5 cm, 15 cm

Höjd (yttermått): 20 cm

Höjd distanskloss: 2,5 cm

Vikt: 0,75 kg

Art.nr: **151101**

Förhöjningskloss REKO 4-pack

Art.nr: **151130**

Förhöjningskloss Magnum

Invändigt mått: 10 x 10 cm, bredd spalt: 3 cm

Byggbar höjd: 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 12,5 cm, 15 cm

Höjd (yttermått): 20 cm

Höjd distanskloss: 2,5 cm

Vikt: 1,58 kg

Art.nr: **151131**

Förhöjningskloss Magnum 4-pack

Material: Klarlackat trä

Skötselansvisningar: Kan torkas med fuktig trasa och mildt diskmedel. Efter rengöring är det viktigt att förhöjningsklossarna får självtorka, i ett ventilerat utrymme, tills de är helt torra.

Återvinning: Då produkten är uttjänt återvinns den som träavfall. Emballaget består av kartong och återvinns i enlighet med detta.

Medföljande delar:

1 st Förhöjningskloss

3 st Distansklossar till Magnum

3 st Distansklossar till REKO

Reservdelar:

Art. nr 15110001, Distanskloss REKO

Art. nr 15113001, Distanskloss Magnum

Symboler: Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen.



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Tillverkad av:

Swereco AB

Vagnvägen 4

SE-364 42 Lenhovda

Tel: +46 (0)8 5000 5240

www.swereco.com

info@swereco.com