


Förhöjingskloss Reko, Förhöjingskloss Magnum  
Rörelsehjälpmedel • Förhöjningsklossar


Art nr: 151100, 151101,  
151130, 151131

**Avsedd användning** Förhöjningskloss REKO och Magnum används för förhöjning av stol, soffa, sängbord mm. Magnum passar även för bredare ben eller sängar med sockel.

Benämning	Reko, 1 st	Reko, 4 st	Magnum, 1 st	Magnum 4 st
Art nr	<b>151100</b>	<b>151101</b>	<b>151130</b>	<b>151131</b>
Invändigt mått	6x6 cm	6x6 cm	10x10 cm	10x10 cm
Vikt	0,75 kg	4x 0,75 kg	1,58 kg	4x 1,58 kg
Beståndsdelar	1 förhöjningskloss 3 distansklossar			
Byggbar höjd	5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 12,5 cm, 15 cm			
Höjd (yttermått)	20 cm			
Höjd distanskloss	2,5 cm			
Material	Klarlackat trä			
Reservdelar	Art nr 15110001, distanskloss REKO Art nr 15113001, distanskloss Magnum			
Återvinning	Träavfall, sorteras efter lokal anvisning			
Förvaring	Rumstemperatur			
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.			

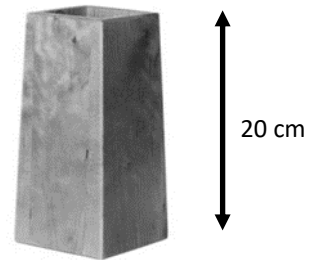

REKO

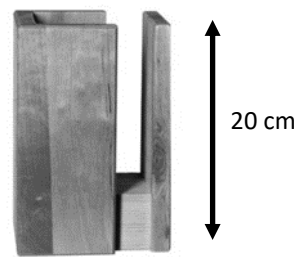

MAGNUM

<b>Symboler:</b>		<b>Användaranvisning</b>
	Produktens partinummer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produkten får ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.</li> <li>• Den byggda höjden får inte överstiga ovanstående mått, dvs maximalt 4 distansklossar. Samtliga ben skall höjas lika mycket.</li> <li>• Möbelen skall alltid stå på klossens bottenplatta eller distanskloss. Den får inte vila mot övre kanten av förhöjningsklossen. Var uppmärksam på att detta gäller även om benen är koniska.</li> <li>• Notera att förhöjningsklossen kan lämna avtryck på plastmattor.</li> <li>• Produkten är tillverkad i massivt trä och har därför ingen begränsning avseende brukarvikter.</li> </ul>
	Produktens utgångsdatum (5 års livslängd)	
	Produktens artikelnummer: 151100, 151101, 151130, 151131	
	Produkten är en medicinteknisk produkt	
	Produkten är CE-märkt i enlighet med Förordning (EU) 2017/745	
	Konsultera bruksanvisning	<b>Skötsel- och rekonditioneringsanvisning</b>
	Tillverkare: Swereco AB Vagnvägen 4 364 42 Lenhovda	Vid rekonditionering ska produkten kontrolleras och utslitna eller skadade delar ska bytas ut. Produkten ska rengöras regelbundet och vid behov med fuktig trasa och en mild tvällösning, pH 5-9. Produkten skall <b>EJ</b> rengöras med etanol. Efter rengöring är det viktigt att förhöjningsklossarna får självorka i ett ventilerat utrymme, tills de är helt torra. Produkten skall rekonditioneras mellan varje brukare eller oftare vid behov.
	SRN SE-MF-000033314	