

## FÖRHÖJNINGSKLOSS BULL

Artikelnummer 151105

### Säkerhetsanvisningar:

- Produkten får ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Produkten är avsedd att användas i rumstemperatur, vid kallare temperaturen föreligger risk att klossen spricker.
- Bygga höjden får inte överstiga nedanstående mått, dvs max 3 distansklossar får användas i varje förhöjningskloss.
- Möbeln måste stå på bottenplattan eller distansklossen, dvs inte vila mot övre kanten av förhöjningsklossen.
- Kan lämna avtryck i plastmattor.
- Kontrollera att möbeln inklusive klossar står stadigt före användning.
- Max brukarvikt: 320 kg inklusive möbelns vikt fördelad på alla fyra ben.



**Avsedd användning:** Förhöjningskloss Bull används för förhöjning av exempelvis stol, säng eller bord. Förhöjning kan fås med 7,5, cm 10 cm, 12,5 cm och 15 cm. Bull greppar tillräckligt mycket om benet så att möbeln kan flyttas utan att benet skadas eller att klossen faller av.

### Teknisk specifikation

Höjd (yttermått): 25 cm

Höjd distanskloss: 2,5 cm

Höjd utan distanskloss: 5 cm

Byggbar höjd: 7,5 cm, 10 cm, 12,5 cm

Passar till möbelben:

1. Kvadratiska ben upp till cm 6 cm Ø
2. Runda ben till 3-6cm Ø
3. Ovala ben upp till 3X6 cm Ø
4. Rektangulära ben upp till 3X6 cm Ø

**Material:** PP

**Skötselansvisningar:** Rengörs regelbundet vid behov (min 1ggr/månad) med mildt diskmedel.

**Återvinning:** Då produkten är uttjänt återvinns den som plastavfall. Emballaget består av wellpapp och återvinns i enlighet med detta.

### Medföljande delar:

4 st Förhöjningsklossar

12 st Distansklossar

4 st Gummitassar

### Reservdelar:

Art nr 15110501, Distanskloss Bull

Art nr: 15110502, Gummitassar, 4 pack

**Symboler:** Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen.



Max brukarvikt

320 kg inklusive möbelns vikt, fördelad på alla fyra ben



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Tillverkare:

**Swereco AB**

Vagnvägen 4

SE-364 42 Lenhovda

Tel: +46 (0)8 5000 5240

[www.swereco.com](http://www.swereco.com)

[order@swereco.com](mailto:order@swereco.com)

**REF** 151105