

**FÖRHÖJNINGSKLOSS ELEFANT**  
9 cm 4 st/fp, 14 cm 4 st/fp

Artikelnummer: 151115, 151120

**Avsedd användning:** En stabil och säker förhöjningskloss som passar för bredare ben. Tillverkad av grå polypropylenplast. Överdelen är skålad och klädd med antiglidmaterial. Passar ben med: Ø 8,5 cm. Max brukarvikt 380 kg är inkluderat möbels tyngd. En förpackning innehåller 4 st förhöjningsklossar.



## **Säkerhetsanvisningar:**

Klossarna skall placeras under samtliga 4 ben och på plant och stabilt underlag. Max brukarvikt 500 kg inklusive möbels vikt fördelad på alla fyra ben.

## **Skötselansvisningar:**

Rengörs regelbundet vid behov (min 1ggr/månad) med mildt diskmedel.

**Återvinning:** Då produkten är uttjänt återvinns den som plastavfall. Emballaget består av wellpapp och återvinns i enlighet med detta.

## **Symboler**

Förklaring av symboler på produkten och i bruksanvisningen



Kan tvättas med alkalisk tvällösning, pH 5-9.



Visuell kontroll



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Max brukarvikt inkl. möbel: 500 kg

## **Teknisk specifikation**

Artnr 151115 Höjd: 9 cm  
Artnr 151120 Höjd: 14 cm  
Passar < Ø 8,5 cm

Distributör Sverige:  
**Swereco AB**  
Vagnvägen 4  
SE-364 42 Lenhovda

Tel: +46 (0)8 5000 5240  
www.swereco.com  
info@swereco.com

Tillverkare:  
**Gordon Ellis & Co**  
Trent Lane  
Castle Donington  
Derby DE74 2NP  
ENGLAND