

## FÖRHÖJNINGSKLOSS ELEFANT

Artikelnummer: 151115, 151120

9 cm 4 st/fp, 14 cm 4 st/fp

**Avsedd användning:** En stabil och säker förhöjningskloss som passar för bredare ben. Tillverkad av grå polypropylenplast. Överdelen är skålad och klädd med antiglidmaterial. Passar ben med: Ø 8,5 cm. Max brukarvikt 380 kg är inkluderat möbelns tyngd. En förpackning innehåller 4 st förhöjningsklossar.



### ⚠ Säkerhetsanvisningar:

Klossarna skall placeras under samtliga 4 ben och på plant och stabilt underlag. Max brukarvikt 380 kg inklusive möbelns vikt fördelad på alla fyra ben.

### Skötselansvisningar:

Rengörs regelbundet vid behov (min 1ggr/månad) med mildt diskmedel.

**Återvinning:** Då produkten är uttjänt återvinns den som plastavfall. Emballaget består av wellpapp och återvinns i enlighet med detta.

### Symboler

Förklaring av symboler på produkten och i bruksanvisningen



Kan tvättas med alkalisk tvållösning, pH 5-9.




Visuell kontroll



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Max brukarvikt inkl. möbel: 380 kg

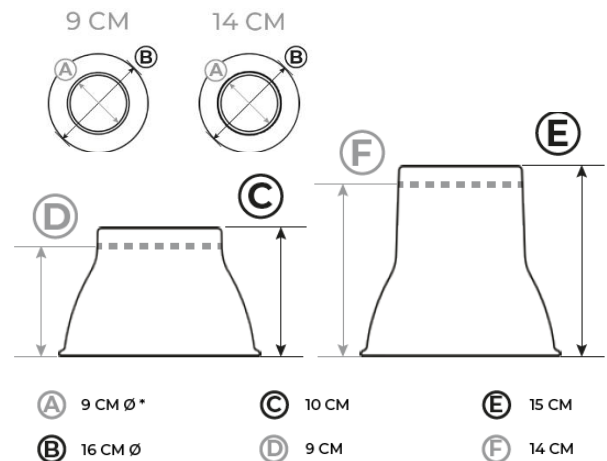

Maximal diameter på möbelns ben: 8,5 cm

Tillverkare:  
Gordon Ellis & Co  
Trent Lane  
Castle Donington  
Derby DE74 2NP  
ENGLAND

Distributör Sverige:  
**Swereco AB**  
Vagnvägen 4  
SE-364 42 Lenhovda  
Tel: +46 (0)8 5000 5240  
www.swereco.com  
info@swereco.com