

## FÖRHÖJNINGSKLOSS SUREGRIP

Artikelnummer: 151140

**Avsedd användning:** Förhöjningskloss SureGrip används för förhöjning av exempelvis stol, säng eller bord. SureGrip passar de flesta typer av möbelben, inklusive moderna klossfötter med hjälp av de medföljande självhäftande plattorna. Förhöjningsklossen sitter stadigt på benet utan att skada möblens yta, tack vare de dubbla greppen. SureGrip kan steglöst justeras i höjd, och det finns tydliga markeringar på klossen för att underlätta att samtliga fyra klossar ställs in på samma höjd.

### ⚠ Säkerhetsanvisningar:

- Produkten får ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Förhöjningsklossen ska sitta stadigt på möbelns ben.
- Möbeln måste stå på bottenplattan, dvs. inte vila mot övre kanten av förhöjningsklossen.
- Kan lämna avtryck i plastmattor.
- Kontrollera att möbeln inklusive klossar står stadigt före användning.
- Max brukarvikt: 700 kg inklusive möbelns vikt fördelad på alla fyra ben.




### Teknisk specifikation

För ben upp till  $\varnothing$  8,5 cm: 2,5-10 cm

För möbler med klossfot: 10-16,5 cm

Vikt: 1,5 kg (totalt för 4 st)

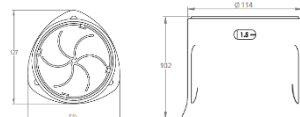

**Material:** PP

**Skötselansvisningar:** Rengörs regelbundet vid behov (min 1ggr/månad) med mildt diskmedel.

**Återvinning:** Då produkten är uttjänt återvinns den som plastavfall. Emballaget består av wellpapp och återvinns i enlighet med detta.

**Symboler:** Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen



Max säker brukarvikt 700 kg



Visuell kontroll



Kan tvättas med alkalisk tvållösning, pH 5-9



Produkten följer (EU) MDR 2017/745



Tvättas i max 85°C i max 3 minuter.









Distribueras av:  
**Swereco AB**  
 Vagnvägen 4  
 SE-364 42 Lenhovda  
 Tel: +46 (0)8 5000 5240  
[info@swereco.com](mailto:info@swereco.com)  
[www.swereco.com](http://www.swereco.com)

Tillverkas av:  
**Gordon Ellis & Co**  
 Trent Lane  
 Castle Donington  
 Derby, E74 2NP, UK

[info@swereco.com](mailto:info@swereco.com)  
[swereco.com](http://swereco.com)

## Monteringsanvisning SureGrip:

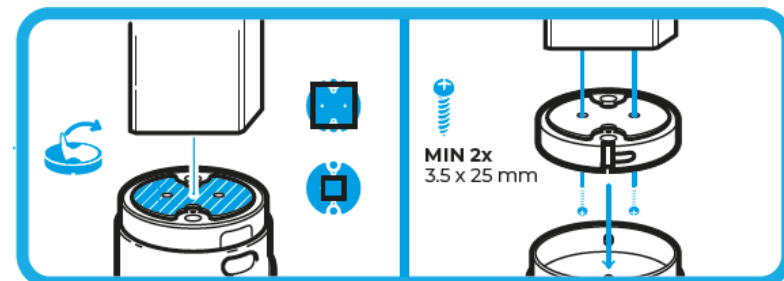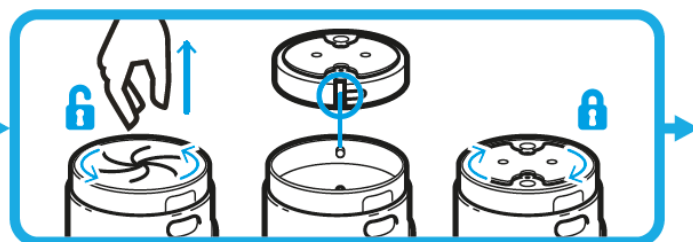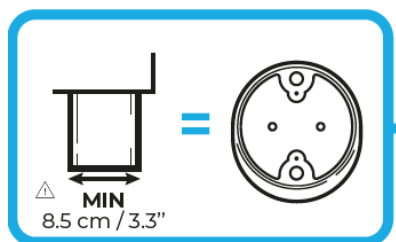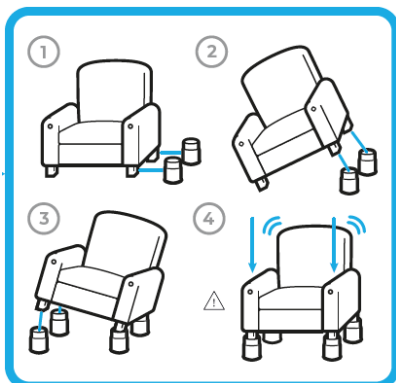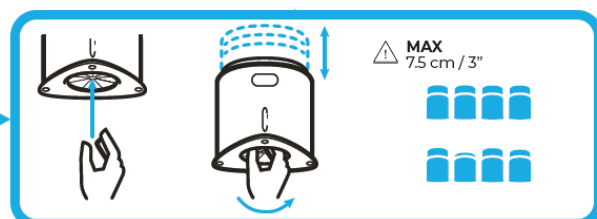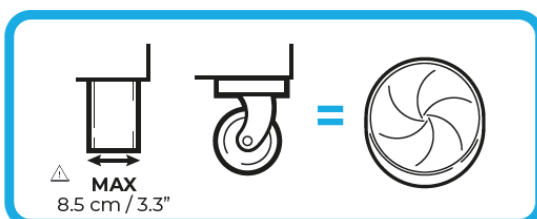

### Tillbehör:

art nr 15114001 Antihalk till SureGrip, 4 st  
art nr 15114002 Länköglor till SureGrip, par  
art nr 15114003 Förlängare till länköglor, 1 st

### Reservdelar:

art nr 15114004 klossadapter med självhäftande yta



Alla allvarliga händelser som inträffar under användning skall rapporteras till Swereco AB.