

Benjamin Strumpåtagare
Hjälpmiddel i hemmet • Greppa & Nå • Övrigt

Art nr: 501920

Benjamin Swerecos strumpåtagare Benjamin för stöd- och kompressionsstrumpor underlättar vid påtagning av strumporna utan att behöva böja ryggen. Den stabila konstruktionen gör att Benjamin står stadigt på golvet vid användande.



Benämning	Strumpåtagare Benjamin
Art nr	501920
Material	Pulverlackerat stål
Längd	27 cm
Bredd	12 cm
Öppning	9,3 cm
Förvaring	rumstemperatur
Kasseras	Metallåtervinning, sorteras efter lokal anvisning
Övrig information	Utbildning kan tillhandahållas vid krav enligt upphandling

Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Kan tvättas med alkalisk tvällösning, pH 5-9 alt 70% isopropanol



Tvättas i max 85°C i max 3 minuter.



Gör alltid en visuell kontroll innan användning



Innehåller pulverlackerat stål



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr 501920

Användaranvisning Strumpåtagaren lämpar sig för alla skostorlekar och för ett vadmått upp till 45 cm.

Strumpan träs på ställningen och kan ställas på golvet, därefter förs foten ner i strumpan.



EUDAMED



SRN SE-MF-000033314



Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



Swereco AB
Vagnvägen 4
364 42 Lenhovda