

Saniline C Maxi with wings

Art nr: 7475

Avsedd användning: Saniline Super with wings är ett unikt specialtieskydd för små avföringsläckage. Skyddet är ett engångsskydd som är tunt, diskret och lukthämmande med ett effektivt filter av aktivt kol.

Tester gjorda av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att lukt neutraliseras upp till 5 timmar.



Produktinformation

- Praktisk absorptionskapacitet 42 ml, verifierad enligt ISO 11948-1:2022
- Mått: B15 x L30,2 cm
- Hållbarhetstid: 3 år

Material

- Ytskikt: Nonwoven
- Absorberade kärna: Cellulosa, SAP
- Luktadsorption: Aktivt kol
- Läckagebarriär: LDPE
- Enkelförpackning: LDPE

Övrig information

- Förvaring: Rumstemperatur (max 25°C)
- Återvinning och avfall: Brännbart (släng EJ i toaletten)
- Produkten innehåller inte parfym eller hudvårdande medel
- Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid efterfrågan

Användaranvisning

- Produkten fästs i en underbyxa eller en i fixeringsbyxa med hjälp av en klisterremsa. Avlägsna försiktigt skyddsremsan och applicera skyddet enligt illustrationen.
- Var noga att välja en byxa som sluter tätt och fixerar skyddet på plats för att uppnå önskad funktion och minska risken för läckage.
- Vid sårig eller infekterad hud skall skyddet bytas vid varje läckagetillfälle.
- Vid värmeutslag: Lufttorka och vädra huden. Byt våta skydd.
- Vid tillbud eller misstänkt funktionsfel ska detta omgående rapporteras till tillverkaren och vid allvarliga incidenter även till relevant myndighet enligt gällande regelverk

Produktinformation	FP	TFP	Pall
GTIN	7331427074750	27331427074754	37331427074751
Innehåll	10 inkontinensskydd	12 FP	52 TFP
Storlek (BxDxH mm)	95x110x108	295x233x228	EUR-pall 800x1200, höjd 1,09 m
Bruttovikt	129 g	1710 g	-
Förpackningsmaterial	Kartong, 26g	wellpapp, 166 g	-



Produktens artikelnummer



Produkten är CE-märkt i enlighet med med Förordning (EU) 2017/745



Produkten är en medicinteknisk produkt



Återanvänd ej



Produkten innehåller inte latex



Produkten innehåller inte PVC



Förvara produkten i skydd från direkt solljus



Förvara produkten i max 25°C



Förvara produkten torrt



Kassera använd produkt som hushållsavfall



Använd produkt får ej spolas ner i toaletten



Återvinn förpackningen som kartong



Tillverkare

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · www.saniline.se
order@swereco.com · +46 (0)8 5000 5240

GD 2025-139 ver 02
Senaste versionen finns alltid på Swerecos
och Sanilines hemsida, under respektive
produktflik.