


Bruksanvisning

INDESmed

Improving your future

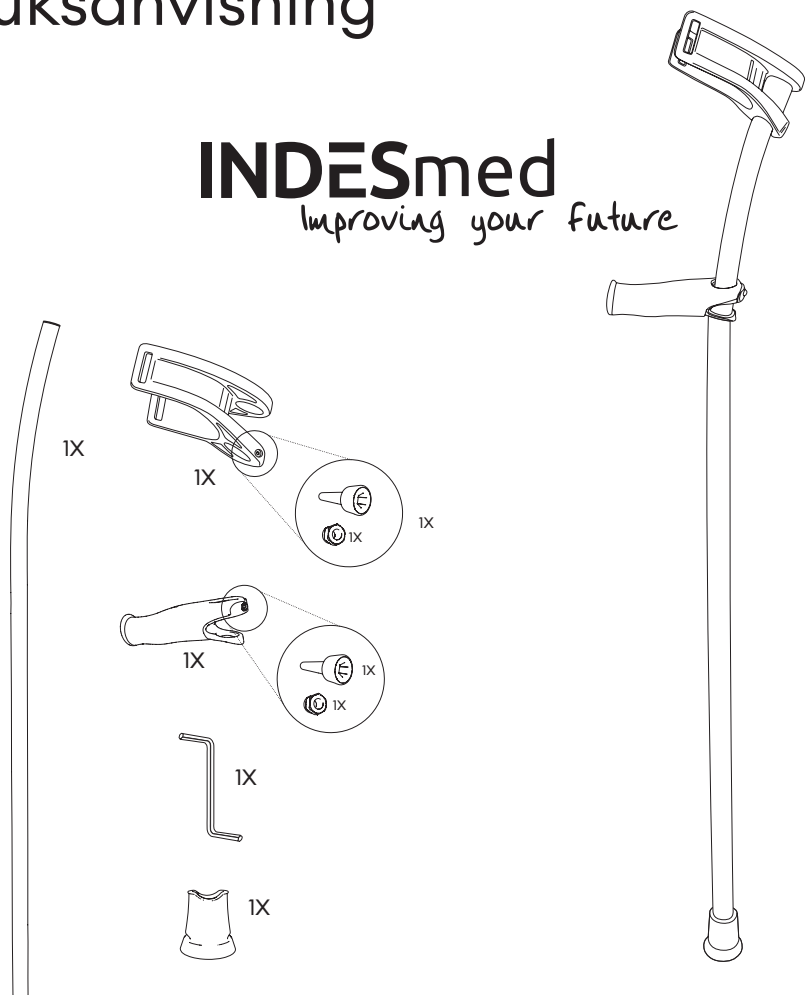

INDES medical s.l.
Calle Franklin N° 12,
28814 Daganzo de Arriba
(Madrid) España

www.indesmed.com


Rev. 005




Distribütör:
Swereco AB
Vagnvägen 4
364 42 Lenhovda
www.swereco.com

Rev. 005




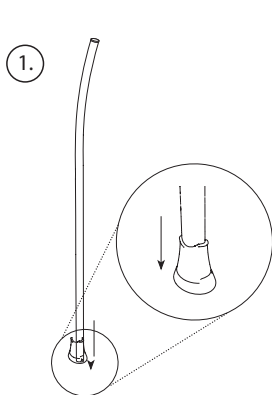


SE- Montera doppskon på kryckan nedre del. Håll kryckröret vertikalt under resterande monteringsmoment.

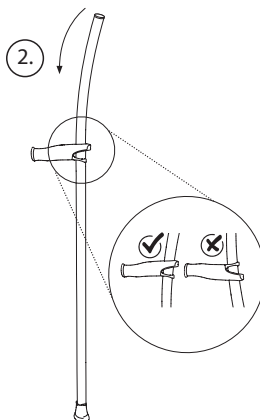


SE- Trä försiktigt på handtaget på kryckans rör, till korrekt höjd nåtts.

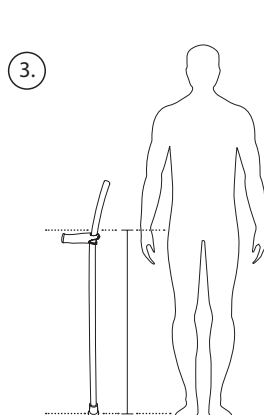

SE- Kontrollera handtagets höjd.

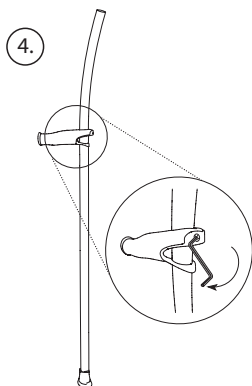

SE- Dra åt skruven med den medföljande insexnyckeln till ett motstånd känns. Dra därefter ytterligare ett halvt varv.

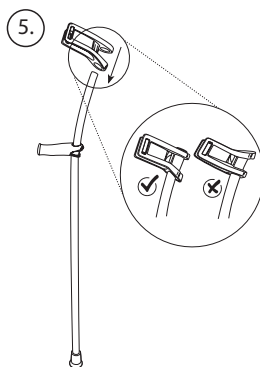

SE- Skjut armbygeln på plats, 1-2 cm under armbågen. Upprepa samma åtgärder som i steg 4.



SE- Den unika precisionsjusteringen av våra kryckor gör att du kan bibehålla en korrekt kroppsställning och undvika smärta och obehag i rygg, armar och handleder.

SE- RÅD FÖR MONTERING

1- För att underlätta glidningen av delar längs kryckröret:

- Öppna skruven så mycket som möjligt utan att tappa muttern.
- Om det behövs, använd ett mynt för att förstora öppningen i handtaget/armbygeln.
- Applicera neutral flytande tvål på insidan av metallringen.

2- Om handtaget eller armbygeln inte är åtdragen, kontrollera att de har monterats i rätt läge, både kryckdetaljen och i förhållande till kryckröret. Se till att du har dragit åt skruvarna korrekt.

SE- VARNING

- Använd denna produkt enligt anvisningar från läkare eller fysioterapeut.
- Kontrollera regelbundet alla delar och byt ut dem vid behov.
- Överskrid inte den maximala vikten som anges på kryckkåppen.



Video av monteringen