



Användning och indikation

Våra axillarkryckor är avsedda för personer som har betydande problem med balans och koordination samt svårt att gå, stödja och förflytta sig. Axillarkryckor gör det lättare och säkrare att gå eller gåtråna och kan användas för att avlasta benet och foten helt eller delvis. Axillarkryckor kan användas såväl inomhus som utomhus. **Säkerhetsföreskrifterna måste följas vid användning!**

Kontraindikation

Det är inte lämpligt att använda axillarkrycka efter amputation av båda armarna eller vid ledkontrakturer/skadade leder i båda armarna.

Allmänna säkerhetsföreskrifter

Häng inga väskor, påsar eller andra föremål på kryckan! Axillarkryckor får **under inga omständigheter användas för annat än avsett syfte**, t.ex. för att lyfta eller flytta föremål eller för att trycka på strömbrytare eller hissknappar! Underlagets beskaffenhet (friktion, form osv.) är avgörande för att kunna få säkert fäste med kryckan! Undvik fuktiga golv och underlag med småsten, sand, löv, is eller snö! **Var uppmärksam på snubbelrisker!** Vid ojämnheter, håligheter, lösa golvbeläggningar, kanter eller liknande kan kryckan oväntat glida undan eller sjunka ner! Iakttag särskild försiktighet om ljusförhållandena är otillräckliga, eftersom ojämnheter i underlaget då kan vara svåra att se! När kryckans längd justeras med tryckknapparna är det viktigt att knapparna efter justeringen står ut genom hälen så långt som möjligt (till anslag)! Tänk på att hälen över tid utsätts för ett visst slitage och då utvidgas/deformeras. Det är viktigt att regelbundet kontrollera att hälen inte har blivit så slitna att tryckknapparna inte längre säkert låser i sitt läge. Kontrollera även före varje användning att alla skruvförband är tillräckligt ådragna!

Inställning av axillarkrycka

Varning! Vänd dig till din återförsäljare för att få en funktionsriktig och ergonomisk korrekt inställning! En felaktigt inställd axillarkrycka kan ha bristfällig funktion och/eller förorsaka att brukaren överbelastas eller belastas på fel sätt! Detta gånghjälpmedel ska överlämnas till dig som brukare i ett korrekt och kontrollerat tillstånd och individuellt anpassas till din kropp av din återförsäljare eller av sjukvårdspersonal. Känner du dig osäker på att kryckan är i rätt och anpassat tillstånd, ska du kontakta sjukvårdspersonal eller annan behörig. En axillarkrycka kan bara ge önskad avlastning om den är optimalt anpassad till din kropp. En rätt justerad axillarkrycka når till ca 5 cm under din axelhåla. Kroppsvikten ska vila på handen, inte axeln. Inställning av handtagets position: Skruva loss vingmuttern och ta ut skruven som fäster handtaget till kryckbenet. Flytta handtaget till de hål som ger önskat höjdläge. Montera tillbaka skruv och vingmutter så att handtaget sitter fast på säkert sätt (se bild 1). Gör likadant på andra kryckan. **Inställning av hela kryckans längd:** Tryck in båda tryckknapparna på kryckans nedre del. Flytta till de hål som ger önskat läge och låt knapparna tryckas ut genom hälen till anslag så att de låser säkert (bild 2). Gör likadant på andra kryckan. **Varning!** Risk för fall! Om höjjusteringen inte låser felfritt kan kryckan falla ihop på oväntat och plötsligt sätt! Gör det till en vana att alltid handfast kontrollera höjdställningen efter varje justering. Det ska inte gå att vrida eller skruva ihop/dra isär kryckan!

Användning

Hur axillarkryckor används kan variera stort med varje brukares individuella förutsättningar. Det är viktigt att få bra instruktioner och förklaringar från återförsäljare eller sjukvårdspersonal när du ska börja använda gånghjälpmedel. Kryckor får inte användas i vatten. Vattnet kan tränga in i kryckan, orsaka korrosion och då ge ökad risk för att kryckan bryts. Se till att kryckan inte heller utsätts för fukt under längre tid. Axillarkryckor som blivit våta eller fuktiga ska torkas på lämpligt sätt. Att använda ett gånghjälpmedel på rätt sätt kräver en viss övning. Vi rekommenderar därför att du i början alltid har en följeslagare som ger dig ytterligare stöd. Använder du endast en krycka ska du ha den på motsatt sida från benet eller foten som har skadats eller ska avlastas. Håll kryckan nära kroppen. Luta den inte utåt eftersom det ökar risken för att du faller eller ramlar. Ta ett fullständigt grepp om handtaget med handen och håll fast ordentligt. Sätt ned kryckan på marken så rakt som möjligt. Annars är risken större att den glider undan. Välj en stol med armstöd om du behöver sätta dig ned. Då kan du stödja dig på armstöden när du ska ställa dig upp! Bär i möjligaste mån bekväma skor med låg klack. Då kan benet bättre hantera extra belastning! **Om du ändå råkar falla eller ramlar:** Försök att släppa iväg kryckan åt sidan så att du inte faller mot den! Vi rekommenderar att du i möjligaste mån alltid har med dig en stödjande följeslagare som kan fånga upp dig om du riskerar att falla! Att gå i trappor med krycka är inte det lättaste. Bäst är om någon sakkunnig person kan visa dig!

Försiktighetsåtgärder

Vid användning av krycka utsätts enskilda kroppsdelar för ovanligt tung belastning! Det kan orsaka följande oönskade biverkningar: Tryck- eller skavsår/-märken kan uppstå på händerna! Observera att detta inledningsvis eller efter längre användning kan orsaka smärta och överansträngning! Ta tillräckliga pauser!

Förvaring och skötsel

Förvara aldrig kryckan i närheten av kamin, värmeelement eller annan värmekälla eller på hatthyllan eller liknande i ett fordon! Undvik att utsätta kryckan långvarigt för direkt solljus. Starkt solljus och/eller hög värme kan skada plastmaterial! **Doppskan är en stildel och ska bytas ut regelbundet.** Om kryckan ställs undan en längre tid måste den kontrolleras av behörig sakkunnig innan den får användas igen! **Varning!** Handtag eller doppsko får **aldrig** rengöras med medel som innehåller olja! Halkrisk! Rengör kryckan vid behov med ett mildt rengöringsmedel och en mjuk trasa. Använd **aldrig** rengöringsmedel med lösningsmedel, eftersom det skadar plastmaterialet! **Obs!** Om desinficering behövs, är det viktigt att ett desinficeringsmedel med lämpliga egenskaper används. Följ därvid tillverkarens anvisningar.

Begränsning av användningen

Axillarkryckan får endast belastas enligt tillverkarens anvisningar. **Observera den maximalt tillåtna kroppsvikten som anges på produkten!** Kontakta återförsäljaren om kryckan ska utsättas för tyngre belastning eller om något är oklart. Krökt eller på annat sätt skadad krycka får under inga omständigheter fortsätta att användas, eftersom den inte längre är tillräckligt stabil! Det är inte tillåtet att rikta en krökt/deformerad axillarkrycka. En riktad krycka kan brytas på riskfyllt sätt. **Obs!** Varje allvarligt olycksfall som inträffar i samband med produkten ska rapporteras till tillverkaren och till den myndighet som är ansvarig i medlemsstaten där brukaren/patienten har sin hemvist.

Återanvändning (utlåning)/livslängd

I enlighet med Produkthaftungsgesetz (den tyska produktansvarslagen) ansvarar vi för våra produkter endast under perioden efter att de tillhandahållits (släppts ut på marknaden) första gången. Återanvändning (överlåtelse/utlåning) kan endast godkännas efter att vi har kontrollerat produkten. **Axillarkryckors livslängd är begränsad till 2 år.** Vi ansvarar inte för axillarkrycka som används efter utgången av denna livslängd. Ansvaret åvilar då användaren ensamt.

Garanti och felansvar

Du har köpt en kvalitetsprodukt från Ossenberg. Om produkten trots våra strikta kvalitetsstandarder skulle vara behäftad med fel, äger Ossenberg inom garantitiden på 12 månader rätt att efter eget beslut antingen avhjälpa felet eller vidta omleverans av felfri vara. Observera att skärpta lagkrav gäller för våra produkter, i synnerhet specialtillverkade produkter. Vi avvisar varje ansvar för skada som uppkommer till följd av att produkten har förändrats. Slitdelar, fel till följd av slitage och fel till följd av felaktigt handhavande omfattas inte av vår garanti eller vårt felansvar. Endast originaltillbehör och reservdelar får användas! Anlita alltid behörig sakkunnig vid behov av reservdel, tillbehör eller reparation.

Miljöriktig hantering av uttjänt material

ontakta din återförsäljare för information om hur du hanterar produkten på miljöriktig sätt och enligt lokalt gällande föreskrifter när den ska kasseras.

Tekniska data

REF		A	B	C	
12K	Axillarkrycka av lättmetall	35 cm - 50 cm	112 cm - 132 cm	19 mm	120 kg
12G	Axillarkrycka av lättmetall	40 cm - 55 cm	133 cm - 153 cm	19 mm	120 kg

Reservdel

REF	
719gr	Doppsko av gummi
163P	Handtag med skumgummi
162P	Stödpolstring
165	Skruv med vingmutter

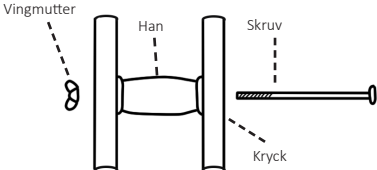


Bild 1


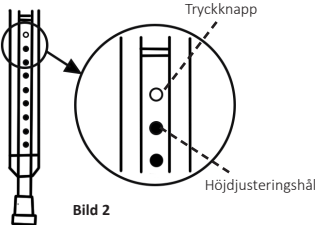


Bild 2



Symboler

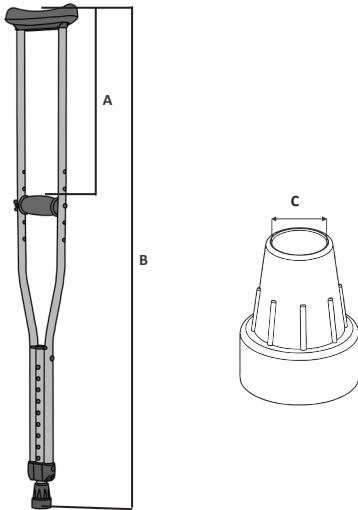

Artikelnummer



Nummer



Läs bruksanvisningen.



Varning



Denna produkt uppfyller kraven enligt EU-förordning 2017/745 (MDR).



Tillverkar



Distribueras



Tillverkningsdatum



Max. tillåten kroppsvikt



Medicinteknisk produkt



Ossenberg GmbH
Kanalstraße 79
48432 Rheine
TYSKLAND

Telefon
Fax
Internet
E-Mail

+49 (0) 59 71- 9 80 46 0
+49 (0) 59 71- 9 80 46 16
www.ossenberg.com
info@ossenberg.com