

Saniline C Mini

Art nr: 7470

Avsedd användning: Saniline Mini är ett unikt specielskydd för små avföringsläckage. Skyddet är ett engångsskydd som är tunt, diskret och lukthämmande med ett effektivt filter av aktivt kol.

Tester gjorda av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att lukt neutraliseras upp till 5 timmar.



Produktinformation

- Praktisk absorptionskapacitet 12 ml, verifierad enligt ISO 11948-1:2022
- Mått: B6,6 x L17,5 cm
- Hållbarhetstid: 3 år

Material

- Ytskikt: Nonwoven av polypropen
- Absorberade kärna: Cellulosa
- Luktadsorption: Aktivt kol
- Läckagebarriär: LDPE
- Enkelförpackning: LDPE

Övrig information

- Förvaring: Rumstemperatur (max 25°C)
- Återvinning och avfall: Brännbart (släng EJ i toaletten)
- Produkten innehåller inte parfym eller hudvårdande medel
- Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid efterfrågan

Användaranvisning

- Produkten fästs i en underbyxa eller en i fixeringsbyxa med hjälp av en klisterremsa. Avlägsna skyddsremsan och applicera skyddet enligt illustrationen på förpackningen
- Välj en underbyxa som sluter tätt och fixerar skyddet på plats för att uppnå önskad funktion och minska risken för läckage
- Vid sårig eller infekterad hud skall skyddet bytas vid varje läckagetillfälle
- Vid värmeutslag, lufttorka och vädra huden. Byt våta skydd
- Vid tillbud eller misstänkt funktionsfel ska detta omgående rapporteras till tillverkaren och vid allvarliga incidenter även till relevant myndighet enligt gällande regelverk

Produktinformation	Förpackning (FP)	Transportförpackning (TFP)	Pall
GTIN	7331427000742	27331427000746	37331427000743
Innehåll	16 inkontinensskydd	10 FP	108 TFP
Storlek (BxDxH) mm	74x110x76	395x162x120	EUR-pall 800x1200, höjd 1,12 m
Bruttovikt	79 g	910 g	-
Förpackningsmaterial	kartong (20 g)	wellpapp (114 g)	-



Produktens artikelnummer



Produkten är CE-märkt i enlighet med med Förordning (EU) 2017/745



Produkten är en medicinteknisk produkt



Återanvänd ej



Produkten innehåller inte latex



Produkten innehåller inte PVC



Förvara produkten i skydd från direkt solljus



Förvara produkten i max 25°C



Förvara produkten torrt



Kassera använd produkt som hushållsavfall



Använd produkt får ej spolas ner i toaletten



Återvinn förpackningen som kartong



Tillverkare

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · www.saniline.se
order@swereco.com · +46 (0)8 5000 5240

GD 2025-135 ver 01
Senaste versionen finns alltid på Swerecos
och Sanilines hemsida, under respektive
produktflik.