


Eva Rörelsehjälpmedel • Förflyttningshjälpmedel	Art nr: 151066, 151068
--	------------------------

Avsedd användning: EVA är ett mönsterskyddat uppresningsstöd som kan användas som vändhandtag samt som stöd vid i- och urstigning ur säng. EVA kan användas av privata brukare samt av brukare inom vården.

Benämning	Eva Låg (151066)	Eva Hög (151068)
Vikt	11,5 kg	11,8 kg
Beståndsdelar	Art nr 151060 Golvplatta B35 cm, vikt 8,4 kg Art nr 151062 Bygel Låg H85 cm, vikt 3,1 kg Art nr 15106020 Bygelhållare (fäste)	Art nr 151060 Golvplatta B35 cm, vikt 8,4 kg Art nr 151064 Bygel hög H97 cm, vikt 3,4 kg Art nr 15106020 Bygelhållare (fäste)
Reservdelar (för Eva tillverkad efter 2020-05)	Art nr 15106022 insexskruv M8x16 mm, svart Art nr 15106023 insexnyckel NV4 mm fzb Art nr 15100013 rondell D90 gummi Art nr 15106025 Antiglid74x20x2 mm (till fäste) Art nr 11171004 Plaststyrning (svart till fäste) Art nr 15106026 Magnet till insexnyckel 12x2 mm	
Maximal brukarvikt	Produkten skall användas av brukare med en max brukarvikt om 150 kg	
Material	Pulverlackerade stålrör	
Teknisk livslängd	5 år under förutsättning att regelbundna kontroller och service utförs	
Förvaring	Rumstemperatur	
Återvinning	Metallskrot, emballage består av wellpapp Sorteras efter lokal anvisning	
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas av Swereco vid förfrågan	

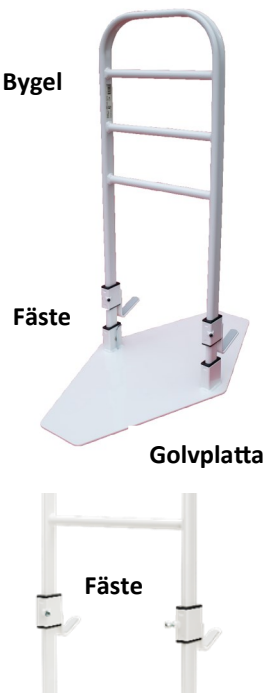

Symboler:	
	Produktens partinummer
	Produktens utgångsdatum (5 års livslängd)
	Produktens artikelnummer: 151066 (Eva Låg), 151068 (Eva Hög)
	Produkten är en medicinteknisk produkt
	Produkten är CE-märkt i enlighet med Förordning (EU) 2017/745
	Konsultera bruksanvisning
	Tillverkare: Swereco AB Vagnvägen 4 SE-364 42 Lenhovda


SRN SE-MF-000033314

Användaranvisning Säkerställ korrekt montering innan användning och kontrollera regelbundet att samtliga skruvar är ordentligt åtdragna. Skruvarna skall kontrolleras regelbundet.

Produkten ska rengöras regelbundet och vid behov med tvållösning, pH 5-9. Produkten kan även torkas med 70% isopropanol. Produkten skall **EJ** rengöras med etanol. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.

Rekonditioneringsanvisning

Vid rekonditionering ska produkten kontrolleras och utslitna eller skadade delar ska bytas ut. Plaststyrningen i bygelhållaren, rondellgummit under golvstödet samt antiglidgummit på fästet ska kontrolleras och bytas ut vid behov. Äldre skruvar med utstickande skruvskalle skall bytas ut mot den nya invändiga stoppskruven utan skruvskalle. Kan desinficeras i avsedd utrustning i 85°C i minst 3 minuter. Produkten skall rekonditioneras mellan varje brukare eller oftare vid behov.

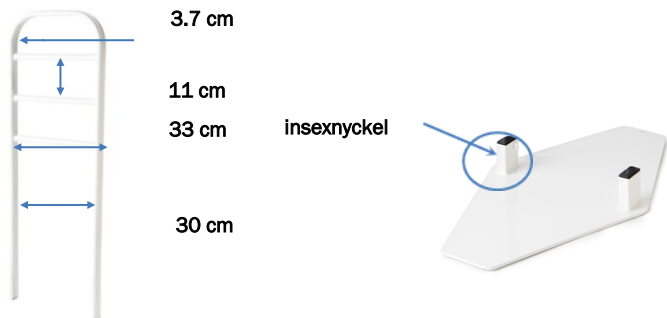



Eva

Rörelsehjälpmedel • Förflyttningshjälpmedel

Art nr: 151066, 151068

Säkerhetsanvisning:

- Produkten skall ej brukas på annat sätt än vad som är avsett. Produkten skall alltid monteras vid säng. Installationen skall göras av behörig personal. Swereco påtar sig inget ansvar om produkten används, förändras eller monteras ihop på annat sätt än vad som anges i denna bruksanvisning.
- Säkerställ att det ej finns mattor, möbler eller föremål i nära anslutning till stödet för att minimera snubbelrisk.
- Produkten är ej avsedd att användas till små barn på grund av avståndet mellan ribborna (klämrisk).
- Om sängen är utrustad med förhöjningsklossar, ska dessa omsluta och sitta fast runt sängens ben.
- Om produkten används på säng med medar skall en utprovning och riskbedömning göras av behörig förskrivare innan användning för att säkerställa säker användning av produkten.
- Produkten skall inte användas på en höj- och sänkbar säng där funktionen används.
- Om produkten används i kombination med en dävert, säkerställ att golvplattan och däverten ej hamnar i konflikt. Om kombinationen används ska en individuell utprovning och riskbedömning utföras av behörig förskrivare.
- Om sängen är ställbar med justerbar rygg och/eller benstöd ska klämriskerna beaktas. Om kombinationen används ska en individuell utprovning och riskbedömning utföras av behörig förskrivare.
- Avståndet (A) mellan sängens huvudände och produktens bygel ska vara mindre än 4 cm eller mer än 32 cm.
- Säkerställ korrekt montering innan användning och att skruvarna är ordentligt åtdragna.

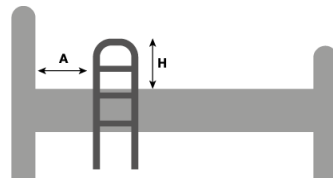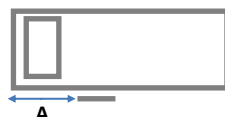

Monteringsanvisning:

OBS! Läs säkerhetsanvisningen före montering och användning. Om osäkerhet råder, kontakta Swereco för vägledning.

- Kontrollera sängens höjd från golv till sängens övre kant så att rätt modell av bygel valts.
- Sängramen ska bestå av massivt trä eller metall. Sängregelns bredd ska vara 2-8 cm. För fästen tillverkade före 2020_05 gäller 2-6 cm bredd på sängregeln.
- Trä på ett fäste på bygelns respektive ben. Placera bygelns i golvplattans fästen, skruva fast bygelns i golvplattan genom att dra åt insexskruvarna med medföljande insexnyckel. Golvplattans fästen med tillhörande skruvar ska vara vänd mot sängen. Justera fästena så att de ligger an mot sängramen (långsidan) och skruva fast insexskruvarna.
- Säkerställ att produktens bygel sitter ordentligt fast i golvplattan, samt att samtliga skruvar är ordentligt åtdragna. Nyckeln bör därefter fästas mot magneten på golvplattans fäste för att finnas tillgänglig vid behov.
- Art nr 15106020 bygelhållare (fäste), passar när sängens höjd från golv till sängens undersida är minst 6 cm.



Senaste versionen av bruksanvisningen finns alltid att hämta från Swerecos hemsida, under respektive produktflik.
<https://www.swereco.com/rorelsehjalpmedel/forflyttningshjalpmedel/eva>