


Uppresningsstöd Eva

Art nr: 151066, 151068

Avsedd användning: EVA är ett mönsterskyddat uppresningsstöd som kan användas som vändhandtag samt som stöd vid i- och urstigning ur säng. EVA kan användas av privata brukare samt av brukare inom vården.

Produktvarianter

Modell	Art.nr	Höjd	Vikt
Eva Låg	151066 (Består av 151060+151062)	85 cm	11,5 kg
Eva Hög	151068 (Består av 151060+151064)	97 cm	11,8 kg

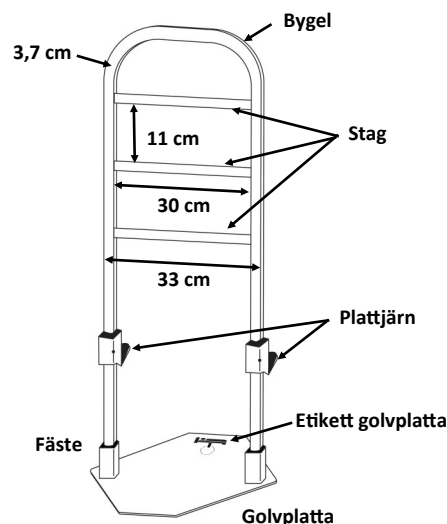

Beståndsdelar

Golvplatta (Art.nr 151060, bredd 35 cm): 8,4 kg
Bygel Låg (Art.nr 151062, höjd 85 cm): 3,1 kg
Bygel Hög (Art.nr 151064, höjd 97 cm): 3,4 kg
Bygelhållare (fäste) (Art.nr 15106020)
Etiket golvplatta (Art.nr 15106030)

Reservdelar

Insexskruv M8x16 mm, svart (Art.nr 15106022)
Insexnyckel NV4 mm (Art.nr 15106023)
Rondell D90 gummi (Art.nr 15100013)
Antiglid 74x20x2 mm (Art.nr 15106025)
Plaststyrning (Art.nr 11171004)
Magnet förosexnyckel (Art.nr 15106026)
Eva distans (Art.nr 15106028)
Etiket golvplatta (Art.nr 15106030)

Teknisk data

- Maximal brukarvikt: 150 kg
- Material: Pulverlackerade stålrör, plaststyrningar i POM och rondeller/antiglid i EPDM-gummi
- Förväntad livslängd är 5 år vid normal användning i enlighet med denna bruksanvisning. Livslängden kan förlängas genom regelbunden inspektion och underhåll utförd av behörig personal.
- Förvaring: Rumstemperatur
- Återvinning och avfall: Ytteremballage sorteras som wellpapp och uppresningsstödet, bygel och golvplatta sorteras som metallskrot.

Säkerhetsanvisningar

Läs säkerhetsanvisningarna noggrant innan ni använder produkten.

⚠️ Avsedd användning

Observera att EVA endast är avsedd att användas som uppresningsstöd. Den skall inte användas som skydd för att förhindra att en person rullar ur sängen.

⚠️ Riskbedömning av brukare

Innan uppresningsstödet monteras skall brukarens fysiska och kognitiva förmåga riskbedömas av förskrivaren. Nedsatt kognition, balans eller muskeltonus kan påverka användningen och medföra säkerhetsrisker. Förskrivaren skall göra regelbundna riskbedömningar för att säkerställa att uppresningsstödet är fortsatt lämpligt för brukaren över tid.

⚠️ Säker sittposition vid uppresning

Förskrivaren skall säkerställa att brukaren kan sitta stadigt på sängkanten med god kontakt med båda fötterna i golvet vid uppresning. Detta är en förutsättning för säker användning.

⚠️ Korrekt montering av golvplatta

Kontrollera att golvplattan är monterad med skruvarna pekandes in mot sängen, se instruktion och bild under "Montering av bygel och fästen" på sida 2.

⚠️ Sängkompatibilitet

Observera att vissa sängkonstruktioner, exempelvis sängar med mjuka madrasser, madrasser som har en otillräcklig kantstabilitet (sängens ytterkant ger efter när man sitter eller ligger nära kanten) eller särskilda ramkonstruktioner, kan göra det omöjligt att använda uppresningsstöd EVA på ett säkert sätt.

⚠️ Kontrollera eventuell glipa

Om det uppstår en glipa mellan säng och uppresningsstöd som överstiger 4 cm (se bild C och bild D på sida 2) eller att uppresningsstödet inte är stabilt, **skall inte** uppresningsstöd EVA användas i kombination med den aktuella sängen.

⚠️ Användning på ställbara sängar

Uppresningsstöd EVA skall inte installeras på justerbara/ställbara sängar eller i kombination med elryggstöd. Undantag är om den justerbara/ställbara sängen är låst i horisontalläge och utan någon möjlighet att ändra position. Säkerställ att sängen inte kan justeras oavsiktligt. Riskbedömning skall göras av behörig personal vid installation.

⚠️ Ej avsedd för sängar med medar

Stödet skall inte användas med sängar som har medar eftersom dessa kan glida eller tippa vid belastning. Byt ut medarna mot fyra stabila sängben före montering.

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2024-01 ver 05

Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.
<https://www.swereco.com/rorelsehjalpmedel/forflyttningshjalpmedel/eva>

⚠ Kombination med andra hjälpmedel

Vid samtidig användning av andra hjälpmedel, t.ex. förflyttningshjälpmedel, skall en riskbedömning göras av förskrivaren för att undvika olyckor.

⚠ Användning i kombination med glidlakan

Felaktigt bäddade glidlakan kan skapa sidoglidning och öka risken för klämskador, särskilt om uppresningsstödet är instabilt eller felmonterat. Förskrivaren skall alltid bedöma klämriskerna och avgöra om kombinationen är säker i den aktuella sängen.

⚠ Användning med förhöjningsklossar

Om sängen är utrustad med förhöjningsklossar, skall dessa omsluta och sitta fast runt sängens ben.

⚠ Användning tillsammans med dävert

Vid användning av dävert, säkerställ att EVAs golvplatta inte hamnar på dävertens golvplatta för att säkerställa stabiliteten på uppresningsstödet.

⚠ Ej avsedd för små barn

Stödet är inte avsett för små barn och får inte användas som leksak eller klätterstege.

⚠ Vid osäkerhet kring montering

Följ alltid bruksanvisningen noggrant. Vid osäkerhet, kontakta återförsäljare eller Swerecos kundsupport.

⚠ Vid tillbud eller fel

Vid tillbud eller misstänkt funktionsfel skall detta omgående rapporteras till tillverkaren och vid allvariga incidenter, även till relevant myndighet enligt gällande regelverk.

Monteringsanvisning

Swereco kan inte garantera säkerhet eller funktion om produkten används, modifieras eller monteras på annat sätt än vad som anges i denna bruksanvisning. Följ därför instruktionerna noggrant.

Produkten skall endast användas enligt avsedd användning och monteras vid en säng.

Kontrollera sängens konstruktion före montering

Vissa sängar är inte lämpliga att använda tillsammans med uppresningsstöd EVA. Detta gäller särskilt sängar med:

- Mjuka madrasser.
- Madrasser med otillräcklig kantstabilitet där ytterkanten sjunker ihop när man sitter eller ligger nära kanten.
- Speciella ramkonstruktioner. Kontrollera att sängramen är stabil. Bredden på sängramen ska vara 2–8 cm. Detta för att säkerställa att stödets fästen ska kunna monteras korrekt så att stödet sitter stabilt mot sängen.

Montering och säkerhet

För förskrivna produkter: Installation skall utföras av behörig personal. Vid osäkerhet – kontakta återförsäljare eller Swerecos kundsupport.

⚠ EVA i kombination med enkelsäng

När EVA ska monteras på en enkelsäng skall sängen alltid placeras med en långsida mot en vägg.


- Avståndet mellan sängens huvudände och bygel (se markerat avstånd i bild A) skall vara **mindre än 4 cm** eller **mer än 32 cm** för att minimera klämrisk.
- Undvik lösa föremål såsom mattor eller möbler i närheten av uppresningsstödet som kan utgöra en snubbelrisk.

Montering av bygel och fästen

1. Trä på de två fästena på bygel. Plattjärnen som senare skall monteras under sängen skall vara riktade uppåt och vara försedda med antiglidband.
2. Tryck ned bygel i golvplattans fästen. **Observera att plattjärnen skall vara på samma sida som skruvarna på golvplattans fästen, se bild B.**
3. Säkerställ att bygel är ordentligt nedtryckt i fästena och dra åt skruvarna på golvplattans fästen ordentligt med den medföljande insexnyckeln. Stödet får då en lätt lutning.
4. Placera golvplattan med skruvarna och plattjärnen in mot sängen, **etiketten på golvplattan skall placeras under sängen**. Skjut in stödet och dra upp fästena mot sängramen, bygel skall sitta dikt an mot sängen och ha en svag lutning inåt.
5. Dra åt skruvarna på fästena ordentligt med den medföljande insexnyckeln. Felaktigt/otillräckligt åtdragna skruvar kan orsaka instabilitet.
6. Fäst insexnyckeln på magneten som sitter på insidan av golvplattans fäste för lätt åtkomst.
7. Säkerställ att stödet sitter stabilt mot sängen samt att avståndet mellan madrass och bygel aldrig överstiger 4 cm både utan och vid belastning, se bild C och bild D.

⚠ Kontrollera avståndet/glipan mellan säng och uppresningsstöd genom att belasta sängen. Belasta sängen genom att sätta dig med båda fötterna i golvet vid uppresningsstödet och kontrollera att stödet sitter tätt mot sängen.

Om avståndet/glipan är större än 4 cm skall EVA inte användas i kombination med den aktuella sängen.

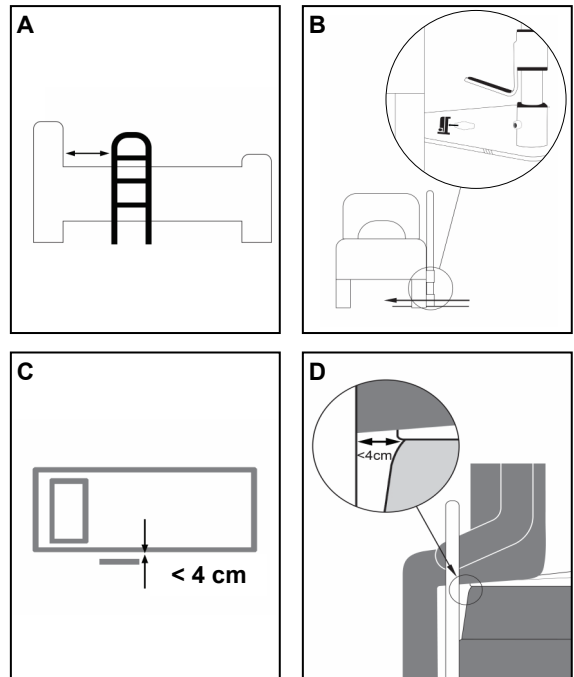

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2024-01 ver 05

Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.
<https://www.swereco.com/rorelsehjelpmedel/forflyttningshjelpmedel/eva>

Säkerhetskontroll

- Kontrollera alltid att monteringen är korrekt, både vid installation och regelbundet under användning.

Rengöring och rekonditionering

- Rengör stödet med mild tvällösning (pH 5–9) eller 70 % isopropanol. Använd inte etanol då det kan skada plastdetaljer.
- Produkten kan desinficeras i avsedd desinfektionsutrustning vid 85 °C i minst 3 minuter.
- Produkten skall rekonditioneras mellan varje brukare vilket inkluderar fullständig kontroll och byte av slitna/skadade delar.

Underhåll

Kontrollera regelbundet att:

- Alla skruvar är åtdragna.
- Inga skador finns på produkten.
- Att antiglidbanden på fästena samt rondellerna under golvplattan sitter på plats och inte är slitna. Byt dessa vid behov.
- Byt etikett golvplatta vid behov och säkerställ att den placeras korrekt på golvplattan (se bild B).
- Uppresningsstödet är stabilt.
- Ingen glipa större än 4 cm finns mellan säng och uppresningsstödet, både vid och utan belastning.



Produktens partinummer



Produktens utgångsdatum



Produktens artikelnummer



Produkten är en medicinteknisk produkt



Varning



Produkten är CE-märkt i enlighet med Förordning (EU) 2017/745



Konsultera bruksanvisning



Tillverkare

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2024-01 ver 05

Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.
<https://www.swereco.com/rorelsehjalpmedel/forflyttningshjalpmedel/eva>