


Uppresningsstöd Eva

Art nr: 151066, 151068

Avsedd användning: EVA är ett mönsterskyddat uppresningsstöd som kan användas som vändhandtag samt som stöd vid i- och urstigning ur säng. EVA kan användas av privata brukare samt av brukare inom vården.

Produktvarianter

Modell	Art.nr	Höjd	Vikt
Eva Låg	151066 (Består av 151060+151062)	85 cm	11,5 kg
Eva Hög	151068 (Består av 151060+151064)	97 cm	11,8 kg

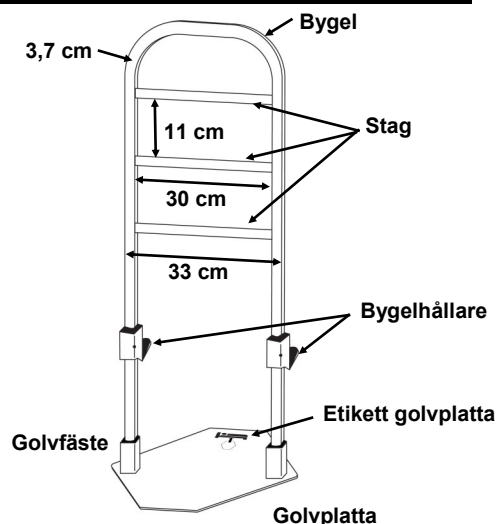

Teknisk data

Maximal brukarvikt: 150 kg

Material: Pulverlackerade stålrör, plaststyrningar i POM och rondeller/antiglid i EPDM-gummi

Förväntad livslängd är 5 år vid normal användning i enlighet med denna bruksanvisning. Livslängden kan förlängas genom regelbunden inspektion och underhåll utförd av behörig personal.

Förvaring: Rumstemperatur

Återvinning och avfall: Ytteremballage sorteras som wellpapp och uppresningsstödet (bygel och golvplatta) sorteras som metallsrot.

Reservdelar

Insexskruv M8x16 mm, svart (Art.nr 15106022)

Insexnyckel NV4 mm (Art.nr 15106023)

Rondell D90 gummi (Art.nr 15100013)

Antiglid 74x20x2 mm (Art.nr 15106025)

Plaststyrning (Art.nr 11171004)

Magnet för insexnyckel (Art.nr 15106026)

Eva distans (Art.nr 15106028)

Etikett golvplatta (Art.nr 15106030)

Bygelhållare (Art.nr 15106020)

Beståndsdelar

Golvplatta (Art.nr 151060, bredd 35 cm): 8,4 kg

Bygel Låg (Art.nr 151062, höjd 85 cm): 3,1 kg

Bygel Hög (Art.nr 151064, höjd 97 cm): 3,4 kg

Bygelhållare (Art.nr 15106020)

Etikett golvplatta (Art.nr 15106030)



Det föreligger en klämrisk vid användning av denna produkt. Klämrisker uppstår om det skapas en glipa mellan säng och uppresningsstöd. Se vidare information i denna bruksanvisning.

Säkerhetsanvisningar

Läs säkerhetsanvisningarna noggrant innan ni använder produkten.

⚠ Felaktig användning

Observera att EVA endast är avsedd att användas som uppresningsstöd vid säng. Den skall inte användas som skydd för att förhindra att en person rullar ur sängen.

⚠ Riskbedömning av brukare

Innan uppresningsstödet monteras skall brukarens fysiska och kognitiva förmåga riskbedömas av förskrivaren. Nedsatt kognition, balans eller muskeltonus kan påverka användningen och medföra säkerhetsrisker. Förskrivaren skall göra regelbundna riskbedömningar för att säkerställa att uppresningsstödet är fortsatt lämpligt för brukaren över tid.

⚠ Säker sittposition vid uppresning

Förskrivaren skall säkerställa att brukaren kan sitta stadigt på sängkanten med god kontakt med båda fötterna i golvet vid uppresning. Detta är en förutsättning för säker användning.

⚠ Korrekt montering av golvplatta

Kontrollera att golvplattan är monterad med skruvarna på golvfästena pekandes in mot sängen, se "Monteringsanvisning".

⚠ Sängkompatibilitet

Observera att vissa sängkonstruktioner, exempelvis sängar med madrasser som har en otillräcklig kantstabilitet (sängens ytterkant ger efter när man sitter eller ligger nära kanten), kan göra det omöjligt att använda uppresningsstöd EVA på ett säkert sätt. Mjuka madrasser ökar klämrisker.

⚠ Kontrollera eventuell glipa

Om det uppstår en glipa mellan säng och uppresningsstödet ökar risken för klämskador ju större glipan är. Riktvärde: glipan skall vara mindre än 4 cm, se bild C och D.

⚠ Användning på ställbara sängar

Uppresningsstöd EVA skall inte installeras på justerbara/ställbara sängar eller i kombination med elryggstöd. Undantag är om den justerbara/ställbara sängen är låst i horisontalläge och utan någon möjlighet att ändra position. Säkerställ att sängen inte kan justeras oavsiktligt. Riskbedömning skall göras av behörig personal vid installation.

⚠ Ej avsedd för sängar med medar

Stödet skall inte användas med sängar som har medar eftersom dessa kan glida eller tippa vid belastning. Byt ut medarna mot fyra stabila sängben före montering.

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2024-01 ver 06

Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.
<https://www.swereco.com/rorelsehjelpmedel/forflyttningshjelpmedel/eva>

⚠ Kombination med andra hjälpmedel

Säkerställ att en riskbedömning görs när uppresningsstöd EVA används i kombination med andra hjälpmedel som t.ex. förhöjningsklossar och glidlakan.

⚠ Användning med förhöjningsklossar

Om sängen är utrustad med förhöjningsklossar, skall dessa omsluta och sitta fast runt sängens ben.

⚠ Användning tillsammans med däck

Vid användning av däck, säkerställ att EVAs golvplatta inte hamnar på däckets golvplatta för att säkerställa stabiliteten på uppresningsstödet.

⚠ Ej avsedd för små barn

Stödet är inte avsett för små barn och får inte användas som leksak eller klätterstege.

⚠ Vid osäkerhet kring montering

Följ alltid bruksanvisningen noggrant. Vid osäkerhet, kontakta återförsäljare eller Swerecos kundsupport.

⚠ Vid tillbud eller fel

Vid tillbud eller misstänkt funktionsfel skall detta omgående rapporteras till tillverkaren och vid allvariga incidenter, även till relevant myndighet enligt gällande regelverk.

Monteringsförberedelser

Swereco kan inte garantera säkerhet eller funktion om produkten används, modifieras eller monteras på annat sätt än vad som anges i denna bruksanvisning. Följ därför instruktionerna noggrant.

Kontrollera sängens konstruktion före montering

Vissa sängar är inte lämpliga att använda tillsammans med EVA uppresningsstöd.





- Madrasser med otillräcklig kantstabilitet där ytterkanten sjunker ihop när man sitter eller ligger nära kanten.
- Kontrollera att sängramens bredd är 2–8 cm. Detta för att säkerställa att stödets bygelhållare kan monteras korrekt så att stödet sitter stabilt mot sängen.
- Vid montering på enkelsäng skall sängen alltid placeras med en långsida mot en vägg.

Monteringsanvisning

För förskrivna produkter: Montering skall utföras av behörig personal. Vid osäkerhet – kontakta återförsäljare eller Swerecos kundsupport.

- Avståndet mellan sängens huvudände och bygel (se markerat avstånd i bild A) skall vara **mindre än 4 cm** eller **mer än 32 cm** för att minimera klämrisk.
 - Undvik lösa föremål såsom mattor eller möbler i närheten av uppresningsstödet som kan utgöra en snubbelrisk.
1. Trä på de två bygelhållarna på bygel. Plattjärnen på bygelhållarna som senare skall monteras under sängen skall vara riktade uppåt och vara försedda med antiglidband, se bild B.
 2. Tryck ned bygel i golvplattans fästen. **Observera skruvarna på golvplattans fästen ska peka in under sängen, se bild B.**
 3. Säkerställ att bygel är ordentligt nedtryckt i golvplattans fästen och dra åt skruvarna ordentligt med den medföljande insexnyckeln. Stödet får då en lätt lutning in mot sängen.
 4. Skjut in golvplattan under sängen i enlighet med riktningen som anges på etiketten.
 5. Dra upp bygelhållarna mot sängramen och säkerställ att plattjärnen på bygelhållarna sitter mellan träribborna i sängbotten.
 6. Dra åt skruvarna på bygelhållarna ordentligt med den medföljande insex-nyckeln. Felaktigt/otillräckligt åtdragna skruvar kan orsaka instabilitet.
 7. Om en bygelhållare hamnar ovanpå en ribba, skall uppresningsstöds stabilitet säkerställas innan användning. Om stödet inte sitter stabilt skall det inte användas i kombination med den aktuella sängen.
 8. Fäst insexnyckeln på magneten som sitter på insidan av golvplattans fäste för lätt åtkomst.
 9. Säkerställ att stödet sitter stabilt mot sängen samt att avståndet mellan madrass och bygel inte skapar en glipa både vid och utan belastning. Riktvärde: glipan ska vara mindre än 4 cm, se bild C och D.

⚠ Kontrollera avståndet/glipan mellan säng och uppresningsstöd genom att belasta sängen. Belasta sängen genom att sätta dig med båda fötterna i golvet vid uppresningsstödet och kontrollera att stödet sitter tätt mot sängen.

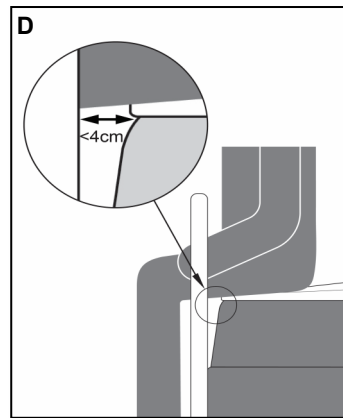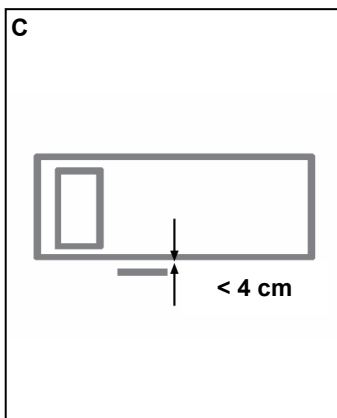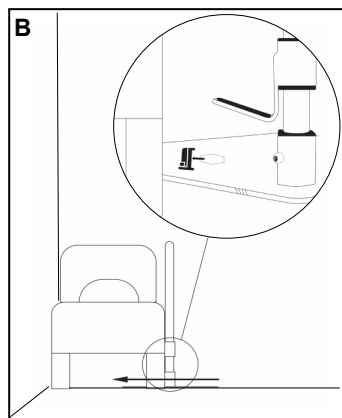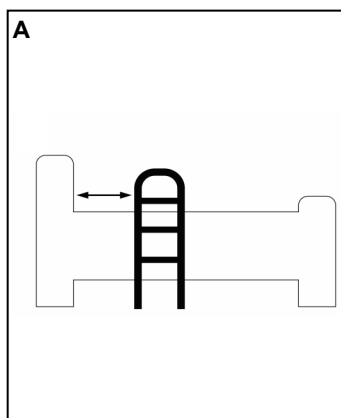

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2024-01 ver 06

Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.
<https://www.swereco.com/rorelsehjelpmedel/forflyttningshjelpmedel/eva>

Säkerhetskontroll

- Kontrollera alltid att installationen är korrekt, både vid montering och regelbundet under användning.

Rengöring och rekonditionering

- Rengör stödet med mild tvällösning (pH 5–9) eller 70 % isopropanol. Använd inte etanol då det kan skada plastdetaljer.
- Produkten kan desinficeras i avsedd desinfektionsutrustning vid 85 °C i minst 3 minuter.
- Produkten skall rekonditioneras mellan varje brukare vilket inkluderar fullständig kontroll och byte av slitna/skadade delar.

Underhåll

Kontrollera regelbundet att:

- alla skruvar är åtdragna.
- inga skador finns på produkten.
- att antiglidbanden på bygelhållarens plattjärn samt rondellerna under golvplattan sitter på plats och inte är slitna. Byt dessa vid behov.
- byt golvplattans etikett vid behov och säkerställ att den placeras korrekt på golvplattan (se bild B).
- uppresningsstödet är stabilt.
- ingen glipa större än 4 cm finns mellan säng och uppresningsstödet, både vid och utan belastning.



Produktens partinummer



Produktens utgångsdatum



Produktens artikelnummer



Produkten är en medicinteknisk produkt



Varning



Produkten är CE-märkt i enlighet med Förordning (EU) 2017/745



Konsultera bruksanvisning



Tillverkare

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2024-01 ver 06

Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.
<https://www.swereco.com/rorelsehjalpmedel/forflyttningshjalpmedel/eva>