


Gåstativ Beta

Art nr: 122200, 122210, 122220

Avsedd användning: Gåstativ Beta är ett fristående gångstöd som är avsett att användas av personer med nedsatt rörelseförmåga, balansstörning eller gångsvårigheter.

Produktvarianter

Modell	Art.nr	Höjd	Max brukarvikt
Gåstativ Beta Vuxen	122200	85-97 cm	120 kg
Gåstativ Beta Junior	122210	73-85 cm	120 kg
Gåstativ Beta Barn	122220	60-72 cm	70 kg

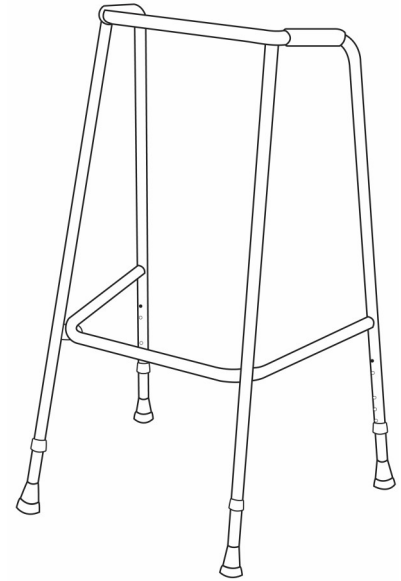

Teknisk data

- Material: aluminium, miljöanpassad PVC (handtag), gummi (doppskor)
- Förväntad livslängd är 5 år vid normal användning i enlighet med denna bruksanvisning. Livslängden kan förlängas genom regelbunden inspektion och underhåll utfört av behörig personal.
- Förvaring: Rumstemperatur
- Återvinning och avfall: Metallsrot, emballage består av wellpapp. Sorteras efter lokal anvisning.

Reservdelar

Doppsko 19-20 mm (120750)
Handtag till Beta (12220018)

Säkerhetsanvisning

- Produkten är utformad för att användas enligt instruktionerna och är endast avsedd för inomhusbruk på plana ytor. Swereco ansvarar inte för skador eller problem om produkten används, ändras eller hanteras på ett sätt som inte överensstämmer med denna bruksanvisning.
- Kontrollera regelbundet att tapparna för höjdjustering fjädrar tillbaka. Vid tecken på att höjdjusteringen inte fungerar korrekt ska produkten omedelbart tas ur bruk och skickas in för överyn/service.
- Säkerställ att alla fyra ben är i kontakt med marken vid belastning och rörelseförflyttning. Gåstativet får inte användas på mattor som kan glida.
- Kontrollera regelbundet att stödfötter (doppskor) inte är utslitna eller skadade. Skadade och utslitna stödfötter ska bytas ut mot nya, vilka kan beställas från Swereco.
- Produkten ska inte användas om det finns några skador på aluminiumrören, som till exempel sprickor, deformationer eller klämda partier, eller om andra skador på gångstödet upptäcks.
- Produkten skall ej belastas med saker ex. klädesplagg, väskor eller liknande.
- Produkten skall ej användas som en leksak.

- Vid förflyttning över trösklar, var uppmärksam på att gåstativet skall lyftas över tröskeln och att alla fyra ben ska sättas ned på golvet samtidigt
- Förskrivaren skall utföra en riskbedömning av brukarmiljö där produkten ska användas.
- Produkten skall ej användas på vått underlag pga halkrisk.
- Handtaget ska inte rotera vid normal användning. Viss rörlighet kan dock förekomma. Om handtaget roterar när stödet greppas, ska produkten inte användas.
- Vid tillbud eller misstänkt funktionsfel ska detta omgående rapporteras till tillverkaren och, vid allvarliga incidenter, även till relevant myndighet enligt gällande regelverk.

Rengöring och rekonditionering

- Rengör produkten regelbundet med en mild tvållösning (pH 5–9) eller 70% isopropanol. Använd ej etanol då det kan skada plastdetaljer.
- Produkter ska rekonditioneras mellan varje brukare, vilket inkluderar en fullständig kontroll och byte av eventuellt utslitna eller skadade komponenter. Desinficera vid behov i avsedd desinfektionsutrustning vid 85°C i minst 3 minuter för att säkerställa hygienisk användning.

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2024-02 ver 02


Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.
<https://www.swereco.com/rorelsehjelpmedel/4-punktsstod/gabockar-gastativ>

Användaranvisning

Säkerställ att benen är inställd på anpassad höjd för brukaren, alla fyra ben ska belastas lika vid användning. Innan höjjustering utförs försäkra att gångstödet står på en plan yta. Notera: Gångstödet är enbart avsett att användas inomhus!

För justering av höjd:

1. Tryck in höjjusteringstappen på benet och justera höjden genom att förkorta eller förlänga nedre delen av benet.
2. Stoppa vid lämplig höjd och säkerställ att höjjusteringstappen fjädrar tillbaka ut genom hålet.
3. Utför samma höjdställning av de andra benen och kontrollera att gångstödet står plant på golvet.
4. Kontrollera att stödfötterna inte är skadade eller utslitna före användning. Skadade/utslitna stödfötter skall bytas ut mot nya.

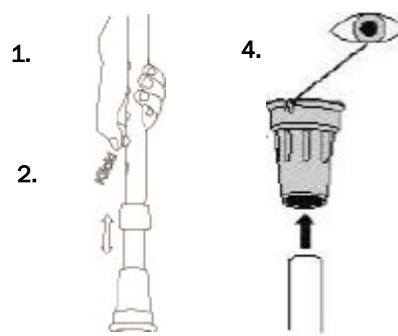

Produktens partinummer



Produktens utgångsdatum



Produktens artikelnummer



Produkten är en medicinteknisk produkt



Maximal brukarvikt vid användning av produkt



Produkten är CE-märkt i enlighet med med Förordning (EU) 2017/745



Konsultera bruksanvisning



Tillverkare



SRN SE-MF-000033314

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2024-02 ver 02

Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.
<https://www.swereco.com/rorelsehjalpmedel/4-punktsstod/gabockar-gastativ>