

StaplaLätt och Robust

Art nr: 144202, 144204, 144400

Avsedd användning: Produkten är en fristående toaforhöjning som är avsedd att användas som uppresningshjälp, tillåta en högre sitthöjd eller användas av brukare som har svårt att ta sig till toaletten. Produkten kan användas av brukare med balansstörning eller uppresningssvårigheter.

Produktvarianter

Modell	Art.nr	Höjd (H)	Vikt
StaplaLätt	144202	46-62 cm	5,4 kg
StaplaLätt mindre	144204	42-57 cm	5,2 kg
Robust	144400	45-55 cm	12,4 kg

Tillbehör

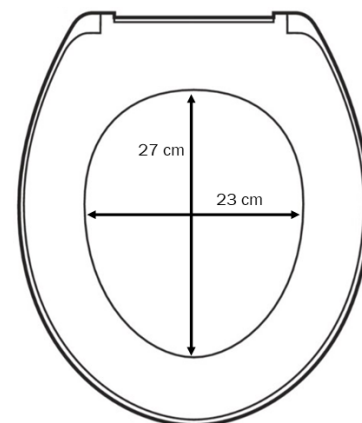
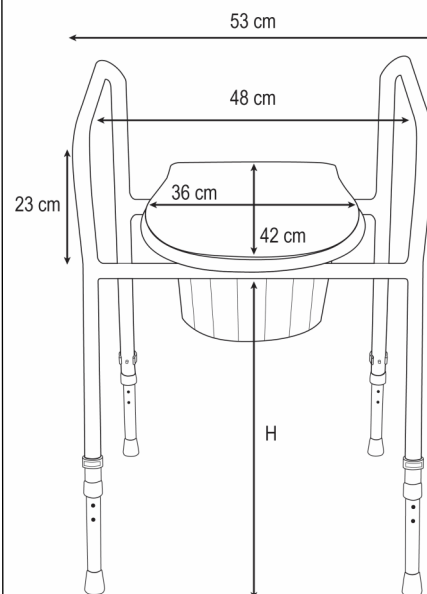
- Ryggstöd (Art nr 144206)
- Ryggstöd Robust (Art nr 142143)
- Mjuksits (Art nr 144210)
- Lockstödsband (Art nr 144785)
- Hink (Art nr 144755)
- Hink med handtag (Art nr 144760)

Reservdelar

- Stödfot, grå (Art nr 120700)
- Stödfot, vit (Art nr 120701)
- Lockfäste (Art nr 14420208)
- Toasits (Art nr 14420206)
- Stänkskydd (Art nr 144750)
- Clips 25 mm (Art nr 14420213)
- Förlängarpåse (Art nr 14420225-S)
- Stödfot, Robust (Art nr 120702)
- Sits och lock, Robust (Art nr 14440005)
- Stänkskydd Robust (Art nr 144405)
- Fäste till Robust (Art nr 14440006)

Tekniska data

- Maximal brukarvikt: 160 kg StaplaLätt/StaplaLätt mindre, 300 kg Robust
- Material: Pulverlackerat stålstativ, förlängarben i aluminium, sits/hink/stänkskydd i PP, stödfötter av TRP gummi, lockfäste i POM
- Förväntad livslängd är 5 år vid normal användning i enlighet med denna bruksanvisning. Livslängden kan förlängas genom regelbunden inspektion och underhåll utfört av behörig personal.
- Förvaring: rumstemperatur
- Återvinning och avfall: Ytteremballage sorteras som wellpapp, toaforhöjarens stativ sorteras som metallskrot, plast sorteras som



SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2024-09 ver 03

Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.
<https://www.swereco.com/hjalpmedel-i-hemmet/toalettbesok/toaforhojningar>

Säkerhetsanvisningar

- För förskriven produkt: riskbedömning ska utföras gällande användarens behov, fysiska status, samt av användarmiljön innan produkten tas i bruk.
- För privatpersoner: Om du är osäker på installationen eller har frågor, kontakta återförsäljaren där du köpte produkten eller Swerecos kundsupport för hjälp.
- Vid montering och demontering av clipsen, läs noggrant igenom monteringsanvisningarna för en säker installation.
- Inga verktyg får användas vid borttagning av clips.
- Produkten skall ej brukas på annat sätt än vad som är avsett. Inga egna anpassningar av produkten är tillåtna.
- Toalettlocket får ej användas som ryggstöd.
- Om stolen används fristående skall den placeras med ryggen mot en vägg alternativt ska ryggstöd användas.
- Stolen skall placeras så att stolens fyra ben står stadigt mot golvet.
- Stolen skall belastas jämnt på båda sidor för att minimera tipp-risk.
- Stolen får inte flyttas när brukaren sitter på den. Detta kan leda till att aluminiumrören böjs eller går av, vilket kan orsaka skada eller påverka stolens stabilitet.
- Produkten får ej användas vid tecken på skador. Kontrollera produkten regelbundet enligt underhållsanvisningar.
- Slitna stödfötter kan innebära försämrat grepp och ska bytas ut mot nya.

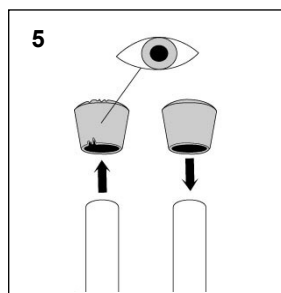
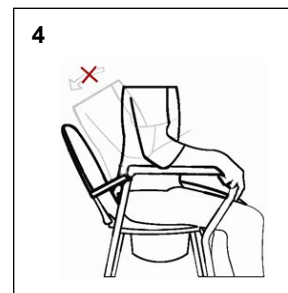
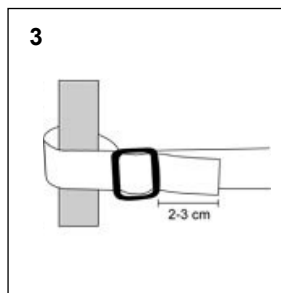
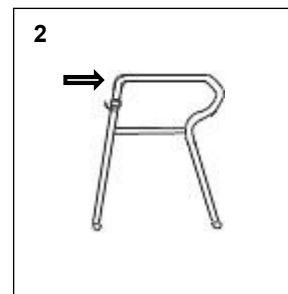
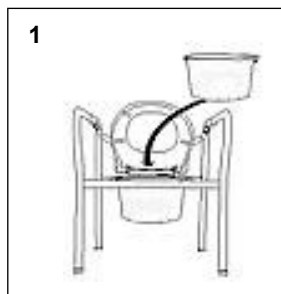
- Trasiga clips kan medföra en allvarlig risk om förlängarbenet inte sitter ordentligt. Kontrollera regelbundet att clipsen är hela. Om skador upptäcks ska clipsen alltid bytas ut innan produkten får användas igen.
- Om aluminiumröret har skador får produkten inte användas, eftersom detta kan kraftigt försvaga dess stabilitet.
- Den ställbara foten (vit) skall ej skruvas till ändläge då produktens stabilitet försämras.
- Undvik att belasta toalettstolens fot i framkant, då detta kan leda till sprickbildning och skador på produkten, vilket ökar risken för klämning.
- Vid tillbud eller misstänkt funktionsfel ska detta omgående rapporteras till tillverkaren och, vid allvarliga incidenter, även till relevant myndighet enligt gällande regelverk.

Demonteringsanvisningar

- Clipsen ska alltid tas bort för hand och de ska dras rakt ut, ej bändas bort. Använd inte verktyg, som skruvmejslar, för att bända loss clipsen. Detta kan skada clipsen eller andra delar av produkten.
- Kapning Robust: Stolens ben får kapas av behörig personal (hjälpmedelstekniker på hjälpmedelscentral) utan att stolens egenskaper försämras. Stolens ben får kapas så stolen står plant, höjd 55 cm ner till 45 cm.

Monteringsanvisningar

- Justera produkten till rätt höjd så att den passar användarens behov.
- Kontrollera att produktens samtliga delar är hela innan montering.
- Säkerställ att det är rätt variant av clips.
- Clipsen ska monteras för hand genom att tryckas in tills ett hörbart klick bekräftar att de sitter korrekt (figur 1).
- Säkerställ att clipset tryckts in hela vägen och att tapen gått igenom båda hålen i förlängarröret och sticker ut på motstående sida.
- Finjustera den ställbara foten så att toalettstolens fot står plant (figur 2).
- Stolen får inte höjjusteras så att den endast står på två ben, eftersom den maximala brukarvikten är beräknad för användning med alla fyra benen i kontakt med golvet.
- Montera stängskyddet som bilden visar (figur 3).
- Coxit-ställning är tillåten för en lutande produkt, men de främre förlängarbenen får vara maximalt två hål lägre än de bakre benen (figur 4).
- Vid montering av lockstödsband, placera bandet runt armstödet. Dra i flärpen tills den sticker ut 2–3 cm. Kontrollera att bandet inte är monterat för långt ut på armstödet.
- Om stolen används fristående skall den placeras med ryggen mot en vägg alternativt ska ryggstöd användas. Toalettlocket får ej användas som ryggstöd (figur 5).
- Innan användning, säkerställ att toalettstolens fot står stabilt.

**SWERECO**

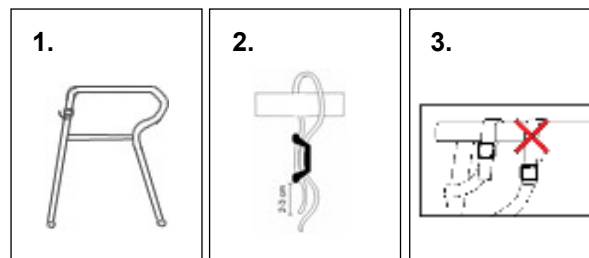
Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2024-09 ver 03

Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.
<https://www.swereco.com/hjalpmedel-i-hemmet/toalettbesok/toaforhojningar>

Monteringsanvisning, art nr 144785 lockstödsband

- Montera fast lockstödsbandet runt armstödet (figur 1)
- Dra i flärpen så att bandet sticker ut 2-3 cm (figur 2)
- Se till att lockstödsbandet inte monteras för långt ut på armstödet (figur 3)

**Rengöring och rekonditionering**

- Rengör produkten regelbundet med en mild tvällösning (pH 5–9) eller 70% isopropanol. Använd ej etanol då det kan skada plastdetaljer.
- Produkter ska rekonditioneras mellan varje brukare, vilket inkluderar en fullständig kontroll och byte av eventuellt utslitna eller skadade komponenter. Desinficera vid behov i avsedd desinfektionsutrustning vid 85°C i minst 3 minuter för att säkerställa hygienisk användning.

Underhåll

- Kontrollera regelbundet att toaförhöjaren är stabil samt att aluminium- och stålrören inte har skador samt att alla komponenter är hela. Byt ut slitna delar vid behov.
- Byt till nya clips efter genomförd rekonditionering av produkten.
- Vid byte av clips, säkerställ att det är rätt modell (flera storlekar finns).

Återvinning

- När produktens livslängd är uppnådd eller om den är skadad ska den kasseras som metallsrot.

LOT Produktens partinummer**REF** Produktens artikelnummer**MD** Produkten är en medicinteknisk produkt Produktens utgångsdatum Maximal brukarvikt**CE** Produkten är CE-märkt i enlighet med med Förordning (EU) 2017/745 Konsultera bruksanvisning Varning Tillverkare SRN SE-MF-000033314**SWERECO**

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2024-09 ver 03

Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.
<https://www.swereco.com/hjalpmedel-i-hemmet/toalettbesok/toaforhojningar>