

Kryckkäpp Ergo

Avsedd användning: Kryckkäpp Ergo är avsedd att brukas som gångstöd för personer med nedsatt rörelsefunktion

Benämning kryck-käpp	Artikelnummer	Material (handtag)	Krycklängd (cm)	Max brukar-vikt (kg)	Produktvikt (kg)	Monterad isdubb
Flex rak mjuk	127200	TPE	75-97	140	0,6	-
Flex rak mjuk kort	127210	TPE	58-80	140	0,5	-
Flex rak mjuk lång	127250	TPE	90-112	120	0,6	-
Flex rak mjuk fastl.	127260	TPE	105	140	0,6	-
Flex Ergo H	127300	Polypropen	75-97	140	0,6	-
Flex Ergo H kort	127310	Polypropen	58-80	140	0,5	-
Flex Ergo H lång	127350	Polypropen	90-112	120	0,6	-
Flex Ergo H fastl.	127360	Polypropen	105	140	0,6	-
Flex Ergo H mjuk	127400	TPE	75-97	140	0,6	-
Flex Ergo H mjuk	127403	TPE	75-97	140	0,7	isdubb spets
Flex Ergo H mjuk kort	127410	TPE	58-80	140	0,5	-
Flex Ergo H mjuk lång	127450	TPE	90-112	120	0,7	-
Flex Ergo H mjuk lång	127453	TPE	90-112	120	0,7	isdubb spets
Flex Ergo H mjuk fastl.	127460	TPE	105	140	0,6	-
Flex Ergo V	127500	Polypropen	75-97	140	0,6	-
Flex Ergo V kort	127510	Polypropen	58-80	140	0,5	-
Flex Ergo V lång	127550	Polypropen	90-112	120	0,6	-
Flex Ergo V fastl.	127560	Polypropen	105	140	0,6	-
Flex Ergo V mjuk	127600	TPE	75-97	140	0,6	-
Flex Ergo V mjuk	127603	TPE	75-97	140	0,6	isdubb spets
Flex Ergo V mjuk kort	127610	TPE	75-97	140	0,5	-
Flex Ergo V mjuk	127650	TPE	75-97	140	0,6	-
Flex Ergo V mjuk	127653	TPE	75-97	140	0,7	isdubb spets
Flex Ergo V mjuk fastl.	127660	TPE	105	140	0,6	-

V — Vänster H — Höger

Artikel (Artikelnummer)	Tillbehör	Reservdelar
Doppsko 19-20 mm (120750/120750K)		x
Doppsko 21-23 mm (120760)		x
Isdubb Spets (123300/123300K)	x	x
Isdubb Kroma (123350/123350K)	x	
Kryckpolstring (124700)	x	
Käpphållare Flex (124885/124885K)	x	
Käpphållare Ingrid (257467)	x	
Käpphållare till krycka och käpp (158)	x	



SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2025-09 ver 02

Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.
<https://www.swereco.com/rorelsehjalpmedel/kryckkappar>

Tekniska data

- Material: kryckrör i aluminium, armbygel i PA akulon, doppsko i naturgummi, handtag se tabell på föregående sida.
- Förväntad livslängd: 3 år vid normal användning i enlighet med denna bruksanvisning.
- Förvaring: förvara produkten i rumstemperatur, skyddat från direkt solljus eller extrem värme/kyla. Rekommenderas att placeras stående eller liggande på en stabil yta för att förhindra att kryckan deformeras.
- Återvinning och avfall: kryckan återvinns som metallskrot.

Säkerhetsanvisningar

- ⚠ Produkten får endast användas enligt avsedd användning. Inga egna anpassningar av kryckan får göras.
- ⚠ Kryckans förväntade livslängd är tre år. Efter tre år bör inte kryckan användas, då det finns risk för utmattningsbrott om kryckan använts kontinuerligt under längre tid. Kryckans utgångsdatum är angivet på produktetiketten placerad på kryckkåpan.
- ⚠ Vid tecken på slitage eller skada på kryckan får den inte användas. Kontrollera regelbundet att tappen på höjdjusteringen inte glappar. Uppmärksammas detta får kryckan inte användas.
- ⚠ Kryckan får aldrig användas för att stoppa en hissdörr eller liknande då detta riskerar att kryckan skadas och kan gå av.
- Maximal brukarvikt enligt tabell ovan får ej överskridas (gäller även vid användning av två kryckor).
 - Vid snö- och isigt underlag, rekommenderas att isdubb används tillsammans med kryckan. Gå mycket försiktigt även med isdubb, då viss halkrisk kvarstår.
 - En blöt eller smutsig doppsko kan innebära halkrisk. Vid förflyttning från utomhus- till inomhusmiljö, tänk på att torka av doppskon vid behov.
 - Undvik om möjligt användning på lutande, ojämna eller hala underlag. Detta kan påverka kryckans grepp mot underlaget.
 - Använd hiss istället för trappor när det är möjligt. Låt förskrivaren demonstrera gång och säker användning av kryckan i trappa. Om en trappa måste användas, håll kryckan vertikalt och inte vinklad mot underlaget. Använd även räcket som extra stöd.

Inställningsanvisning

- Kryckan bör justeras av person med relevant kompetens för korrekt anpassning efter brukarens förutsättningar.
- Höjden justeras med tryckknappen, se figur 1. Kryckan ska stå i upprätt position vid justering.
- Armbågen bör ha en lätt böjning framåt/nedåt (ca 30°) vid korrekt höjd, se figur 2.
- Rådgör alltid med person med relevant kompetens vid frågor kring höjdjustering.
- Vid montering av isdubb Spets (art.nr 123300/123300K) eller Krona (art.nr 123350/123350K) se separat bruksanvisning som finns på Swerecos hemsida.

Användaranvisning

- Placera kryckan cirka 5–10 cm utanför och något framför foten för god stabilitet.
- Gå med jämn rytm och undvik att luta dig för mycket framåt eller åt sidorna.
- Använd kryckor enligt vårdgivarens instruktioner (en- eller tvåsidigt bruk, olika gångmönster vid partiell belastning, osv).
- Vid tillbud eller misstänkt funktionsfel ska detta omgående rapporteras till tillverkaren och, vid allvarliga incidenter, även till relevant myndighet enligt gällande regelverk.

Rengöring och rekonditionering

- Rengör kryckan med mild tvällösning (pH 5–9) och mjuk trasa regelbundet. Undvik starka kemikalier eller lösningsmedel då det kan skada produkten.
- Desinficera vid behov i avsedd desinfektionsutrustning vid 85°C i minst 3 minuter för att säkerställa hygienisk användning.
- Produkter som rekonditioneras ska inkludera en fullständig kontroll enligt instruktionen nedan.



Underhåll

Kontrollera regelbundet att:

- Doppskon inte är sliten eller skadad. En sliten eller skadad doppsko ska bytas ut.
- Tryckknappen för höjdjustering fjädrar tillbaka som den ska. Om tryckknappen inte fjädrar tillbaka ska kryckan tas ur bruk.
- Inga sprickor, deformationer eller andra tecken på slitage har uppstått på produkten. Hittas sprickor, deformationer eller andra tecken på slitage ska kryckan tas ur bruk.

Följande kryckor; 127260, 127360, 127460, 127560 samt 127660 kan kapas för att justera längden på kryckan. Det ska alltid utföras av behörig fackman

- Vid behov kan kryckröret kapas för att uppnå rätt längd.
- Detta görs genom att avlägsna doppskon och sedan kapa kryckröret nerifrån.
- Montera tillbaka doppskon korrekt genom att trycka den hela vägen till botten.

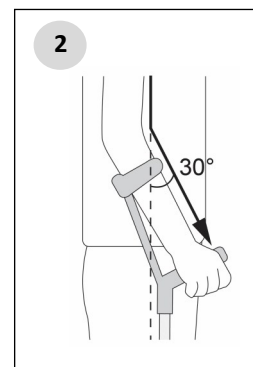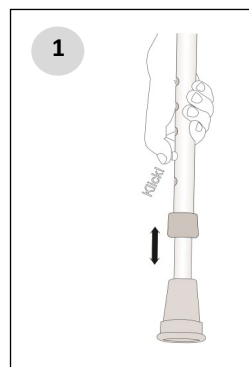

Produktens partinummer



Produkten är CE-märkt i enlighet med Förordning (EU) 2017/745



Produkten är en medicinteknisk produkt



Produktens utgångsdatum



Konsultera bruksanvisning



Tillverkare



Produktens artikelnummer



Maximal brukarvikt



Varning

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2025-09 ver 02

Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.
<https://www.swereco.com/rorelsehjelpmedel/kryckkappar>