

Kryckkäpp Reumatiker

Avsedd användning: Kryckkäpp Reumatiker är avsedd att brukas som gångstöd vid gång med båda benen.

Benämning kryckkäpp	Artikel-nummer	Krycklängd (cm)	Max brukar-vikt (kg)	Produktvikt (kg)	Monterad is-dubb
Reumatikerkryckkäpp Flex	126900	118	140	0,7	-
Reumatikerkryckkäpp Flex lång	126901	133	140	0,7	-

Observera att Kryckkäpp Reumatiker ej är avsedd att användas som gångstöd vid hoppande gång.

Artikel (Artikelnummer)	Tillbehör	Reservdelar
Doppsko 19-20 mm (120750/120750K)		x
Doppsko 21-23 mm (120760)		x
Isdubb Spets (123300/123300K)	x	
Isdubb Krona (123350/123350K)	x	



Tekniska data

- Material: kryckrör i aluminium, överdel i polyamid samt mjukpolstrad nylon, handtag i TPE, doppsko i naturgummi.
- Förväntad livslängd: 3 år vid normal användning i enlighet med denna bruksanvisning.
- Förvaring: förvara produkten i rumstemperatur, skyddat från direkt solljus eller extrem värme/kyla. Kryckan får inte förvaras långvarigt utomhus i minusgrader. Rekommenderas att placeras stående eller liggande på en stabil yta för att förhindra att kryckan deformeras.
- Återvinning och avfall: kryckan återvinns som metallsrot.

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2025-11 ver 01

Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.
<https://www.swereco.com/rorelsehjalpmedel/kryckkappar>

Säkerhetsanvisningar

- ⚠ Produkten får endast användas enligt avsedd användning. Inga egna anpassningar av kryckan får göras.
- ⚠ Kryckans förväntade livslängd är tre år. Efter tre år bör inte kryckan användas, då det finns risk för utmattning om kryckan använts kontinuerligt under längre tid. Kryckans utgångsdatum är angivet på produktetiketten placerad på kryckkåpen.
- ⚠ Vid tecken på slitage eller skada på kryckan får den inte användas. Kontrollera regelbundet att tappen på höjdjusteringen inte glappar. Uppmärksammas detta får kryckan inte användas.
- ⚠ Kryckan får aldrig användas för att stoppa en hissdörr eller liknande då detta riskerar att kryckan skadas och kan gå av.

- Maximal brukarvikt enligt tabell ovan får ej överskridas (gäller även vid användning av två kryckor).
- Vid snö- och isigt underlag, rekommenderas att isdubb används tillsammans med kryckan. Gå mycket försiktigt även med isdubb, då viss halkrisk kvarstår.
- En blöt eller smutsig doppsko kan innebära halkrisk. Vid förflyttning från utomhus- till inomhusmiljö, tänk på att torka av doppskon vid behov.
- Undvik om möjligt användning på lutande, ojämna eller hala underlag. Detta kan påverka kryckans grepp mot underlaget.
- Använd hiss istället för trappor när det är möjligt. Låt förskrivaren demonstrera gång och säker användning av kryckan i trappa. Om en trappa måste användas, håll kryckan vertikalt och inte vinklad mot underlaget. Använd även räcket som extra stöd.

Inställningsanvisning

- Kryckan bör justeras av person med relevant kompetens för korrekt anpassning efter brukarens förutsättningar.
- Höjden justeras med tryckknappen, se figur 1. Kryckan ska stå i upprätt position vid justering.
- Rådgör alltid med person med relevant kompetens vid frågor kring justering av kryckkåpen.

Justering av handtag, se figur 2 :

- Justera handtaget genom att lossa båda stjärnskruvarna (A) samt låsklossen (B) med insexnyckel 2,5 mm. Handtaget kan då skjutas framåt/bakåt samt vridas åt sidan.
- Lossa handtagsskruven (C) med insexnyckel 4 mm för att justera handtagets vinkel.
- Fäst alla skruvar ordentligt före användning.
- Vid montering av isdubb Spets (art.nr 123300/123300K) eller Krona (art.nr 123350/123350K) se separat bruksanvisning som finns på Swerecos hemsida.

Användaranvisning

- Placera kryckan cirka 5–10 cm utanför och något framför foten för god stabilitet.
- Gå med jämn rytm och undvik att luta dig för mycket framåt eller åt sidorna.
- Använd kryckan enligt vårdgivarens instruktioner (en- eller tvåsidigt bruk, olika gångmönster vid partiell belastning, osv).
- Vid tillbud eller misstänkt funktionsfel ska detta omgående rapporteras till tillverkaren och, vid allvarliga incidenter, även till relevant myndighet enligt gällande regelverk.



Rengöring och rekonditionering

- Rengör kryckan med mild tvållösning (pH 5–9) och mjuk trasa regelbundet. Undvik starka kemikalier eller lösningsmedel då det kan skada produkten.
- Desinficera vid behov i avsedd desinfektionsutrustning vid 85°C i minst 3 minuter för att säkerställa hygienisk användning.
- Produkter som rekonditioneras ska inkludera en fullständig kontroll enligt instruktionen nedan.

Underhåll

Kontrollera regelbundet att:

- Doppskon inte är sliten eller skadad. En sliten eller skadad doppsko ska bytas ut.
- Tryckknappen för höjdjustering fjädrar tillbaka som den ska. Om tryckknappen inte fjädrar tillbaka ska kryckan tas ur bruk.
- Inga sprickor, deformationer eller andra tecken på slitage har uppstått på produkten. Hittas sprickor, deformationer eller andra tecken på slitage ska kryckan tas ur bruk. Kontrollera alltid handtaget om kryckan fallit i marken.

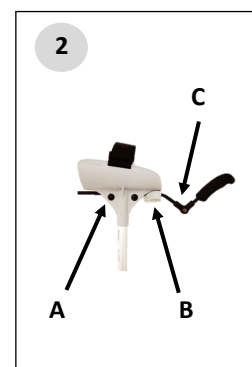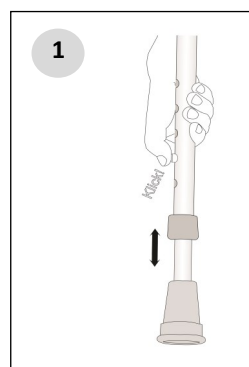

Produktens partinummer



Produkten är CE-märkt i enlighet med Förordning (EU) 2017/745



Produkten är en medicinteknisk produkt



Produktens utgångsdatum



Konsultera bruksanvisning



Tillverkare



Produktens artikelnummer



Maximal brukarvikt



Varning

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2025-11 ver 01

Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.
<https://www.swereco.com/rorelsehjelpmedel/kryckkappar>