

Sanifix absorberande boxertrosa

Art nr: 6401, 6402, 6403, 6404, 6405

Avsedd användning: Sanifix absorberande boxertrosa är en absorberande flergångsbyxa med hög kapacitet vid en funktionsnedsättning som droppinkontinens hos användaren.

Sanifix absorberande boxertrosa är en tvättbar, absorberande flergångsbyxa för barn. Produkten har ett fastsytt absorberande ilägg samt ett spärrskikt som förhindrar genomvättning och ger hög komfort och säkerhet. Byxan är tillverkad i mjuk bomull och är ett bra alternativ till engångsskydd vid droppinkontinens. Modellen passar särskilt bra för barn som har svårt att behålla engångsskydd på plats eller som är känsliga för klister, och bidrar till ökad rörelsefrihet och trygghet i vardagen. Byxan tål cirka 100 tvättar i 60 °C utan att förlora passform eller uppsugningsförmåga och den kan torktumlas på låg värme.



Produktvarianter

Modell	Art.nr	Höft	Midja	Benöppning	Vikt/produkt
3-4 år	6401	46-54 cm	40-50 cm	28-36 cm	39 g
5-6 år	6402	52-64 cm	44-60 cm	30-40 cm	47 g
7-8 år	6403	54-66 cm	50-64 cm	32-42 cm	50 g
9-10 år	6404	56-70 cm	54-68 cm	34-44 cm	52 g
11+ år	6405	64-84 cm	60-80 cm	36-46 cm	62 g

Teknisk data

- Material: 95% bomull och 5% spandex (byxan), 70% viskos och 30% polyester (absorptionsskikt), polyuretan (spärrskikt)
- Antal/förpackning: 1 st
- Färg: vit
- Krympning: <5%
- Förväntad livslängd: ca 100 tvättar i max 60°C
- Förvaring: rumstemperatur
- Återvinning och avfall: Textilåtervinning eller brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning
- Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3 ml: 66,6 ml

Säkerhetsanvisningar

- Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.
- Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme.
- Vid tillbud eller misstänkt funktionsfel ska detta omgående rapporteras till tillverkaren och vid allvarliga incidenter även till relevant myndighet enligt gällande regelverk

Före användning

- Det är viktigt att prova ut rätt storlek för säkerställa optimal funktion och komfort. Storleken mäts runt midjan.
- Produkten ska tvättas före första användning för att aktivera absorptionsförmågan.

REF	Produktens artikelnummer		Maskintvätt i max 60 °C		Ej kemtvätt
MD	Produkten är en medicin-teknisk produkt		Tyget tål ej blekning		Torktumling på låg värme
	Produkten innehåller inte PVC		Får ej strykas		Produkten är CE-märkt i enlighet med Förordning (EU) 2017/745
	Produkten innehåller inte latex		Tål ej sköljmedel		Tillverkare

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2025-16 ver 02

Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.
<https://www.swereco.com/sanifix-abs.-boxertrosa-valj-stl-w640>