

Duschstol Snurren

Art nr: 142210, 142211

Avsedd användning: Duschstol Snurren är avsedd som hjälpmedel vid duschning och tvagning i badkar för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Produktvarianter

Modell	Art.nr	Djup sits (cm)	Bredd sits (cm)	Vikt (kg)
Snurren hel sits	142210	40	43	6,7
Snurren intimsits	142211	40	43	6,7



Duschstol Snurren



Duschstol Snurren
intimsits

Tillbehör

- Låsanordning (Art nr 142230)
- Badkarsnurr Helsits (Art nr 142128)
- Badkarsnurr Intimsits (Art nr 142129)
- Mjukrygg + Stödfötter x2 (Art nr 142125 + Art nr 120706)

Reservdelar

- Stödfot Kulan (Art nr 120706)
- Låsspak komplett (Art nr 14221025-S)

Tekniska data

- Maximal brukarvikt: 130 kg
- Material: Stålrör (stativ), PE (sits), TPE (stödfötter)
- Förväntad livslängd är 5 år vid normal användning i enlighet med denna bruksanvisning. Livslängden kan förlängas genom regelbunden inspektion och underhåll utfört av behörig personal.
- Förvaring: Rumstemperatur
- Återvinning och avfall: Metall- och plaståtervinning. Sorteras efter lokal anvisning.

Säkerhetsanvisningar

- Produkten skall ej brukas på annat sätt än vad som är avsett. Inga egna anpassningar av produkten är tillåtna.
- Stolen passar badkar med en inre bredd av minst 53 och maximalt 64 cm. För badkar med inre bredd mellan 58 - 64 cm ska låsanordning användas för att fästa stolen i badkaret. Låsanordningen består av fyra ställskruvar och finns som tillbehör (Art nr 142230).
- Riskbedömning ska alltid utföras innan produkten tas i bruk gällande användarens behov, fysiska status, samt av användarmiljön.

- Om du är osäker på installationen eller har frågor, kontakta förskrivare, återförsäljare eller Swerecos kundsupport för hjälp.
- Mjukrygg (Art nr 142125), kan användas för brukare med god bålstabilitet. Skall föregås av riskbedömning av behörig förskrivare.
- Stolen skall placeras så att den sitter stadigt i badkaret.
- Stolen skall belastas jämnt på båda sidor för att minimera tipp-risk.
- Då stolen innehåller rörliga delar bör klämriskerna beaktas vid vridning av sitsen, speciellt vid användning av intimsits.
- Spaken håller ihop Snurrens över- och underdel. Om spaken tas bort upphör låsningen mellan delarna. Har spaken lossats ska produkten lyftas i det undre stativet för att förhindra att komponenter lossnar.
- Stolen får inte flyttas när brukaren sitter på den.
- Produkten får ej användas vid tecken på skador. Kontrollera produkten regelbundet enligt underhållsanvisningar.
- Slitna stödfötter kan innebära försämrat grepp och ska bytas ut mot nya.
- ⚠ Om rören har förkortats, max 2 cm för anpassning till badkaret, får den inte återanvändas i annan installation.
- Vid tillbud eller misstänkt funktionsfel ska detta omgående rapporteras till tillverkaren och, vid allvarliga incidenter, även till relevant myndighet enligt gällande regelverk.

SWERECO

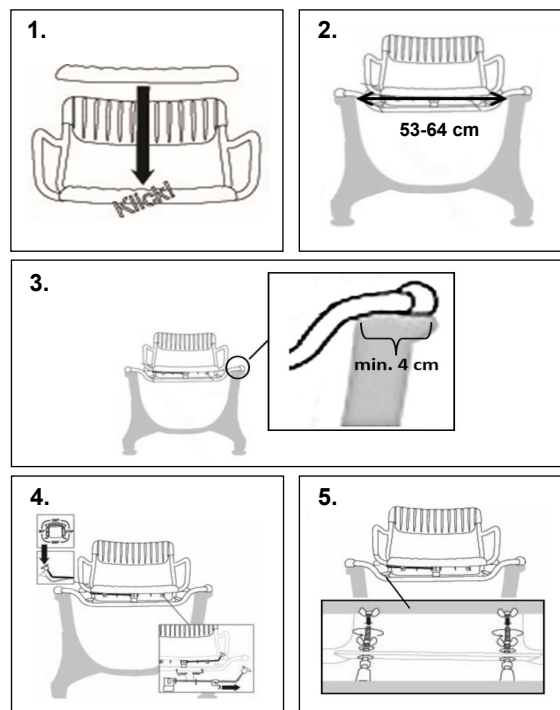
Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2025-17 ver 01

Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.
<https://www.swereco.com/sokresultat?search=snurren>

Monteringsanvisning:

1. Montera sitsen på stativet genom att trycka fast den på stålramen, se bild 1.
2. Placera duschstolen tvärs över badkaret. Vid badkarsbredd större än 58 cm måste låsanordningen monteras, se bild 2.
3. Kontrollera att alla stödfötter ligger mot badkarskanten. Kontaktytan bör vara minst 4 cm för varje enskild stödfot, se bild 3. Är kontaktytan mindre än 4 cm ökar risken för att stolen förlorar sitt fäste och blir instabil. Om osäkerhet råder - använd låsanordningen.
4. Kontrollera stödfötterna före användning. Skadade eller utslitna stödfötter skall bytas ut mot nya.
5. Stolen sits kan vridas 360 grader och spärras automatiskt var 90:e grad med en spärr som lätt frigörs genom att trycka ned den fjädrande spaken, se bild 4. Spaken går enkelt att flytta från höger till vänster sida.
6. Produkten får kapas max 2 cm för att anpassas till badkaret.
7. Brukas produkten i samband med träning av förflyttning måste låsanordning monteras, se bild 5.

**Underhåll**

- Kontrollera regelbundet att Snurren är stabil samt att stålroren inte har skador samt att alla komponenter är hela.
- Byt ut slitna delar vid behov.

Rengöring och rekonditionering

- Rengör produkten regelbundet med en mild tvällösning (pH 5–9) eller 70% isopropanol. Använd ej etanol då det kan skada plastdetaljer.
- Produkter ska rekonditioneras mellan varje brukare, vilket inkluderar en fullständig kontroll och byte av eventuellt utslitna eller skadade komponenter. Desinficera vid behov i avsedd desinfektionsutrustning vid 85°C i minst 3 minuter för att säkerställa hygienisk användning.

LOT Produktens partinummer

REF Produktens artikelnummer

MD Produkten är en medicinteknisk produkt

 Produktens utgångsdatum



Maximal brukarvikt



Produkten är CE-märkt i enlighet med med Förordning (EU) 2017/745



Konsultera bruksanvisning



Tillverkare

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2025-17 ver 01

Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.
<https://www.swereco.com/sokresultat?search=snurren>