

Duschstol Golvsnurren

Art nr: 142180, 142181

Avsedd användning: Duschstol Golvsnurren är avsedd som hjälpmedel vid duschning och tvagning för personer med nedsatt rörelseförmåga. Produkten är konstruerade för användning i våtutrymmen och ger brukaren en sittplats vid personlig hygien.

Produktvarianter

Modell	Art.nr	Höjd (cm)	Bredd sits (cm)	Djup sits (cm)	Vikt (kg)
Duschstol Golvsnurren	142180	45-55	43	40	6,8
Duschstol Golvsnurren intimsits	142181	45-55	43	40	6,8

Tillbehör

- Mjuksits Kulan, hel sits (Art nr 142121)
- Mjuksits Kulan, intimsits (Art nr 142122)
- Mjukrygg + Stödfötter x2 (Art nr 142125 + Art nr 120706)

Reservdelar

- Stödfot (Art nr 120690)
- Sits Kulan, hel sits Art nr 142128 (passar till Art nr 142180)
- Sits Kulan, intim Art nr 142129 (passar till Art nr 142181)
- Clipshållare (Art nr 14211305)
- Clips 25 mm (Art nr 14420213)
- Låsspak komplett (Art nr 14221025-S)
- Förlängarpåse Kulan (Art nr 14211320-S)

Teknisk data

- Maximal brukarvikt: 130 kg
- Material: stålrör (stativ), PE (sits, rygg, clipshållare), PE + stål (clips), TPE (stödfötter), aluminiumrör (förlängarrör)
- Förväntad livslängd är 5 år vid normal användning i enlighet med denna bruksanvisning. Livslängden kan förlängas genom regelbunden inspektion och underhåll utförd av behörig personal.
- Förvaring: Rumstemperatur
- Återvinning och avfall: Metall- och plaståtervinning. Sorteras efter lokal anvisning

Underhåll

- Kontrollera regelbundet att Golvsnurren är stabil samt att aluminium- och stålrören inte har skador samt att alla komponenter är hela.
- Kontrollera regelbundet att clipsen och clipshållaren är hela.
- Byt ut slitna delar vid behov.
- Vid byte av clips, säkerställ att det är rätt modell (flera storlekar finns).

Rengöring och rekonditionering

- Rengör produkten regelbundet med en mild tvållösning (pH 5–9) eller 70% isopropanol. Använd ej etanol då det kan skada plastdetaljer.
- Produkten ska rekonditioneras mellan varje brukare, vilket inkluderar en fullständig kontroll och byte av eventuellt utslitna eller skadade komponenter. Desinficera vid behov i avsedd desinfektionsutrustning vid 85°C i minst 3 minuter för att säkerställa hygienisk användning.
- Byt till nya clips efter genomförd rekonditionering av produkten.
- Vid byte av clips, säkerställ att det är rätt modell (flera storlekar finns).



Duschstol Golvsnurren



Duschstol Golvsnurren
intimsits

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2025-18 ver 01


Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.
<https://www.swereco.com/sokresultat?search=snurren>

Säkerhetsanvisningar

- Produkten skall ej brukas på annat sätt än vad som är avsett. Inga egna anpassningar av produkten är tillåtna.
- Riskbedömning ska alltid utföras innan produkten tas i bruk gällande användarens behov, fysiska status, samt av användarmiljön.
- Om du är osäker på installationen eller har frågor, kontakta förskrivare, återförsäljare eller Swerecos kundsupport för hjälp.
- Stolen är ej avsedd att användas i badkar. För badkar kan Duschstol Snurren (Art nr 142210, Art nr 142211) användas.
- Mjukrygg (Art nr 142125), kan användas för brukare med god bålstabilitet. Skall föregås av riskbedömning av behörig förskrivare.
- Vid montering och demontering av clippen, läs noggrant igenom monteringsanvisningarna för en säker installation.
- Inga verktyg får användas vid borttagning av clips.
- Trasiga clips kan medföra en allvarlig risk om förlängarbenet inte sitter ordentligt. Kontrollera regelbundet att clippen är hela. Om skador upptäcks ska clippen alltid bytas ut innan produkten får användas igen.
- Stolen skall placeras så att stolens fyra ben står stadigt mot golvet. Den maximala brukarvikten är beräknad med alla fyra ben i golvet.
- Stolen skall belastas jämnt på båda sidor för att minimera tipp-risk.
- Då stolen innehåller rörliga delar bör klämriskerna beaktas vid vridning av sitsen, speciellt vid användning av intimsits.
- Spaken håller ihop Snurrens över- och underdel. Om spaken tas bort upphör låsningen mellan delarna. Har spaken lossats ska produkten lyftas i det undre stativet för att förhindra att komponenter lossnar.
- Stolen får inte flyttas när brukaren sitter på den. Detta kan leda till att aluminiumrören böjs eller går av, vilket kan orsaka skada eller påverka stolens stabilitet.
- Produkten får ej användas vid tecken på skador. Kontrollera produkten regelbundet enligt underhållsanvisningar.
- Slitna stödfötter kan innebära försämrat grepp och ska bytas ut mot nya.
- Om aluminiumröret har skador får produkten inte användas, eftersom detta kan kraftigt försvaga dess stabilitet.
- Vid tillbud eller misstänkt funktionsfel ska detta omgående rapporteras till tillverkaren och, vid allvarliga incidenter, även till relevant myndighet enligt gällande regelverk.

Monteringsanvisning

1. Montera sitsen på stativet genom att trycka fast den på stålramen, se bild 1.
2. För justering av höjden, tryck loss clipset. Använd inga verktyg utan dra clipset rak ut för hand. Justera till rätt höjd och tryck sedan dit clipset igenom clipshållaren och röret igen, se bild 2. Kontrollera att clipset är ordentligt intryckt före användning. Ersätt ett gammalt clips med ett nytt. Kontrollera att det rätt storlek (flera storlekar finns).
3. Stolen sits kan vridas 360 grader och spärras automatiskt var 90:e grad med en spärr som lätt frigörs genom att trycka ned den fjädrande spaken. Spaken går enkelt att flytta från höger till vänster sida, se bild 3.
4. Kontrollera stödfötterna före användning, se bild 4. Skadade eller utslitna stödfötter skall bytas ut mot nya. Kontrollera att stolen placeras så att stolens fyra ben står stadigt mot golvet.

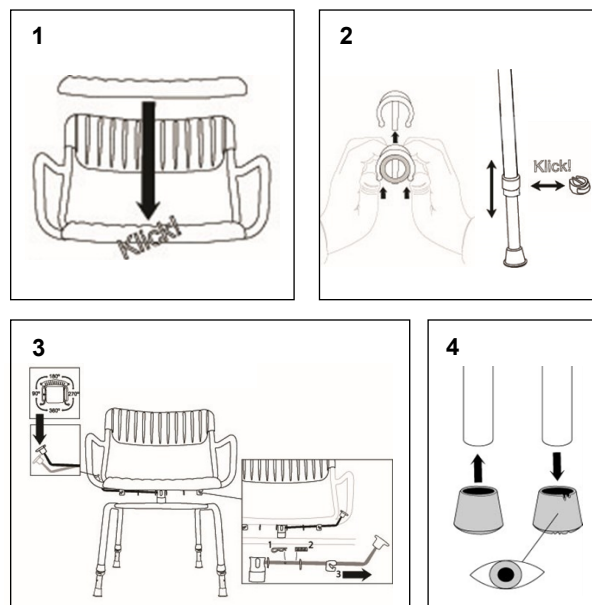

Produktens partinummer



Produktens artikelnummer



Produkten är en medicinteknisk produkt



Produktens utgångsdatum



Maximal brukarvikt



Produkten är CE-märkt i enlighet med Förordning (EU) 2017/745



Konsultera bruksanvisning



Tillverkare

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2025-18 ver 01

Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.
<https://www.swereco.com/sokresultat?search=snurren>