

# Sanifix absorberande trosa

**Art nr: 6420, 6421, 6422, 6423, 6424, 6425, 6426**

**Avsedd användning:** Sanifix absorberande trosa är en absorberande flergångsbyxa med hög kapacitet vid en funktionsnedsättning som droppinkontinens hos användaren.

**Sanifix absorberande trosa** är en tvättbar, absorberande flergångsbyxa för vuxna. Produkten har ett fastsytt absorberande ilägg samt ett spärrskikt som förhindrar genomvättning och ger hög komfort och säkerhet. Byxan är tillverkad i mjuk bomull och är ett bra alternativ till engångsskydd vid droppinkontinens. Modellen passar särskilt bra för vuxna som har svårt att behålla engångsskydd på plats eller som är känsliga för klister, och bidrar till ökad rörelsefrihet och trygghet i vardagen. Byxan tål cirka 100 tvättar i 60 °C utan att förlora passform eller uppsugningsförmåga och den kan torktumlas på låg värme.



## Produktvarianter

| Storlek | Art.nr | Höft      | Midja      | Benöppning | Vikt/produkt |
|---------|--------|-----------|------------|------------|--------------|
| XS      | 6420   | 68-92 cm  | 71-78 cm   | 44-60 cm   | 36 g         |
| S       | 6421   | 72-98 cm  | 81-88 cm   | 46-65 cm   | 42 g         |
| M       | 6422   | 78-104 cm | 91-97 cm   | 50-70 cm   | 47 g         |
| L       | 6423   | 80-108 cm | 102-107 cm | 52-75 cm   | 48 g         |
| XL      | 6424   | 88-112 cm | 112-117 cm | 54-80 cm   | 51 g         |
| XXL     | 6425   | 90-118 cm | 122-132 cm | 56-85 cm   | 53 g         |
| XXXL    | 6426   | 92-120 cm | 137-147 cm | 60-90 cm   | 66 g         |

## Teknisk data

- Material: 95% bomull och 5% spandex (byxan), 70% viskos och 30% polyester (absorptionsskikt), polyuretan (spärrskikt)
- Antal/förpackning: 1 st
- Färg: vit
- Krympning: <5%
- Förväntad livslängd: ca 100 tvättar i max 60°C
- Förvaring: rumstemperatur
- Återvinning och avfall: Textilåtervinning eller brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning
- Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3 ml: 66,6 ml

## Säkerhetsanvisningar

- Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.
- Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme.
- Vid tillbud eller misstänkt funktionsfel ska detta omgående rapporteras till tillverkaren och vid allvarliga incidenter även till relevant myndighet enligt gällande regelverk

## Före användning

- Det är viktigt att prova ut rätt storlek för säkerställa optimal funktion och komfort. Storleken mäts runt midjan.
- Produkten ska tvättas före första användning för att aktivera absorptionsförmågan.

**REF** Produktens artikelnummer

**MD** Produkten är en medicin-teknisk produkt

**PVC** Produkten innehåller inte PVC

**LATEX** Produkten innehåller inte latex

**60°** Maskintvätt i max 60 °C

**X** Tyget tål ej blekning

**X** Får ej strykas

**X** Tål ej sköljmedel

**X** Ej kemtvätt

**T** Torktumling på låg värme

**CE** Produkten är CE-märkt i enlighet med Förordning (EU) 2017/745

**T** Tillverkare

**SWERECO**

Swereco AB, Vagnvägen 4,  
SE-364 42 Lenhovda  
www.swereco.com · order@swereco.com  
+46 (0)8 5000 5240

## IFU 2025-20 ver 02

Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.  
<https://www.swereco.com/sokresultat?search=sanifix>